

Applikation



1 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband. Tragen Sie vor der Applikation bei Bedarf 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz im Abstand von 2 cm rund um die Einstichstelle auf.



2 Entfernen Sie die Schutzfolie des Verbands und positionieren Sie das transparente Fenster mittig über der Einstichstelle ohne den Verband dabei zu dehnen.




3 Modellieren Sie den Verband von Innen nach Außen mit leichtem Druck an.



4 Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



5 Befestigen Sie den breiten Fixierstreifen unterhalb der Katheterlumen.

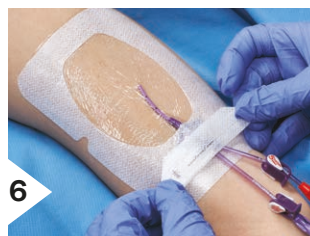

6 Nutzen Sie den Dokumentationsstreifen gemäß Ihrer hausinternen Vorschriften und sichern Sie die Katheterlumen.

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel +49 (0)2131 881 9260
3Mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care Business
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel +43 (0)186 68 60
medizin-at@mmm.com
www.3Mautria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care Business
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel +41 (0)44 724 90 90
innovation.ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

Entfernung



1 Entfernen Sie zuerst den Dokumentations- und den Fixierstreifen.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen.



3 Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand um eine Dislokation zu vermeiden.



www.3m.de/tegaderm

3M, 3M Science. Applied to Life., Cavilon und Tegaderm sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der 3M Company. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. (G) 2021-0062