


Attends® Soft



Anlegehinweise Soft 0 bis 7 und Contours 4 und 5



1 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Einlage.

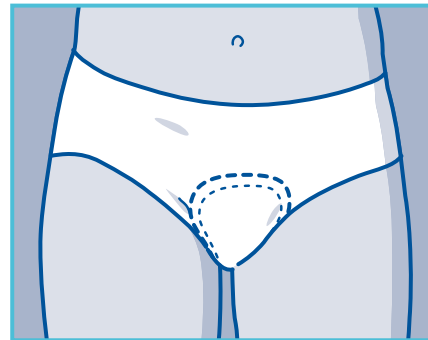

2 Befestigen Sie die Einlage mit der klebenden Seite in Ihrer möglichst enganliegenden Unterwäsche.

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die passende Produktgröße und Saugstärke.
- Für eine optimale Produktleistung empfiehlt es sich, die Einlagen in enganliegender Unterwäsche zu tragen.
- Je kleiner die Einlage ist, desto unauffälliger und diskreter ist sie zu tragen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Bei Attends Soft 1 bis 3+ kann man die Einzelverpackung für die Entsorgung des Produktes benutzen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Soft und Attends Contours ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.