


# Attends® Cover-Dri




## Anlegehinweise Attends Cover-Dri

### Vorbereitung

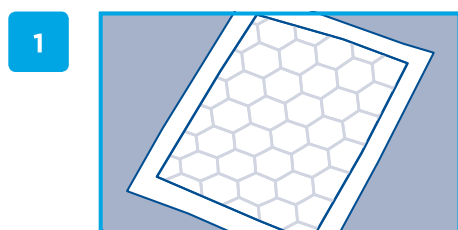


1 Breiten Sie das Produkt aus und achten Sie darauf, dass die wasserdichte Seite unten liegt. Die weiche, weiße Seite muss oben sein.

### Anlegen

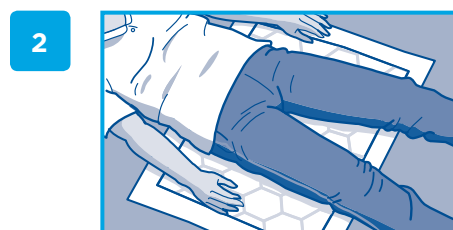


2 Platzieren Sie die Person auf der Krankenunterlage.


### Produktwechsel

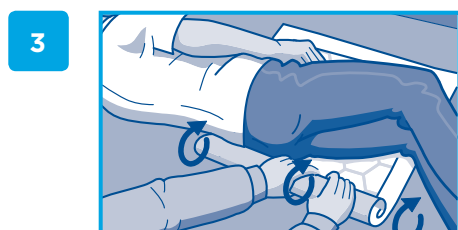


3 Drehen Sie die Person in die Seitenlage. Rollen Sie die gebrauchte Attends Cover-Dri Krankenunterlage zur Person hin auf.

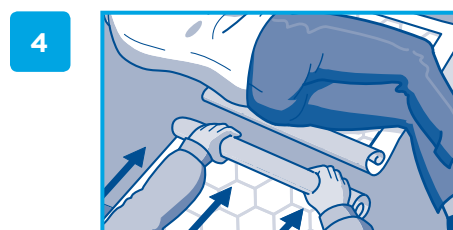

4 Rollen Sie die neue Attends Cover-Dri bis zum Rücken des Patienten auf.

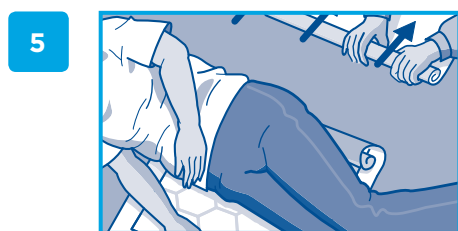

5 Drehen Sie die Person von der gebrauchten auf die frische Cover-Dri Krankenunterlage.

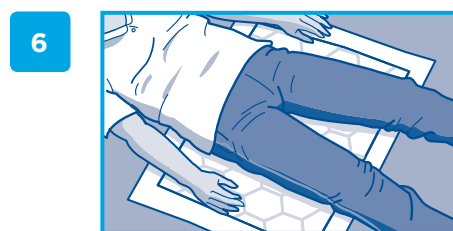

6 Drehen Sie die Person in ihre ursprüngliche Lage und ziehen Sie die Attends Cover-Dri noch einmal glatt.

## Hinweise und Tipps

### Produktauswahl

- Wählen Sie die passende Produktgröße und Saugstärke.

### Auslaufschutz

- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Größe und die richtige Saugstärke Ihrer Krankenunterlage verwenden.

### Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Cover-Dri ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.

[www.attends.de](http://www.attends.de)

[www.attends.at](http://www.attends.at)

[www.attends.ch](http://www.attends.ch)