




## LADY NIGHT PAD 6




Attends Lady Night Pad 6 sind weiche, stark saugende Einlagen speziell für die Nacht. Sie sind hinten breiter und sorgen so für zusätzlichen Schutz im Liegen während langer Tragezeiten. Sie sind bei mittlerer bis starker Harninkontinenz geeignet.


### Anlegehinweise

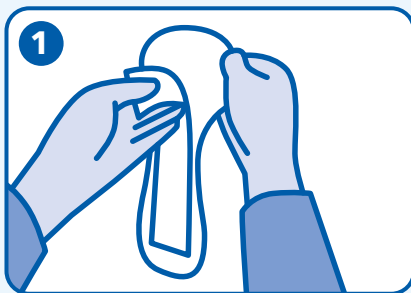


Entfernen Sie den Abziehstreifen auf der Rückseite der Einlage.

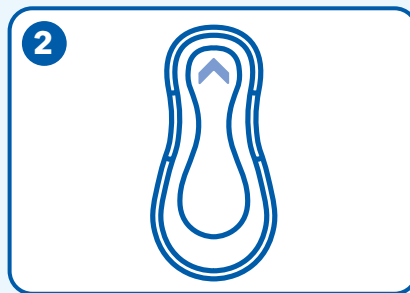

Nehmen Sie das schmale Ende der Einlage nach vorn.

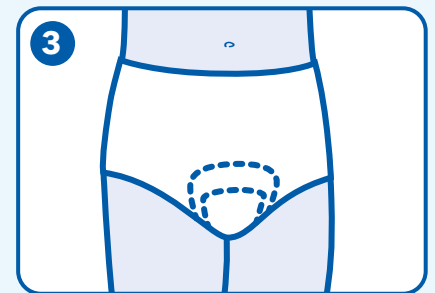

Befestigen Sie die Einlage in Ihrer möglichst enganliegenden Unterwäsche, das breite Ende kommt dabei nach hinten. Die klebende Außenseite in der Unterwäsche festdrücken.

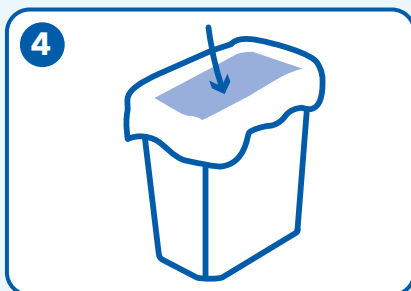

Rollen Sie das Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.

## LADY NIGHT PAD 6

### Hinweise und Tipps

#### Produktauswahl

- Für eine optimale Produktleistung empfiehlt es sich, die Produkte in enganliegender Unterwäsche zu tragen.

#### Entsorgung

- Rollen Sie das Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.
- Zum Entsorgen können Sie das gebrauchte Produkt in eine frische Einzelverpackung einwickeln.
- Entsorgen Sie das Produkt auf keinen Fall in die Toilette.



**Hautverträglichkeit** bestätigt von proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung. Getestet im Auftrag von Attends.

