


# Attends<sup>®</sup> Slip Regular




## Anlegehinweise Attends Slip Regular


### Vorbereitung

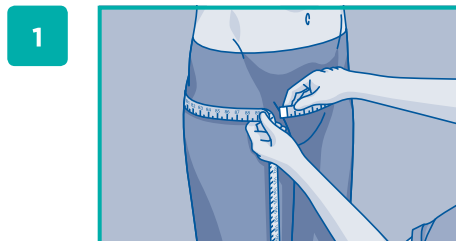

1 Messen Sie jeweils den Bauch- und den Hüftumfang. Nehmen Sie den höheren Wert und wählen Sie danach die Produktgröße aus.

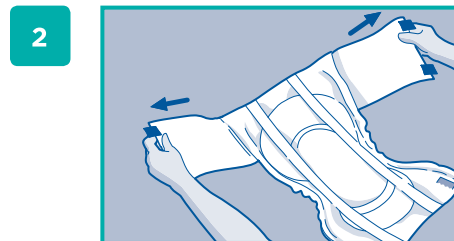

2 Nehmen Sie den Attends Slip aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass die Seitenflügel vollständig ausgeklappt sind.

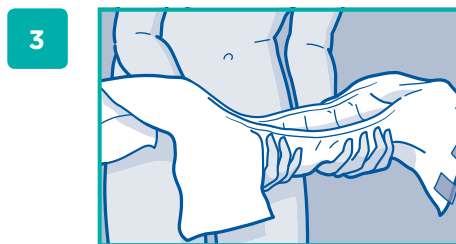

3 Formen Sie den aufsaugenden Teil des Produktes vorsichtig in Längsrichtung zu einem "Schiffchen", damit sich die Auslaufsperrn im Inneren aufrichten.


### Anlegen



4 Ziehen Sie den in Längsrichtung gefalteten Attends Slip von vorne nach hinten zwischen den Beinen durch, so dass die kleinere Fläche vorne und die größere Fläche am Gesäß ist. Achten Sie darauf, dass der blaue Strich in der Mitte des Produktes (Nässeindikator) in Verlängerung der Wirbelsäule verläuft.



5 Halten Sie die Vorderseite des Slips fest und fixieren Sie die Klebestreifen.

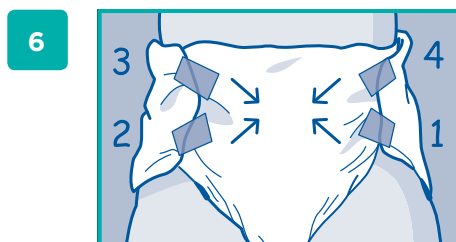

6 Befestigen Sie den unteren Klebestreifen zuerst quer nach oben, für eine enge Passform in der Leistenregion. Danach fixieren Sie den oberen Klebestreifen quer nach unten für eine bequeme Passform.

# Hinweise und Tipps

## Produktauswahl

- Ziehen Sie die Wahl von Attends Vorlagen mit Fixierhose in Betracht, bevor Sie den Attends Slip Regular benutzen. Die Hautabdeckung ist geringer.
- Wählen Sie die Slipgröße nach dem Messen des Bauch- und Hüftumfangs - maßgebend ist die größere Größe.
- Wählen Sie die Saugstärke nach der Menge des ausgeschiedenen Urins. Starten Sie, indem sie die niedrigst mögliche Saugstärke wählen.
- Slips sind auch für Menschen geeignet, die Einlagen herausziehen würden.

## Produktwechsel

- Der Nässeindikator (blauer Streifen auf der Produktrückseite) zeigt an, wie stark das Produkt ausgelastet ist. Der Streifen beginnt zu verschwimmen. Wenn mehr als die Hälfte verschwommen ist, sollten Sie das Produkt wechseln.
- Saubere und trockene Slips können nach dem Toilettengang weiter verwendet werden.
- Kleben Sie die Klebestreifen nicht auf die Haut.
- Reinigen Sie die Haut nach ihren Richtlinien - immer von vorne nach hinten.
- Verwenden Sie keine Creme auf Öl-Basis und kein Puder. Diese Produkte könnten die Saugfähigkeit der Attends Slips beeinflussen.

## Anlegen

- Streifen Sie den gekräuselten Saum der Beinbündchen nach dem Anlegen immer nach außen.
- Die Klebestreifen befinden sich beim Anlegen am rückwärtigen Produktteil.
- Fixieren Sie zunächst die unteren Klebestreifen quer nach oben und dann die oberen Klebestreifen quer nach unten. Stellen Sie sich dazu am besten mit dem Rücken an die Wand. Überprüfen Sie danach die Sitz- und Passform.
- Wenn der Slip im Liegen fixiert wird, übernehmen Sie bitte die selbe Vorgehensweise wie im Stehen. Um sicherzustellen, dass der Slip in Position bleibt, legen Sie beim Drehen eine Hand auf das Produkt im Rücken des Patienten.
- Der Nässeindikator (blauer Streifen auf der Produktrückseite) zeigt an, wie stark das Produkt ausgelastet ist. Der Streifen beginnt zu verschwimmen. Wenn mehr als die Hälfte verschwommen ist, sollten Sie das Produkt wechseln.

## Auslaufschutz

- Überprüfen Sie, ob das Produkt richtig, d.h. körpernah sitzt, ausreichend saugstark ist und ob Sie die passende Größe haben.
- Prüfen Sie, ob das Produkt zu klein oder zu groß ist.
- Falls das Produkt ausläuft, sollten Sie erst dann zur nächst höheren Saugstärke wechseln, wenn Sie ausgeschlossen haben, dass es sich um einen Anlegefehler handelt.

## Entsorgung

- Entsorgen Sie die Attends Slips über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.

**Attends® Slip** Regular



Die Hautfreundlichkeit von Attends Slips (außer Slip Regular 10XL) ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.



[www.attends.de](http://www.attends.de)

[www.attends.at](http://www.attends.at)

[www.attends.ch](http://www.attends.ch)