

Handhabung



Vor der Punktion

Führen Sie die Händedesinfektion entsprechend den hausinternen Richtlinien durch. Bereiten Sie die Haut des Patienten gemäß den hausinternen Anweisungen und Richtlinien vor.


Vorfüllen...

Ein Vorfüllen des Katheters wird durch Entfernen der Filterkappe am Y-Anschluss und durch Konnektion des Infusionssets ermöglicht. Nach der Punktion kann die Infusion durch Öffnen und Regeln der Infusionslösung aus dem Infusionsset in Gang gesetzt werden.

2a



2b

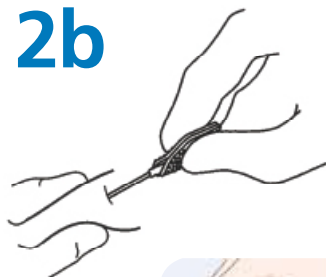

Punktion


- Halten Sie das System an den genoppten Oberflächen der Flügel und pressen Sie diese fest zusammen (Abb. 2a).
- Zum Auffinden des subkutanen Gewebes drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger die Haut um die Punktionsstelle herum leicht zusammen (Abb. 2b).
- Führen Sie den Katheter und die Kanüle in voller Länge in einem 30° - 45° Winkel in die Haut ein (Abb. 2b).




4

Entsorgung

- Entsorgen Sie die Kanüle umgehend in einem durchstich- und leckagesicheren Entsorgungsbehälter.

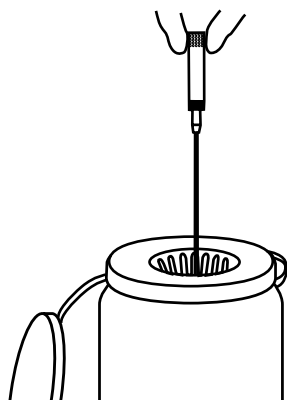


1

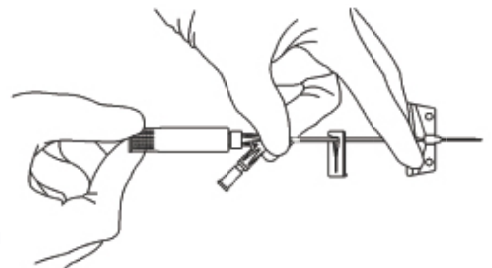

Vorbereitung

- Halten Sie das System wie abgebildet und drehen Sie den weißen Sicherheitsmechanismus, um die Kanüle zu lösen (Abb. 1).
- Stellen Sie sicher, dass das Kanülenaug nach oben zeigt und dass der Katheter vor der Punktion das Kanülenaug nicht bedeckt.


3

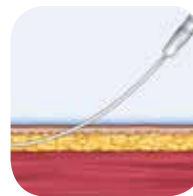

Stellen Sie sicher, dass das Kanülenaug im subkutanen Fettgewebe positioniert ist, also unter der Haut in einer Tiefe von 2 mm.

Entfernen der Kanüle

- Legen Sie die Flügel flach auf die Hautoberfläche und ziehen Sie den weißen Sicherheitsmechanismus in einer geraden, stetigen Bewegung zurück, bis sich der Kanülenschutz vom System ablöst (Abb. 3).

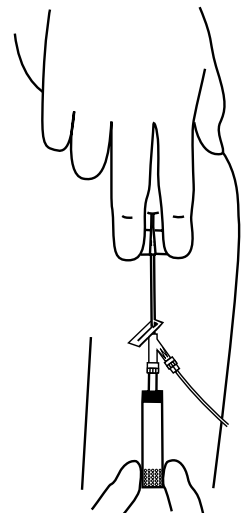

5

Fixierung

- Fixieren Sie den Katheter und legen Sie einen sterilen Verband gemäß den hausinternen Richtlinien an.

