

# Biatain® Silicone – Applikationshinweise



## Was sind die Vorteile von Silikon in der Wundversorgung?

- › Eine Silikonhaftung ist hautfreundlich und reduziert Hautirritationen.
- › Die Haut wird beim Verbandwechsel nicht beschädigt.
- › Silikon ist für jeden Hauttyp geeignet, auch bei Patienten mit Pergamenthaut.
- › Silikon bietet einen sicheren Halt ohne mit der Wunde zu verkleben und ermöglicht dadurch einen atraumatischen Verbandwechsel.




## Beachten Sie bitte diese Hinweise beim Applizieren von Biatain® Silicone

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Haut gereinigt und trocken ist.
- 2 Verwenden Sie **keine** Cremes, Lotionen oder Hautpflegemittel. Diese reduzieren die Haftungsfähigkeit des Silikons.
- 3 Entfernen Sie zuerst die mittlere Trägerfolie und applizieren Sie den Verband mittig auf der Wunde. Im nächsten Schritt entfernen Sie vorsichtig nacheinander die beiden Seitenlaschen und befestigen so den Verband vollständig an der Wundumgebung.
- 4 Fahren Sie mit den Fingern vorsichtig über den Haftrand, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- 5 Das Produkt sollte gewechselt werden, wenn sich das Exsudat sichtbar dem Rand des Schaumstoffs nähert oder spätestens nach 7 Tagen. Den selbsthaftenden Rand lösen, bevor das Produkt von der Wunde abgehoben und entfernt wird.



Hier geht's zum  
Anwendungsvideo

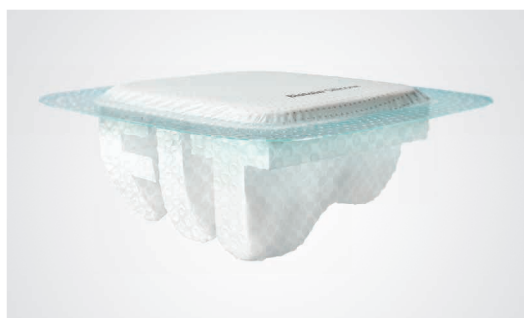

## Den Hohlraum schliessen – Biatain® Silicone mit der einzigartigen 3DFit Technologie

Dank der 3DFit Technologie wölbt sich Biatain® Silicone unter Exsudataufnahme bis zu 2 cm in Richtung Wundgrund. Das bedeutet, dass bei bis zu 80% der Wunden auf einen zusätzlichen Wundfüller verzichtet werden kann.<sup>1</sup>

1. Braunwarth, H., Forster, J., Schmitt, M., Bieber, R., Kruschwitz, S., Wound depth and the need of a wound filler in chronic wounds. Poster auf Wounds UK Annual Conference 2017, Harrogate.

## Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand



Artikel-Nr.	Grösse/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Pharmacode	MiGeL Nr.
334343	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	4671582	35.05.04.02.1
334353	10 × 10	6,5 × 6,5	10	4684538	35.05.04.03.1
334000	10 × 20	5,5 × 15,5	5	6662860	35.05.04.04.1
334010	10 × 30	5,5 × 25,5	5	6662877	35.05.04.05.1
334080 Multishape	14 × 19,5	7,5 × 12,1	5	6662920	35.05.04.05.1
334363	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	4671599	35.05.04.03.1
334373	15 × 15	10,5 × 10,5	5	5776030	35.05.04.04.1
334383	17,5 × 17,5	13 × 13	5	5941894	35.05.04.05.1

## Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand, Sakrum/Ferse



Artikel-Nr.	Grösse/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Pharmacode	MiGeL Nr.
334040 Sakrum	15 × 19	10,9 × 14	5	6662883	35.05.04.10.1
334050 Sakrum	25 × 25	17 × 17,2	5	6662908	35.05.04.10.1
334060 Ferse	18 × 18	14 × 13,2	5	6662914	35.05.04.05.1

## Biatain® Silicone Lite, mit Silikonhafrand



Artikel-Nr.	Grösse/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Pharmacode	MiGeL Nr.
334520	5 × 5	2,2 × 2,2	5	6444784	35.05.03.01.1
334530	5 × 12,5	2,2 × 9,7	5	6444790	35.05.03.02.1
334443	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	5535987	35.05.03.02.1
334453	10 × 10	6,5 × 6,5	10	5535970	35.05.03.03.1
334463	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	5535993	35.05.03.03.1

## Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhafrand





Artikel-Nr.	Grösse/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Pharmacode	MiGeL Nr.
396363	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	5	5604493	35.06.04.21.1
396373	10 × 10	6,5 × 6,5	5	5604501	35.06.04.22.1
396383	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	5	5604518	35.06.04.23.1
396393	15 × 15	10,5 × 10,5	5	6203856	35.06.04.24.1
396403	17,5 × 17,5	13 × 13	5	6203833	35.06.04.24.1

## Biatain® Silicone Non-Border, mit Silikonhaftung



Artikel-Nr.	Grösse/cm	St./VE	Pharmacode	MiGeL Nr.
390201	5 × 7,5	10	7766826	35.05.03.01.1
390211	7,5 × 7,5	10	7766827	35.05.03.02.1
390221	10 × 10	10	7766828	35.05.03.03.1
390231	12,5 × 12,5	10	7766829	35.05.03.03.1
390242	10 × 20	5	7766830	35.05.03.04.1
390252	15 × 15	5	7766831	35.05.03.04.1
390262	20 × 20	5	7766832	35.05.03.06.1

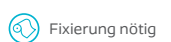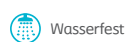

MiGeL Nr.: unverbindliche Empfehlung, jegliche Haftung ausgeschlossen