

# Biatain® Silicone – Notes d'application




## Quels sont les avantages du silicone dans le soin des plaies ?

- › L'adhérence du silicone est douce pour la peau et réduit les irritations cutanées.
- › La peau n'est pas endommagée lors du changement de pansement.
- › Le silicone convient à tous les types de peau, y compris les patients avec une peau fragile.
- › Le silicone assure une bonne tenue sans coller à la plaie et permet ainsi un changement de pansement atraumatique.




## Veillez respecter ces instructions lors de l'application de Biatain® Silicone

- 1 Veillez à ce que la peau soit nettoyée et qu'elle soit sèche.
- 2 N'utilisez pas de crèmes, lotions ou produits de soins de la peau. Ceux-ci réduisent l'adhésivité du silicone.
- 3 Enlevez d'abord le feuillet central et appliquez le pansement au centre de la plaie. Dans l'étape suivante, enlevez soigneusement l'un après l'autre les deux rabats latéraux bleus et fixez-les pour que le pansement soit complètement collé.
- 4 Déplacez doucement vos doigts sur le bord de l'adhésif pour s'assurer d'une bonne adhérence.
- 5 Le produit doit être changé lorsque l'exsudat est visible au bord de la mousse ou après 7 jours maximum. Retirez les bords du pansement avant de retirer la partie centrale qui est en contact avec la plaie.

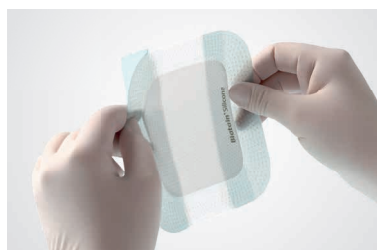

Cliquez ici pour la vidéo d'application

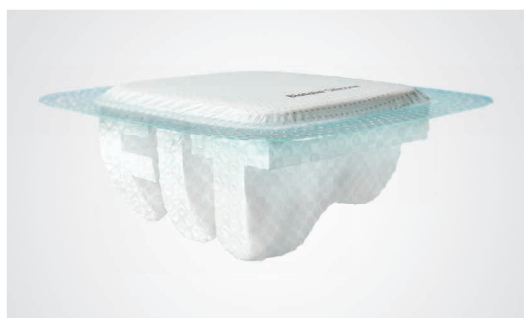

## Comblez la cavité. Biatain® Silicone doté de l'unique technologie 3DFit

Grâce à la technologie 3DFit, Biatain® Silicone se conforme au lit de la plaie sous l'effet de l'humidité. Créant ainsi un contact direct avec le lit de la plaie et empêche l'accumulation des exsudats pour les plaies de 0 cm à 2 cm. Cela signifie, que jusqu'à 80% des plaies peuvent être traitées sans l'utilisation d'un produit de remplissage.<sup>1</sup>

1. Braunwarth, H., Forster, J., Schmitt, M., Bieber, R., Kruschwitz, S., Wound depth and the need of a wound filler in chronic wounds. Poster présenté à Wounds UK Annual Conference 2017, Harrogate.

## Biatain® Silicone, avec bord adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334343	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	4671582	35.05.04.02.1
334353	10 × 10	6,5 × 6,5	10	4684538	35.05.04.03.1
334000	10 × 20	5,5 × 15,5	5	6662860	35.05.04.04.1
334010	10 × 30	5,5 × 25,5	5	6662877	35.05.04.05.1
334080 <i>Multiforme</i>	14 × 19,5	7,5 × 12,1	5	6662920	35.05.04.05.1
334363	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	4671599	35.05.04.03.1
334373	15 × 15	10,5 × 10,5	5	5776030	35.05.04.04.1
334383	17,5 × 17,5	13 × 13	5	5941894	35.05.04.05.1

## Biatain® Silicone, avec bord adhésif, Sacrum/Talon



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334040 <i>Sacrum</i>	15 × 19	10,9 × 14	5	6662883	35.05.04.10.1
334050 <i>Sacrum</i>	25 × 25	17 × 17,2	5	6662908	35.05.04.10.1
334060 <i>Talon</i>	18 × 18	14 × 13,2	5	6662914	35.05.04.05.1

## Biatain® Silicone Lite, avec bord adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334520	5 × 5	2,2 × 2,2	5	6444784	35.05.03.01.1
334530	5 × 12,5	2,2 × 9,7	5	6444790	35.05.03.02.1
334443	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	5535987	35.05.03.02.1
334453	10 × 10	6,5 × 6,5	10	5535970	35.05.03.03.1
334463	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	5535993	35.05.03.03.1

## Biatain® Silicone Ag, avec bord adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
396363	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	5	5604493	35.06.04.21.1
396373	10 × 10	6,5 × 6,5	5	5604501	35.06.04.22.1
396383	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	5	5604518	35.06.04.23.1
396393	15 × 15	10,5 × 10,5	5	6203856	35.06.04.24.1
396403	17,5 × 17,5	13 × 13	5	6203833	35.06.04.24.1

## Biatain® Silicone Non-Border, avec adhésif en silicone



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
390201	5 × 7,5	10	7766826	35.05.03.01.1
390211	7,5 × 7,5	10	7766827	35.05.03.02.1
390221	10 × 10	10	7766828	35.05.03.03.1
390231	12,5 × 12,5	10	7766829	35.05.03.03.1
390242	10 × 20	5	7766830	35.05.03.04.1
390252	15 × 15	5	7766831	35.05.03.04.1
390262	20 × 20	5	7766832	35.05.03.06.1

Léger – moyen   
 Moyen – abondant   
 Résistant à l'eau   
 Découpable   
 Effet antibactérien   
 Fixation nécessaire

LIMA No.: Recommandation sans obligation. Toute responsabilité est exclue