


Bedienungsanleitung

■ Mode d'emploi

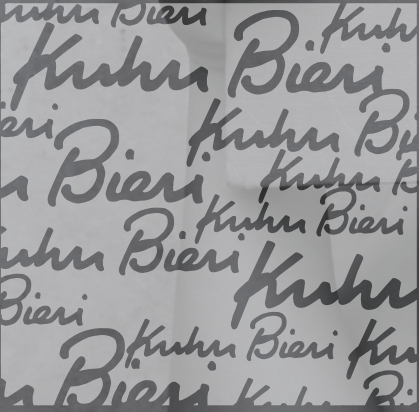

Dusch-Nachtstuhl
■ Chaise douche-toilettes
M2-Plus

GEBRAUCHSANWEISUNG: M2 200 kg. DUSCH7TOILETTENSTUHL
Stuhl eignet sich zum Gebrauch beim Duschen/Baden und Toilettenbesuch.

SICHERN DER RÄDER:



Richtungssteuerräder



Der Stuhl muss vor dem Baden / Duschen an alle 4 Räder, durch Herunterdrücken der Bremse gesichert werden.

Der vorne rädern am rechts ist eine Richtungssteuerräder. Damit kann Mann den Stuhl einfach fahren.

FUßSTÜTZEN:




REINIGEN:



Fußstützen durchs hineinstecken in den Fußstützenhalterungen montieren.

Um das reinigen zu erleichtern, kann der Sitz abgeklickt werden.

ARMLEHNE

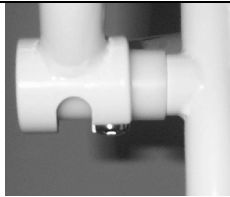


SITZ ANSEHEN




Um die Armlehne abzumontieren, muss der Bolzenkopf vor dem Ausgefrästen der Armlehne sein und dann abziehen.

Sichern Sie das die hinten kant von sitz geht rum die Querstange.

AUSWECHSLUNG VON RÄDERN

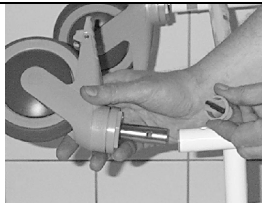

Gebrauch der Eimer

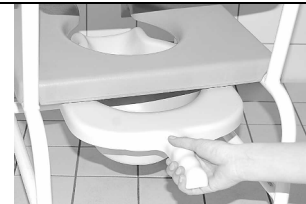

Das Clips wird auf das rad aufgenommen. Rad ausnehmen und neue rad reintunen.

Wenn Mann abmontiert der Eimer vom Stuhl, ist es wichtig, dass Mann gerade nach hinten, entlang der Sitze schieben. Andernfalls kann es sehr schwierig sein, zu abmontieren der Eimer vom Stuhl.

Artkl. Nr. 310270/310271/310272/310273

Max. Belastung 200 kg

2 Jahre Reklamations-recht ang. Fabrikations-Fehler.

Reinigen: Bei Desinfizierung:

Kann benutzt werden: Ethanol und Propansoll Auflösung. Sonst normal vorkommende nicht alkoholische Reinigungsmittel verwenden. Max.70 grad.


Ersatzteile für M2 200 kg. Dusch /Toilettenstuhl

Artkl. Nr.:	
310354	Intimsitze M2 200 kg, grau
310343	Deckel für Intimsitze, grau
800073	Armlehn für M2 200 kg., Paar m/2Stck.
800181	P. u. Schaumkissen für Armlehn ein Stck. Grau
800012	Schrauben für P.U. Schaumkissen für Armlehn 2. Stck.
310344	Pu Rücken, grau
310063	Schraube für Rücken 4 Stck.
800103	100 mm Räder mit massivem Bein und 1 Clips
800154	100 mm Richtungssteuerräder mit massivem Bein und 1 Clips
800104	125 mm Räder mit massivem Bein und 1 Clips
800155	125 mm Richtungssteuerräder mit massivem Bein und 1 Clips
310073	Plastik zwingen für Fläche Armlehn
310074	Plastik zwingen für runden Armlehn
800245	Grau zwingen für Flächeoval Armlehn
310074	Plastikzwingen für Armlehnhalter
800244	Plastikzwingen für Stosshandgriff
310076	Nylonbuchsen für Armlehn 1 Stck.
800082	Bolzen f. Armlehn 1 Stck.
310065	Clips für Höhenregulierung von Fußstützen 1 Stck.
310090	Fußplatte f. Fußstütze 1 Stck.
310091	Bolzen für Fußplatte 1 Stck.



18-12-07

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HMN a/s
Midtager 22, 2605 Brøndby, Dänemark
Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax.: +45 43 96 26 92
E-mail info@hmn.dk www.hmn.dk



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch

