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




AUS
PRONTOSAN[®] C
WIRD
PRONTODERM[®] C

Die antimikrobielle Lösung
zur Reinigung von Katheter-Eintrittsporten




PRONTODERM® C

Für den wiederholten und langfristigen Gebrauch

IHRE VORTEILE

- Unterstützend bei der Vorbeugung von Harnwegsinfekten
- Hervorragende Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- Schleimhäute trocknen nicht aus
- Gebrauchsfertig, praktisch und schnell zur Hand
- Keine Irritationen und kein Brennen

ANWENDUNG

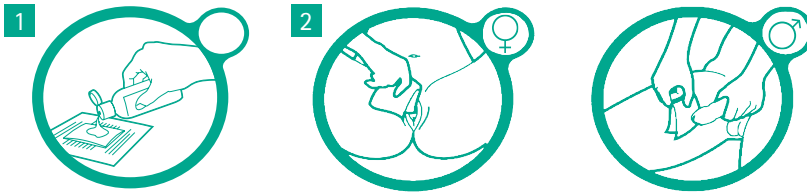

- 1 ▪ Kompressen/Tupfer gut benetzen
- 2 ▪ Katheter-Eintrittspforte mit getränktem Tupfer oder Komresse reinigen
 - Von der Innenseite nach Aussen vorgehen
 - Mind. 1 Minute einwirken lassen, muss nicht abgewaschen werden

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
75 ml	1	400195	

Ingredients Prontoderm® C

Aqua, Undecylenamidopropyl Betaine, Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide)
Geprüft nach EN 12054 und EN 1499 | 8 Wochen nach Anbruch aufzubauchen



B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com | www.bbBraun.ch