

# RBP Butterfly Paravent | Paravent Butterfly | Butterfly Paravent

Montageanleitung | Instructions de montage | Installation instructions



Distributed by  
**puras**  
031 996 85 85  
puras.ch



- 1** Lieferzustand der Querfüße  
Pièces livrées pour le montage du piètement transversal  
Delivery condition of cross feet



- 2** Rollen auf Bolzen stecken bis zum Einrasten  
Enclencher les roulettes dans la cheville en métal  
Put the castors on the bolt until they lock



- 3** Schraube mit Sicherungsring in Bohrung stecken  
Introduire la vis avec la rondelle de sécurité dans le trou  
Put the screw with the locking ring in the borehold



- 4** Querfuß mit Paravent verschrauben, auf richtigen Sitz des Querfußes achten (90° zum Flügel)

Visser le piètement au paravent dans la bonne position (90° par rapport au battant)

Fix with the screw the cross feet with the paravent (must be in a 90° angle to the paravent wing)



- 5** Fertig montierter Butterfly-Paravent  
Paravent Butterfly monté  
Fully assembled Butterfly-Paravent

