


Anwendungshinweise

Fixierung für Nasale Sonden

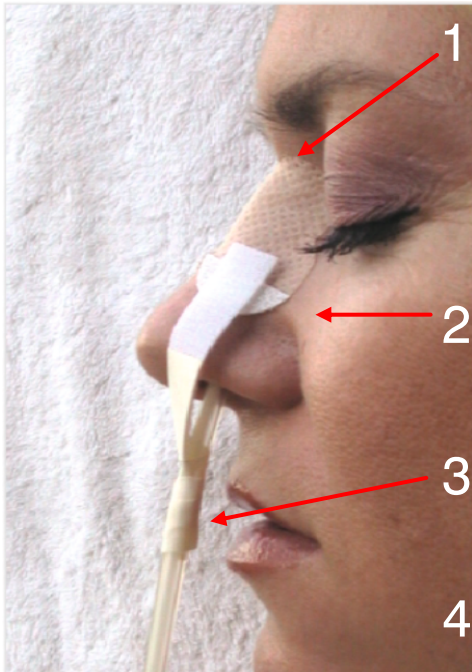

- Nasalhalter**
- Die Nase trocken und fettfrei vorbereiten.
- **Wichtig: Den Halter auf den knöchernen Teil der Nase kleben, hält besser!** (Die Nasenspitze ist zu weich und hat zu viele Talgdrüsen)
- Nasalband**
- Folie abziehen und mit dem Flausch am Klett befestigen.
- Mit dem Klebestreifen die Sonde komplett umschlingen.
- Das Ende des Bändchen auf sich kleben. (Vereinfacht das auswechseln)

Sonde hängt frei in der Nase!

- Bei Verschmutzung nur das Bändchen wechseln.
- Beim Wechseln des Bändchens den **Halter mit dem Finger festhalten**.
- Die Fixierung hält auch wenn sie nass wird.
- Bei Hydrocolloid, nicht mit Benzin reinigen.
- Den Halter gut anformen!

Nasal - Set

- Nasal-Set**
Art. Nr. 8500400 **Hydrocolloid**
- Nasal-Set**
Art. Nr. 8500401 **Vlies-Basis**
- Nasalhalter**
Art. Nr. 8500410
- Nasalband**
Art. Nr. 8500440



Liegedauer je nach Anwendung
2 - 3 Tage, Hydroc. - 5 Tage

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt auf der Haut.