

T.E.D.™ Anti-Thrombose-Strümpfe

Nr.	Oberschenkel- umfang	Waden- umfang	Länge	Covidien Nr.	REF	Farbmarkierung Inspektionszehe = Grösse	Farbmarkierung Haftband = Länge
A	bis 63,5 cm	bis 30,5 cm	bis 74 cm	3071LF	751210	klein	kurz
B			über 74 bis 84 cm	3130LF	751220	klein	normal
C			über 84 cm	3222LF	751230	klein	lang
D		über 30,5 bis 38 cm	bis 74 cm	3310LF	751250	mittel	kurz
E			über 74 bis 84 cm	3416LF	751260	mittel	normal
F			über 84 cm	3549LF	751270	mittel	lang
G		über 38 bis 44,5 cm	bis 74 cm	3634LF	751310	gross	kurz
H			über 74 bis 84 cm	3728LF	751320	gross	normal
J			über 84 cm	3856LF	751330	gross	lang
K			über 63,5 bis 81,3 cm	über 38 bis 44,5 cm	bis 74 cm	4010LF	751280
L	über 74 bis 84 cm	4114LF			751290	XL	normal
M	über 84 cm	4216LF			751300	XL	lang
N	über 63,5 bis 81,3 cm	über 44,5 bis 54,6 cm	bis 74 cm	3180LF	751340	XL	kurz
P			über 74 bis 84 cm	3181LF	751350	XL	normal
Q			über 84 cm	3182LF	751360	XL	lang
R	über 81,3 bis 91,4 cm	über 54,6 bis 66 cm	bis 74 cm	3183LF	751370	XXL	kurz
S			über 74 bis 84 cm	3184LF	751380	XXL	normal
T			über 84 cm	3185LF	751390	XXL	lang

oberschenkellang



COVIDIEN

Vertrieb durch:

IVF Hartmann AG · CH-8212 Neuhausen
www.ivf.hartmann.info


Hinweise für korrektes Anziehen der T.E.D.TM Anti-Thrombose-Strümpfe Oberschenkelang



1. Mit der Hand bis zur Fersenrundung in den Strumpf fassen.
2. Mitte der Fersenrundung greifen und den Strumpf bis zur Fersengegend auf links drehen.
3. Strumpf sorgfältig über Fuss und Ferse stülpen. Prüfen, ob die Ferse des Patienten in der Mitte der Fersenrundung liegt.
4. Strumpf über Knöchel und Wade nach oben ziehen. Die anders gewirkte Stelle (veränderte Stelle des Materials) sollte 2,5–5 cm unterhalb der Fossa poplitea (Kniebeuge) liegen.
5. Prüfen, dass in Fuss- und Knöchelgegend keine Falten bleiben. Wenn nötig, Zehenteil etwas nach vorne ziehen, um Knöchel und Spannregion zu glätten. Darauf achten, dass die Zehen genügend Platz haben. Der obere Strumpftrand endet an der Gesässfalte. Der V-förmige Einsatz muss sich an der Innenseite des Oberschenkels befinden.
6. Die Patienten sollten in dem richtigen Sitz des Strumpfes unterwiesen werden, damit gewährleistet wird, dass der Patient die Strümpfe beim Wiederanziehen nicht falsch anlegt.

Größenbestimmung

1. Oberschenkelumfang messen
2. Wadenumfang an der stärksten Stelle messen = Grösse
3. Länge zwischen Ferse und Gesässfalte messen = Länge

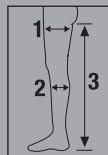

ACHTUNG:

Waschen: Waschtemperatur max. 70 °C

Trocknen: Warentemperatur von 70 °C darf nicht überschritten werden!