

T.E.D.™ Medizinische Thromboseprophylaxe-Strümpfe

Nr.	Wadenumfang	Länge	Covidien Nr.	REF	Farbmarkierung Inspektionszehe = Grösse	Farbmarkierung Haftband = Länge
A-	bis 30,5 cm	bis 41 cm	7071	751020	klein	normal
B-		über 41 cm	7339	751030	klein	XL
C-	über 30,5 bis 38 cm	bis 43 cm	7115	751060	mittel	normal
D-		über 43 cm	7480	751070	mittel	XL
E-	über 38 bis 44,5 cm	bis 46 cm	7203	751120	gross	normal
F-		über 46 cm	7594	751130	gross	XL
G-	über 44,5 bis 51 cm	bis 46 cm	7604	751160	XL	normal
H-		über 46 cm	7802	751170	XL	XL
J-	über 51 bis 58,4 cm	bis 46 cm	7470LF	751080	XXL	normal
K-		über 46 cm	7471LF	751090	XXL	XL
L-	über 58,4 bis 66 cm	bis 46 cm	7472LF	751100	XXXL	normal
M-		über 46 cm	7473LF	751110	XXXL	XL

knielang




Vertrieb durch:

IVF Hartmann AG · CH-8212 Neuhausen
www.ivf.hartmann.info

Grössenbestimmung:

2. Wadenumfang messen = Grösse
3. Länge zwischen Ferse und Kniekehle messen = Länge

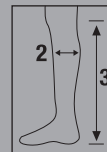

Hinweise für korrektes Anziehen der T.E.D.TM Anti-Thrombose-Strümpfe knielang



1. Mit der Hand bis zur Fersenrundung in den Strumpf fassen.
2. Mitte der Fersenrundung greifen und den Strumpf bis zur Fersengegend auf links drehen.
3. Strumpf sorgfältig über Fuss und Ferse stülpen. Prüfen, ob die Ferse des Patienten in der Mitte der Fersenrundung liegt.
4. Strumpf über Knöchel und Wade nach oben ziehen.
5. Prüfen, dass in Fuss- und Knöchelgegend keine Falten bleiben. Wenn nötig, Zehenteil etwas nach vorne ziehen, um Knöchel und Spannengegend zu glätten. Darauf achten, dass die Zehen genügend Platz haben.
6. Die Patienten sollten in dem richtigen Sitz des Strumpfes unterwiesen werden, damit gewährleistet wird, dass der Patient die Strümpfe beim Wiederanziehen nicht falsch anlegt.

ACHTUNG:

Waschen: Waschtemperatur max. 70 °C

Trocknen: Warentemperatur von 70 °C darf nicht überschritten werden!



Mat. No 847074.07/12