

Mode d'emploi

Rehausseur WC

Réf. art. 17525 010 6 cm, avec couvercle
 Réf. art. 17525 000 10 cm, avec couvercle
 Réf. art. 17525 020 14 cm, avec couvercle

Réf. art. 17525 110 6 cm, **ohne Deckel**
 Réf. art. 17525 100 10 cm, **ohne Deckel**
 Réf. art. 17525 120 14 cm, **ohne Deckel**



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant utilisation, suivez les instructions et conservez-le soigneusement !
 Si ce produit est utilisé par d'autres personnes, elles doivent être pleinement informées des instructions données ici avant utilisation.

Indications/Contre-indications

Le rehausseur WC facilite l'utilisation des toilettes aux personnes ayant une mobilité réduite de la colonne vertébrale lombaire et/ou des articulations des hanches/genoux et donc une capacité limitée à s'asseoir et/ou à se relever d'une cuvette de WC conventionnelle. Il est monté fixement sur la cuvette des toilettes et rehausse le siège. Cela minimise les contraintes liées à la courbure des hanches et des genoux. Cela facilite les mesures d'hygiène et accroît l'autonomie. Le couvercle (s'applique à l'art. 17525 010, -000 et -020) doit être rabattu pendant l'utilisation du rehausseur WC et n'est utilisé que pour fermer les toilettes. L'utilisation du rehausseur WC implique la capacité à s'asseoir en toute autonomie. En cas d'incapacité à s'asseoir, d'altération de la perception ou de troubles de l'équilibre en position assise, le rehausseur WC ne doit pas être utilisé.

⚠️ Consignes de sécurité ⚠️


- La capacité de charge maximale de 200 kg ne doit pas être dépassée.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le rehausseur WC est bien fixé sur la cuvette !
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le rehausseur WC est en parfait état !
- En cas d'incertitudes ou de questions sur le montage ou l'entretien, veuillez contacter votre revendeur spécialisé !
- Veuillez vous assurer que le rehausseur WC répond à vos besoins. En cas de doute, adressez-vous à votre médecin ou à votre revendeur spécialisé !
- Les pièces manquantes, endommagées ou usées ne peuvent être remplacées que par le revendeur spécialisé !
- Le rehausseur WC ne doit pas être déposé ou rangé en extérieur.
- Évitez les longs mouvements penchés et saccadés pendant l'utilisation !
- N'utilisez pas le couvercle comme siège, mais seulement pour fermer les toilettes !

Contenu

Le rehausseur WC est fourni avec deux attaches et un mode d'emploi.

Montage

1. Rabattez le couvercle et la lunette des toilettes. Le rehausseur WC doit être monté directement sur la cuvette des toilettes. En option, le couvercle et la lunette des toilettes peuvent également être démontés avant de monter le rehausseur WC.
2. Pour fixer les deux attaches en L (fig. 1, contenu de la livraison 1 attache, composée des 2 composants a et b) sur le siège des toilettes, placez le siège avec l'assise tournée vers le bas devant vous sur une surface plane.
3. Placez la vis de fixation dans l'attache par le haut (fig. 2) et faites glisser les deux parties ensemble dans l'une des ouvertures sur le côté du siège (fig. 3). Appuyez légèrement sur l'attache et tournez la poignée de la vis de montage (b) dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le filetage s'enclenche (fig. 4). Répétez l'opération avec la deuxième attache (fig. 5).

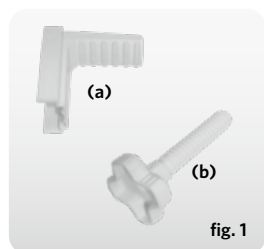

4. Positionnez les attaches de manière à ce que la distance entre les deux attaches soit supérieure à la largeur de la cuvette des toilettes.
5. Retournez le rehausseur WC et placez-le sur la cuvette, avec le support à lèvres à l'avant et les attaches sur le côté à l'arrière.
6. Tournez les vis de fixation des attaches dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la résistance devienne perceptible, que le support à lèvres soit bien fixe sur la cuvette et que le siège ne puisse plus être déplacé latéralement.

Pour l'entretien régulier et la maintenance du produit, vous trouverez ci-dessous un tableau de maintenance et un plan d'hygiène :

Tableau de maintenance	
Le rehausseur WC ne nécessite que peu d'entretien, mais doit être contrôlé avant chaque réutilisation.	
Quand	
Avant chaque réutilisation	
Quoi	À respecter
Vérification de l'état général Contrôle visuel de toutes les pièces en vue de déterminer les dommages, la stabilité, l'usure et la déformation.	Si vous constatez des défauts, remplacez les pièces du produit concernées.

Plan d'hygiène

Avant chaque réutilisation et/ou avant chaque changement de patient, le rehausseur WC doit être désinfecté et nettoyé.

Nettoyage/désinfection

1. Avant de préparer le rehausseur WC, mettez des gants de protection et, si nécessaire, des vêtements de protection (tablier jetable).
2. Commencez toujours par le nettoyage, puis procédez à la désinfection.
3. Pour le nettoyage, utilisez de l'eau et un détergent doux. L'eau ne doit pas pénétrer dans les tuyaux. N'utilisez pas de détergents corrosifs ou blanchissants.
4. Essuyez ou vaporisez le rehausseur WC avec un désinfectant classé DGHM/VAH (observez le temps d'exposition selon les spécifications du fabricant). La désinfection par essuyage est généralement préférable à la désinfection par pulvérisation. Après le temps d'action du désinfectant, séchez le rehausseur WC avec un chiffon sec et propre.

Après le nettoyage, séchez le rehausseur WC avec un chiffon sec et propre.

Réutilisation

Le produit peut être réutilisé. Avant d'être réutilisé, il doit être nettoyé et désinfecté. En outre, il doit être inspecté par le revendeur spécialisé pour détecter tout dommage, puis redonné pour être réutilisé.

Matériau

- Siège de toilette, couvercle : Polypropylène
- Attaches : nylon renforcé de fibres de verre, caoutchouc thermoplastique

Élimination

Ne vous contentez pas de jeter le rehausseur WC avec les ordures ménagères normales. Renseignez-vous au préalable auprès de votre entreprise communale de gestion des déchets sur la manière appropriée et écologique d'éliminer les déchets dans votre région.

Durée de vie

La durée de vie utile du rehausseur WC est d'au moins trois ans, avec une utilisation quotidienne et un nettoyage, si l'utilisation est conforme aux informations contenues dans le mode d'emploi. Le produit peut être utilisé au-delà de cette période s'il n'est pas endommagé et est dans un état sûr.

Données techniques*

- Dimensions : 40 x 36,5 x 6/10/14 cm (L x l x H)
- Dimensions ouverture interne : 25 x 20,6 cm (L x l)
- Capacité de charge max. : 200 kg
- Taille recommandée : 145-200 cm
- Poids : 6 cm : 750/1 066 g (sans/avec couvercle)
10 cm : 839/1 156 g (sans/avec couvercle)
14 cm : 978/1 295 g (sans/avec couvercle)

* De légers écarts sont possibles.

Vous recherchez encore plus de confort d'assise ? Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé sur l'abattant souple des rehausseurs WC !

L'abattant souple disponible en option, réf. art. 17525 050, rend l'utilisation encore plus agréable, ce que les personnes sensibles à la pression ne seront pas les seules à apprécier. Montage facile et sans outil.



MD Ce produit est conforme au règlement 2017/745/UE relatif aux dispositifs médicaux et comporte un marquage CE.



Si un incident grave devait se produire en rapport avec ce dispositif médical, contactez le fabricant de ce produit par e-mail à info@russka.de, ainsi que l'autorité compétente de votre pays.

 Producteur: Ludwig Bertram GmbH, Im Torfstich 7, 30916 Isernhagen, Allemagne, www.russka.de

