

Transofix®

TRANSFERSET MIT KURZEM EINSTECHDORN



ANWENDUNGSHINWEIS



1 Entfernen Sie die Verpackung.



2 Ziehen Sie eine Schutzkappe ab.
ACHTUNG! Berühren Sie nicht den Einstechdorn.



3 Stabilisieren Sie das Behältnis.
Durchstechen Sie mit dem Transofix® den Port vom stehenden Behältnis/Vial.
ACHTUNG! Vermeiden Sie Drehungen und Rotationen.



4 Entfernen Sie die zweite Schutzkappe.
ACHTUNG! Berühren Sie nicht den Einstechdorn.



5 Drücken Sie das zweite Vial kopfüber, mit einer kräftigen Bewegung auf den Transofix®.
ACHTUNG! Vermeiden Sie Drehungen und Rotationen.



6 Transferieren Sie das Arzneimittel resp. die Lösung durch Wendebewegungen in das gewünschte Behältnis.