

Transofix®

SET DE TRANSFERT AVEC PERFORATEUR COURT



MODE D'EMPLOI



1 Sortez le dispositif de l'emballage.



2 Retirez le premier capuchon.
ATTENTION ! Ne touchez pas le perforateur.



3 Stabilisez le récipient. Avec le Transofix®, transpercez le port du récipient/flacon maintenu droit.
ATTENTION ! Évitez les torsions et rotations.



4 Retirez le deuxième capuchon.
ATTENTION ! Ne touchez pas le perforateur.



5 Poussez avec force le deuxième flacon à l'envers sur le Transofix®.
ATTENTION ! Évitez les torsions et rotations.



6 Transférer le médicament ou la solution dans le récipient souhaité en retournant l'ensemble.