

# HENROCUP®



## GEBRAUCHSANLEITUNG

**HENROCUP® UND DECKEL**

**MÄRZ 2023**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Wichtige Information .....</b>	<b>3</b>
<b>Bestimmungsgemäße Nutzung .....</b>	<b>3</b>
<b>Aufbewahrung.....</b>	<b>3</b>
<b>Gebrauchsanleitung.....</b>	<b>4</b>
<b>Vorsichtsmaßnahmen .....</b>	<b>4</b>
<b>Täglicher Gebrauch .....</b>	<b>4</b>
<b>Warnhinweise.....</b>	<b>5</b>
<b>Umweltfreundliche Entsorgung .....</b>	<b>5</b>
<b>Technisches Datenblatt HenroCup® .....</b>	<b>6</b>
<b>Technisches Datenblatt Deckel .....</b>	<b>7</b>

## **Wichtige Information**

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch der HenroCup® diese Anleitung sorgfältig durch.

## **Bestimmungsgemäße Nutzung**

HenroCup® wurde ausschließlich für Getränke und Lebensmittel entwickelt und ist nur für diese bestimmt.

HenroCup® ist ein von dänischen Ergotherapeuten entwickeltes Produkt und bietet Menschen, die unter Kraft- und Koordinationsverlust leiden, eine qualitativ hochwertige Tasse. HenroCup® enthält BPA und sollte nicht von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden.

HenroCup® bietet mit seinen 2 breiten Henkeln einen festen Halt. Dank der Form der Tasse und ihrer Henkel können Sie trinken, ohne den Hals zu krümmen. Der Tassenboden ist breiter, so dass die Tasse stabil auf dem Tisch steht und das Verschütten von Flüssigkeiten minimiert wird.

## **Aufbewahrung**

Bewahren Sie das Produkt trocken, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt auf.

## **Gebrauchsanleitung**

Inhalt: 1 HenroCup® wahlweise mit oder ohne Deckel.

1. Packen Sie die Tasse und den Deckel aus und entsorgen Sie die Verpackung sachgemäß.
2. Spülen Sie die Tasse und den Deckel vor dem Gebrauch.
3. Jetzt ist die HenroCup® einsatzbereit.

## **Vorsichtsmaßnahmen**

Spülen Sie die HenroCup® nach dem Auspacken immer, bevor Sie sie benutzen.

Die Tasse ist für Getränke vorgesehen.

Durch heiße Getränke kann es zu Verfärbungen kommen und die Lebenszeit der Tasse könnte sich verkürzen.

Erhitzen Sie die HenroCup® nicht über einem Kerzenlicht oder Feuer.

Vorsicht bei heißer Flüssigkeit.

Wenn Sie den Deckel verwenden, überprüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob der Deckel richtig sitzt und nicht lose ist.

## **Täglicher Gebrauch**

HenroCup® kann bei bis zu 65° C in der Spülmaschine gespült werden.

Allerdings kann die Tasse matt werden und die Qualität nachlassen, deshalb empfiehlt es sich, sie von Hand zu spülen.

HenroCup® kann Temperaturen zwischen -20° C und 95° C vertragen

## Warnhinweise

Bitte verwenden Sie in der HenroCup® keine Flüssigkeit mit einer Temperatur von über 95° C.



**BITTE BEDENKEN SIE, DASS EINIGE GETRÄNKE DIE INNENSEITE DER TASSE VERFÄRBBEN KÖNNEN.**

Wenn sich die Oberfläche nicht mehr glatt anfühlt und sich milchig-weiß verfärbt, sollten Sie die HenroCup® entsorgen.

## Umweltfreundliche Entsorgung

Bitte entsorgen Sie HenroGrip® auf eine umweltfreundliche und neutrale Weise.



HenroCup® besteht aus Materialien, die recycelt werden sollten. Daher bitten wir Sie, alte HenroCups® über geeignete Entsorgungssysteme zu entsorgen.



**SOLLTEN SIE ZWEIFEL HABEN, WANN SIE IHRE HENROCUP® ENTSORGEN SOLLTEN, KÖNNEN SIE EINE E-MAIL AN HENROTEK@HENROTEK.COM SCHICKEN**

<b>Technisches Datenblatt HenroCup®</b>	
<b>Material</b>	PC (Polycarbonat)
<b>Gewicht</b>	139,2 g
<b>Höhe</b>	9 cm
<b>Breite</b>	15 cm
<b>BPA</b>	HenroCup® enthält BPA und sollte nicht von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden.
<b>Markiert</b>	<b>CE</b>
<b>Farbe</b>	Transparent mit ml, Transparent, Rot, Grün, Blau
<b>Milliliter</b>	230 ml
<b>Spülmaschine</b>	65° Celsius
<b>Mikrowelle</b>	Ja
<b>BASIC UDI-DI No.</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® Transparent mit ml</b>	05704831128777
<b>UDI-DI HENROCUP® Grün</b>	05704831128784
<b>UDI-DI HENROCUP® Rot</b>	05704831238791
<b>UDI-DI HENROCUP® Transparent</b>	05704831128890
<b>UDI-DI HENROCUP® Blau</b>	05704831128999
<b>Normen und Vorschriften</b>	Vorschrift (EU) 1935/2004 of 27 Oktober 2004 Vorschrift (EU) 2023/2006 vom 22. Dezember 2006 Dänischer Erlass, BEK Nr. 681 vom 25. Mai 2020 Vorschrift (EU3652) 10/2011 vom 14. Januar 2011 Vorschrift (EU) 2017/745 vom 5. April 2017

<b>Technisches Datenblatt Deckel</b>	
<b>Material Deckel</b>	LLDPE (Polyethylen)
<b>Gewicht</b>	13 g
<b>Markiert</b>	<b>CE</b>
<b>Spülmaschine</b>	<p>Spülmaschine 65° C</p> <p>Industrie-Spülmaschine 80° C Grad bis zu 3 Minuten</p> <p>Allerdings kann der Deckel matt werden und die Qualität nachlassen, deshalb empfiehlt es sich, ihn mit der Hand zu waschen.</p>
<b>Mikrowelle</b>	Nr.
<b>BASIC UDI-DI No.</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® Deckel klein</b>	5704831000271
<b>UDI-DI HENROCUP® großer Deckel</b>	5704831000011
<b>Normen und Vorschriften</b>	<p>Vorschrift (EU) 1935/2004 of 27 Oktober 2004</p> <p>Vorschrift (EU) 2023/2006 vom 22. Dezember 2006</p> <p>Dänischer Erlass, BEK Nr. 681 vom 25. Mai 2020</p> <p>Vorschrift (EU3652) 10/2011 vom 14. Januar 2011</p> <p>Vorschrift (EU) 2017/745 vom 5. April 2017</p>

