



Praxistipp

Einsatz und Aufbereitung der B. Braun Wipes Tuchspendersysteme

Befüllung



1 Nur vollständig saubere, desinfizierte, trockene und unbeschädigte Tuchspendersysteme befüllen. Hygienische Händedesinfektion durchführen und Schutzhandschuhe sowie ggf. Schutzbrille tragen.




2 Vliesrolle aus der Verpackung nehmen und in das Tuchspendersystem einsetzen. Der Anfang der Tuchrolle (erstes Tuch) ist in der Mitte und muss nach oben zeigen.



3 In kreisenden Bewegungen die Rolle von innen nach außen mit einer ausreichenden Menge an gebrauchsfertiger Desinfektionsmittellösung tränken. Dadurch wird eine gleichmäßige Benetzung der Vliestücher gewährleistet. Die entsprechenden Füllmengen für die Tuchspendersysteme sind den jeweiligen Produktetiketten zu entnehmen. 10 Minuten warten, bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist.¹



4 Das erste Tuch durch die Öffnung des Entnahmesystems führen. Deckel fest andrücken bis er einrastet und das erste Tuch verwerfen. Danach Schutzkappe des Tuchspendersystems verschließen.

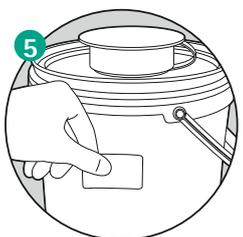

5 Aufkleber vollständig beschriften und gut sichtbar auf das B. Braun Tuchspendersystem kleben. Die Standzeit der getränkten Tücher beträgt bis zu 28 Tagen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Produktinformation.



¹ Informationen zu geprüften B. Braun Desinfektionsmitteln und Mindestkonzentrationen entnehmen Sie bitte den Produktinformationen der jeweiligen B. Braun Wipes.


Aufbereitung und Nachfüllung

Wenn alle Vliestücher aufgebraucht sind oder wenn das Haltbarkeitsdatum der gebrauchsfertigen Lösung erreicht ist, kann das Tuchspendersystem wieder befüllt und verwendet werden. Vor der erneuten Befüllung muss eine Aufbereitung der B. Braun Wipes Tuchspendersysteme durchgeführt werden. Wir empfehlen, wie unten beschrieben, die manuelle desinfizierende Reinigung


anzuwenden. Des Weiteren ist gemäß VAH-Veröffentlichung² eine stichprobenartige Untersuchung von Tuchspendersystemen und dessen Inhalt empfehlenswert, um eine mögliche Kontamination frühzeitig zu erkennen.




Handschuhe sowie ggf. Schutzbrille tragen.

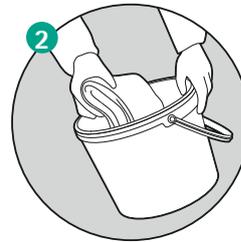

Zur **Reinigung** des Tuchspendersystems sind ggf. restliche Vliestücher und Desinfektionsmittelreste fachgerecht zu entsorgen und alle Oberflächen (Spenderreimer, Deckel einschließlich Entnahmeöffnung) vollständig mit heißem Wasser (55-60°C) auszuspülen, so dass Verschmutzungen und Rückstände gründlich entfernt werden. Alternativ mit einem geeigneten, in alkoholischer Desinfektionsmittellösung getränkten bzw. vorgetränkten Vliestuch auswischen.

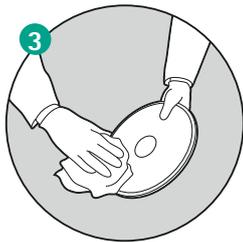

Der Tuchspender muss vor der Desinfektion trocken und visuell sauber sein. Zur **Desinfektion** alle Oberflächen (Tuchspender, Deckel einschließlich Entnahmeöffnung) mit einem geeigneten, in alkoholischer Desinfektionsmittellösung getränkten bzw. vorgetränkten Vliestuch* ausreichend benetzen. Dabei ist die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels zu beachten.

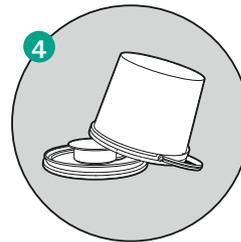

Abschließend alle Teile vor der Wiederverwendung vollständig trocknen lassen. In der Folge kann das Tuchspendersystem, wie unter der Rubrik «Befüllung» beschrieben, erneut verwendet werden.



* Wir empfehlen die Verwendung von z.B. Meliseptol® rapid und/oder Meliseptol® HBV Tissues.



² VAH-Veröffentlichungen Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem für die Flächendesinfektion. HygMed 2012: 37 (11).