

Gebrauchsanweisung WIEGAND[®] FlexLine Wagen

Beachten Sie untenstehende Hinweise:

Funktionsräder

- Mit den roten Fusspedalen stoppen Sie den Pflegewagen.
- Mit den grünen Fusspedalen arretieren Sie die Fahrtrichtung des Pflegewagens.
- Nutzen Sie das grüne Fusspedal um auch schwere Wagen ohne Anstrengung um Kurven zu bewegen.
- Die Räder mit den gelben Punkten sind elektrisch leitfähig. Auf einem leitfähigen, geerdeten Grund leiten sie elektrostatische Ladungen vom Wagen ab.




Schublade

- Stützen Sie sich nicht auf der Schublade ab, ansonsten riskieren Sie eine Beschädigung des Wagens.
- Bewegen Sie den Wagen niemals mit Hilfe der Schublade oder Türen, andernfalls riskieren Sie eine Beschädigung des Wagens. Nutzen Sie stets die dafür vorgesehenen Handgriffe am Wagengestell.
- Machen Sie die Schublade regelmässig vollständig auf und zu für eine einwandfreie Funktion.
- Die Auszüge sind für die Lebensdauer geschmiert. Waschen Sie das Schmiermittel nicht ab und schmieren Sie nicht nach.

Tastaturauszug

- Stützen Sie sich nicht auf dem Tastaturauszug ab, andernfalls riskieren Sie eine Beschädigung des Wagens.
- Nutzen Sie den Tastaturauszug auf keinen Fall zum Bewegen des Wagens.
- Schieben Sie die Tastaturhalterung so weit hinein, bis sie einrastet. Ziehen Sie die Tastaturhalterung so weit heraus, bis sie einrastet.

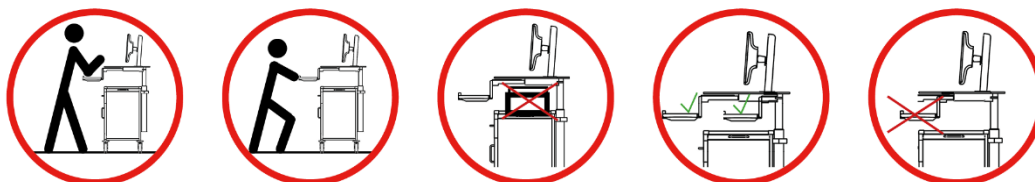

Höhenverstellbare Arbeitsfläche

- Halten Sie die Arbeitsfläche auf beiden Seiten, während Sie den Bedienhebel drücken
- Drücken bzw. ziehen Sie leicht, um die Arbeitsfläche auf die gewünschte Höhe zu bringen
- Entfernen Sie vor dem Herunterlassen der Arbeitsfläche jegliches Material auf der Wagenabdeckung, andernfalls riskieren Sie die Beschädigung des Wagens oder des Materials.

Wagenabdeckungen

- Achtung: Keine heissen (>38°C) Gegenstände auf die Wagenabdeckung stellen!

Schadensfall - Garantie

Die Wiegand AG gewährt auf WIEGAND[®] FlexLine Wagen 5 Jahre Garantie auf Konstruktions- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum. Auf Ersatzteile gewährt die Wiegand AG 24 Monate Garantie. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen WIEGAND[®] FlexLine Wagen von der Wiegand AG direkt oder von einem von der Wiegand AG autorisierten Partner erworben wurde.

Im Falle von Beschädigungen oder Funktionsstörungen ist eine sofortige fachgerechte Reparatur unter Verwendung von Originalteilen und unter Absprache mit der Wiegand AG vorzunehmen, andernfalls erlischt die Garantie. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner oder auf unserer Website.

