


## Pflegehinweise WIEGAND<sup>®</sup> FlexLine Wagen

Sie haben sich für ein äusserst langlebiges und dadurch nachhaltiges Produkt entschieden. Damit Sie möglichst lange davon profitieren können, empfehlen wir Ihnen Ihre Wiegand Wagen regelmässig zu reinigen und zu pflegen. Beachten Sie dabei die untenstehenden Hinweise.

### **WARNUNG:** Eindringen von Reinigungsmitteln in den Wagen

**Reinigen und desinfizieren Sie den Wagen nur im Wischverfahren.** Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Wagen eindringt – auch nicht durch Kapillarwirkung. Der Wagen darf keinesfalls eingesprüht oder stark benetzt werden. Die Flüssigkeiten ziehen in Spalten ein und verursachen dadurch langfristig Schäden, bis hin zu Rostbildung. Besondere Sorgfalt ist geboten bei Wagen mit elektrischen Ausrüstungen.

**Verwenden Sie keine chlorhaltigen Wirkstoffe.** Chloranteile in den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln müssen unbedingt vermieden werden. Freies Chlor und Chloride sind stark korrosiv und führen zu Rost. Insbesondere im Sprühverfahren aufgebrauchte Chlore dringen ins Wagengestell ein und beschädigen dieses.

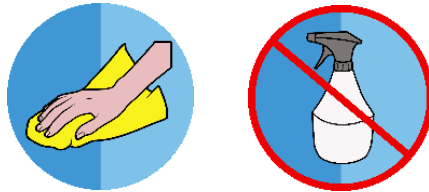

### **Antimikrobielle Oberflächen**

Die Pflege der Wiegand FlexLine Wagen wird durch die antimikrobielle Ausrüstung vieler Oberflächen stark vereinfacht. Diese sind nach JIS Z 2801 und nach ISO 22196 zertifiziert und führen zu einer Keimreduktion von 99.9% innerhalb von 24 Stunden.

Antimikrobiell ausgerüstet sind folgende Oberflächen der WIEGAND<sup>®</sup> FlexLine Wagen:

- Wagengestelle, Schubladen und Zubehör mit pulverbeschichteten Oberflächen
- ABS-TopModule mit dem Logo Sanitized<sup>®</sup> und den Eckstücken
- Alle Verschalungen, Türen und Blenden aus weissen oder farbigen HPL-Platten

### **Reinigung und Desinfektion**

Verwenden Sie zur **Reinigung** nur Wasser mit Spülmittel. Diese sind in der Regel - bei korrekter Anwendung - mit vielen Materialien verträglich. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers. Auf keinen Fall scheuernde Mittel einsetzen. Aceton, Verdünner und andere Lösungsmittel dürfen keinesfalls eingesetzt werden, da eine bleibende Schädigung der Kunststoffoberflächen die Folge wäre.

Verwenden Sie zur **Desinfektion** nur von Wiegand zugelassene Desinfektionsmittel-Wirkstoffe – siehe Tabelle. Auf keinen Fall dürfen Desinfektionsmittel eingesetzt werden, welche aggressive Wirkstoffe enthalten. Diese würden zu Schäden an den Oberflächen führen, bis hin zu Rostbildung. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion nur weiche Tücher. Auf keinen Fall scheuernde Tücher einsetzen, insbesondere keine Scotch-Bride Pads und ähnliche Produkte.

Für die Desinfektion von Wiegand Wagen zugelassene Wirkstoffe und Beispiele entsprechender Handelsartikel. Diese Produkte können im Wischverfahren und unter Beachtung der Herstellerhinweise angewendet werden.

#### Zugelassene Wirkstoffe



- Ethanol
- n-Propanol
- Isopropanol
- Phenole und Phenolderivate
- Quartäre Ammoniumverbindungen (Ohne Chloride)

#### Produktbeispiele

- Actosept® AF Tücher
- Mikrocid AF
- Isopropylalkohol 70%
- Incidin Liquid

**NICHT** für die Desinfektion von Wiegand Wagen zugelassene Wirkstoffe und Beispiele entsprechender Handelsartikel. Diese Produkte dürfen nicht verwendet werden, da sie zu Schäden an den Oberflächen bis hin zu Rostbildung führen würden.

#### **NICHT** zugelassene Wirkstoffe



- Chloride und Chlorite
- Benzalkoniumchlorid
- Natriumhypochlorit
- Wasserstoffperoxid
- Säuren

#### Produktbeispiele

- Kohrsolinlösung® FF
- Hexaqrt® plus
- Desifor-forte AF
- Desderman® pure
- Sterillium® Virugard
- Sanosil® S003
- Meliseptanol rapid

Bei Zweifeln hinsichtlich der Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln oder Reinigungsmitteln mit Teilen des Wagens oder anderen WIEGAND® Produkten kontaktieren Sie den WIEGAND® Kundendienst ([kundendienst@wiegand.ch](mailto:kundendienst@wiegand.ch) oder +41 44 872 74 91).

WIEGAND® übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemässe Reinigung der WIEGAND® Wagen. Ein entsprechender Garantieanspruch erlischt.

