

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Polyurethan-Schaumstoff mit Kleberand



Tegaderm Foam Adhesive ist eine schnell saugende Weichschaumkomresse mit Kleberand für die gezielte Flüssigkeitskontrolle von leicht bis mittel exsudierenden Wunden. Der Tegaderm Foam Adhesive ist mit atmungsaktiver Tegaderm Folie beschichtet.



Eigenschaften

- n äusserst saugfähiger Schaumstoffverband aus Polyurethan, quillt nicht auf, dadurch keine Gewebebelastung
- n rasche und hohe Absorptionsleistung; gutes Exsudatmanagement und minimales Mazerationsrisiko
- n äussere Tegaderm Folie verhindert Wundkontamination von aussen
- n hält das Wundklima feucht
- n Kleberand ermöglicht einfache Fixation
- n patentiertes Speichenapplikationssystem ermöglicht ein leichtes Positionieren von Tegaderm Foam Adhesive
- n ovale, runde Formen: ideal für Knie, Fersen und Ellenbogen

Indikationen

- n ideal für leicht bis mittel exsudierende Wunden
- n kombinierbar mit Tegaderm Alginate, Tegaderm Alginate Ag, Tegaderm Contact, Tegaderm Hydrogel oder Tegaderm Matrix
- n venöse, arterielle, gemischte und diabetische Ulcera
- n Dekubitus
- n Abschürfungen
- n Spalthautentnahmestellen

Kontraindikationen

- n keine bekannt

Anwendung



Die Haut muss trocken und fettfrei sein. Halten Sie den Verband an den klebstofffreien Laschen und entfernen Sie die Trägerfolie.



Positionieren Sie den Verband über der Wunde und modellieren Sie ihn an. Halten Sie den Kleberand gedrückt, um die Klebkraft zu optimieren.



Lösen Sie nun von der Mitte beginnend die Papierspeichen flach in Richtung des äusseren Randes.



Zur Entfernung überdehnen Sie den transparenten Kleberand waagrecht zur Haut. Alternativ kann der Verband auch vorsichtig und flach abgezogen werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaumstoffauflage	Grösse insgesamt	Inhalt / Box	Pharmacode	MiGeL
90610	quadratisch	5.0 x 5.0 cm	8.8 x 8.8 cm	10 Stück	3401691	34.06.01.02.1
90611	oval	6.0 x 7.6 cm	10.0 x 11.0 cm	10 Stück	3401722	34.06.01.04.1
90612	quadratisch	10.0 x 10.0 cm	14.3 x 14.3 cm	10 Stück	3401797	34.06.01.03.1
90613	oval	10.0 x 11.0 cm	14.3 x 15.6 cm	5 Stück	3402012	34.06.01.04.1
90614	oval	3.1 x 3.8 cm	6.9 x 7.6 cm	10 Stück	4486270	34.06.01.01.1
90615	kreuz	2.5 x 2.5 cm	6.9 x 6.9 cm	10 Stück	4486264	34.06.01.01.1
90616	oval	14.0 x 17.1 cm	19.0 x 22.2 cm	5 Stück	3402029	34.06.01.05.1
90619	rund	7.6 x 7.6 cm	14.0 x 14.0 cm	5 Stück	3402035	34.06.01.02.1