

ADAPTIC TOUCH®

Was ist es?

Bei **ADAPTIC TOUCH® nichthaftende Silikonauflage** handelt es sich um eine flexible Silikon-Wundkontaktschicht zur Optimierung des Flüssigkeitsmanagements und der Minimierung von Schmerz beim Verbandwechsel.



Mit weich anliegendem
Silikon-beschichtetem
Zelluloseacetat




zwanzigfache
Vergrößerung

Wie funktioniert es?

Komfort


ADAPTIC TOUCH® hilft, die Wunde zu schützen und Schmerz und Traumata für den Patienten beim Verbandswechsel zu minimieren¹, was die Zufriedenheit sowohl der Patienten als auch der Behandelnden erhöht².

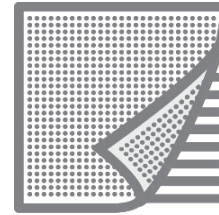

Das weich anliegende Silikon hilft dabei, ein Anhaften der sekundären Wundauflagen an der Wunde zu verhindern^{2,3}.

Leistung

Die Gitterstruktur von **ADAPTIC TOUCH®** erlaubt den freien Durchfluss von Exsudat in die absorbierende sekundäre Wundauflage und senkt gleichzeitig das Risiko von Exsudatstau und -Mazerationen²⁻⁴.

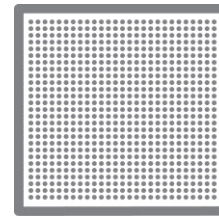

Die kleine Größe der Poren minimiert das Risiko des Einwachsens von Granulationsgewebe⁴.

Erschwinglichkeit

Die Behandlung mit **ADAPTIC TOUCH®** hat sich in der klinischen Praxis als kostengünstig erwiesen⁵.



ADAPTIC TOUCH® ist bis zu 29 % günstiger als Mepitel*.

Wann wird es angewendet?

ADAPTIC TOUCH® ist vorgesehen für die Behandlung trockener bis stark nässender Wunden unterschiedlicher Tiefe, einschließlich:

- Beinulcera (z.B. venös, arteriell, gemischt)
- Druckulcera
- Diabetische Ulcera
- Hautentnahmestellen
- Verbrennungen ersten und zweiten Grades
- Traumatische Wunden (z. B. Hautrisse)
- Chirurgische Wunden

Genauere Anweisungen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage



ADAPTIC TOUCH® ist unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal geeignet für den Einsatz in Kombination mit der Unterdruck-Wundtherapie (NPWT).



ADAPTIC TOUCH® kann bei Patienten mit spröder und empfindlicher Haut angewendet werden².

* Auf der Basis der Arzneimittelliste vom Februar 2014.

Literatur:

1. Ivins, N., und Harding, K. G. Eine Reihe von Fallstudien mit einer nichthaftenden Silikonwundauflage. Poster, EWMA 2011.
2. Internationale Fallreihe: Anwendung von ADAPTIC TOUCH® nichthaftender Silikonauflage: Fallstudien. London: Wounds International, 2013
3. Stephens S. et al. Bewertung einer nichthaftenden Silikonwundkontaktauflage mit optimiertem Design für die Behandlung trockener bis stark nässenden Wunden. Poster, WIC 2011.
4. Brosnan, P. et al. Die Planprinzipien für nichthaftende Materialien. Poster, EWMA 2012.
5. Bianchi, J. Consensus Anleitung für die Anwendung von Adaptic Touch® nichthaftender Wundauflage. Wounds UK 2011.

