

ACCU-CHEK® Instant

Roche

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch



EINFACHER GEHT'S NICHT

Accu-Chek Instant

Das zuverlässige Blutzuckermessgerät für Diabetesbetroffene, die einfach messen möchten. Die Farbskala bietet eine klare Erkennung, ob das Ergebnis hoch, niedrig oder im Zielbereich liegt.



Kompatibel
mit



INTUITIV RICHTIG VERSTEHEN

Accu-Chek Instant vereinfacht die Blutzuckermessung, damit Sie die Blutzuckerwerte auf einen Blick verstehen und interpretieren können und dabei Vertrauen in die Diabetesbehandlung gewinnen.

Die Farbskala ermöglicht visuelle Sicherheit¹ und hilft, hohe und niedrige Blutzuckerwerte richtig zu identifizieren und zu interpretieren¹.



Blau

Der Messwert liegt oberhalb des Zielbereichs

Grün

Der Messwert liegt innerhalb des Zielbereichs

Rot

Der Messwert liegt unterhalb des Zielbereichs

Breite Blutauftragsfläche

Das Blut kann beliebig entlang der gelben Markierung aufgetragen werden. Sogar seitlich.



EINFACHES TESTEN IN 4 SCHRITTEN



Teststreifen einführen

Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie mit dem Messen beginnen. Das Messgerät schaltet sich ein, wenn Sie den Teststreifen in das Gerät einführen.



Blut gewinnen

Wenn das blinkende Tropfensymbol erscheint, verwenden Sie die Stechhilfe zur Blutprobengewinnung.



Blut auftragen

Berühren Sie den gelben Rand des Teststreifens mit dem Blutstropfen. Entfernen Sie Ihren Finger vom Teststreifen, sobald das blinkende Sanduhrsymbol auf dem Display erscheint.



Testergebnis ablesen

Das Testergebnis erscheint in weniger als 4 Sekunden auf dem Display. Der Pfeil zeigt an, ob Ihr Testergebnis innerhalb, über oder unter Ihrem Zielbereich liegt.



Videoanleitung finden Sie online

Auf www.accu-chek.ch finden Sie das Erklärungsvideo zum Accu-Chek Instant Blutzuckermessgerät.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Grosses Display

Grosses beleuchtetes
Display mit sehr
gutem Kontrast

Praktischer Auswurfknopf

Auf Knopfdruck Teststreifen
hygienisch entsorgen



Farbskala

Für schnelle und
einfache Interpretation

Geführter Einschub

Erleichtert das Einführen
des Teststreifens

Haben Sie Fragen zum Produkt?

Bei Fragen zu Accu-Chek Instant unterstützt Sie gerne unser Kundenservice unter der Telefonnummer 0800 803 303 oder via E-Mail info@accu-chek.ch.

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

1 Parkin CG, et al. Use of an integrated tool for interpretation of blood glucose data improves correctness of glycemic risk assessment in individuals with type 1 and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2017, 11(1), 74-82.