

Activon Barrier Cream

Crème protectrice antimicrobienne au miel de Manuka

La crème protectrice antimicrobienne et hydrofuge au miel de Manuka protège la peau contre la transpiration, l'urine, les selles et l'exsudat de plaie. Elle est adaptée à la protection du bord de la plaie et de la peau périlésionnelle et peut également être utilisée en cas d'intertrigo.

Mode d'action

La formule aide à prévenir les lésions cutanées liées à l'humidité. Elle contient du miel de Manuka médical pour apaiser les irritations cutanées ainsi que du beurre de cacao pour favoriser la rétention d'humidité. Elle convient aux peaux sensibles, intactes ou légèrement irritées ou abîmées. Elle aide à prévenir les irritations ou les lésions cutanées causées par l'incontinence, la transpiration, l'exsudat de plaie, les fuites de stomie, les adhésifs et les frottements.



protège la peau



nourrit la peau

Ingrédients

Eau, miel de Manuka, beurre de cacao, huile de ricin, glycérine, stéaroyl lactylate de sodium, alcool cétéarylique, stéarate de glycéryle, xanthane, phényléthanol et éthylhexylglycérine

Indications

Convient aux zones humides et mouillées, aux plis cutanés, en cas d'intertrigo, ainsi que pour la protection du bord de la plaie

Contre-indications

Intolérance aux composants, ne pas appliquer sur des plaies infectées, ouvertes ou profondes

Application

Avant l'application, la peau doit être propre et sèche. Appliquez ensuite une fine couche uniforme de crème sur la zone souhaitée – par exemple à l'endroit où sont placés les poches de stomie, les dispositifs adhésifs ou les pansements. Une quantité équivalente à un pois suffit environ pour une paume de main. L'excédent de crème doit être retiré avec un tissu propre. Une fois la peau complètement sèche, la poche de stomie, le dispositif adhésif ou le pansement peut être appliqué comme d'habitude.



Article	Unité	LiMA	Pharmacode	N° art.
Activon Barrier Cream 100 g	1	-	1147934	ADV-CR4546



Souhaitez-vous des échantillons ou un rendez-vous avec un spécialiste ? Contactez-nous :
info@medicalsol.ch
T +41 56 418 80 80