

AQUACEL[®] Extra[™]

AQUACEL[®] Extra[™] – die moderne Wundauflage mit Hydrofiber[®]-Technologie



Produktgruppierung

Hydrofiber[®] Wundauflage
mit Verstärkungsfasern
Primärverband und Wundfüller

Zusammensetzung

100 % Natriumcarboxymethylcellulose

Indikation

AQUACEL[®] Extra[™] eignet sich für akute und chronische Wunden in allen Wundheilungsphasen; als Primärverband für oberflächliche Wunden sowie als Wundfüller für tiefe Wunden.

Wirkungsweise

- Einzigartiges Wirkprinzip der patentierten Hydrofiber[®]-Technologie
- Optimales Wundmilieu
- Verlässlicher Wundschutz

Mehr zur Hydrofiber[®]-Technologie erfahren sie auf Seite 16

Produktnutzen

Einfach und sicher in der Anwendung

- faltbar
- beidseitig und mehrlagig anwendbar
- Reissfestigkeit und dadurch rückstandsfreies Entfernen aus der Wunde durch Verstärkungsfasern

Vielseitig anwendbar

- für akute und chronische Wunden
- in allen Wundheilungsphasen
- für oberflächliche und tiefe Wunden

Flexibel kombinierbar

- mit allen gängigen Sekundärverbänden

Atraumatisch für Patienten

- schmerzarter Verbandwechsel durch Gelbildung der Wundauflage

Unterstützung der Wundheilung

- durch Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus
- Bakterienreduktion in der Wunde durch Einschluss dieser im Wundverband

AQUACEL® Extra™ bietet zudem folgende Vorteile:

- 39% höhere Aufnahmekapazität^{1,2}
- 9mal reissfester^{1,2}
- weniger Verbandswechsel

1 Verglichen mit der ursprünglichen AQUACEL® Wundauflage

2 Preliminary assessment of the physical properties. Scientific Background Report. WHRI3461 TA214. 2011, Daten liegen vor, ConvaTec Inc.

Handhabung AQUACEL® Extra™

- Um einen adäquaten Wundrandschutz zu erhalten, sollte die AQUACEL® Extra™ Wundauflage mindestens 2 cm über den Wundrand hinaus appliziert werden.
- AQUACEL® Extra™ wird in der Regel trocken auf Wunde und Wundränder appliziert.
- Bei zu trockenen Wunden kann die AQUACEL® Extra™ Wundauflage mit NaCl 0,9 % oder Ringerlösung ausschliesslich über dem Wundbett angefeuchtet werden.

Weitere Informationen zur Anwendung von AQUACEL® Extra™ und zu möglichen Kontraindikationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.



1 AQUACEL® Extra™ für chronische Wunden aller Exsudationsphasen



2 AQUACEL® Extra™ – auch in der Stomaversorgung sicher anzuwenden

Bestellinformationen				D	A	CH	
Handelsform	Packungs-inhalt	Außengröße/ Gewicht	Wundkissen	Art.-Nr./ PZN	Art.-Nr.	Art.-Nr./ REF	Pharma- code
Kompresse	10 Stück	5 x 5 cm		090 788 31	420 671	420 671	505 82 11
	10 Stück	10 x 10 cm		090 788 48	420 672	420 672	505 82 28
	5 Stück	15 x 15 cm		090 788 54	420 673	420 673	505 82 34