

CarboFlex®

Der zuverlässige Geruchsbinder



Produktgruppierung

Geruchsneutralisierender Verband
mit Aktivkohle
Primärverband und Sekundärverband

Zusammensetzung (> Abb. 1)

- Ethylen-Methyl-Acrylat Film (EMA Film) **(A)**
- Absorptionskissen **(B)** (Viskose, Polyethylen, Polypropylen)
- Aktivkohleschicht **(C)**
- Ethylen-Methyl-Acrylat Film (EMA Film) **(D)**
- Hydrofiber®/ Kalzium-Natriumalginat-Gemisch **(E)**

Indikation

Primär- und Sekundärverband für übelriechende Wunden

CarboFlex® eignet sich im Speziellen für:

- exulcerierende Tumore
- Abszesse
- infizierte Wunden

Übelriechende Wunden, bedingt durch verschiedene Ursachen wie Infektionen, Gewebeabbau etc., können für Patienten, deren Angehörige sowie für die Behandelnden eine Belastung bedeuten. Neben der Ursachenbekämpfung, z.B. Débridement und Infektionsbekämpfung, eignet sich CarboFlex®, der Verband mit Aktivkohle, zur Geruchsreduktion.

Wirkungsweise

- Die Wundkontaktschicht aus Hydrofiber® und Kalzium-Natriumalginat-Gemisch absorbiert das Wundexsudat und schafft ein optimales, feuchtes Wundmilieu.
- Der erste EMA-Film leitet durch die Poren den Wasserdampf schnell aus dem Verband nach oben und schützt die Aktivkohle vor Feuchtigkeit.
- Die Aktivkohle bindet unangenehme Gerüche.
- Das Absorptionskissen nimmt die überschüssige Feuchtigkeit auf, damit die darunterliegende Aktivkohle trocken bleibt.
- Der zweite EMA-Film leitet die Feuchtigkeit des Absorptionskissens durch die Poren nach außen ab.


Produktnutzen

- neutralisiert Geruch
- absorbiert viel Wundexsudat
- schafft ein ideales, feuchtes Wundmilieu
- verklebt nicht mit der Wunde

Handhabung

- CarboFlex® nicht zerschneiden.
- CarboFlex® darf nicht mitokklusiven Verbänden abgedeckt werden.
- Zur Fixierung eignen sich ein nichthaftender Schlauchverband, Mullbinden oder Klebestreifen.

Weitere Informationen zur Anwendung von CarboFlex® und zu möglichen Kontraindikationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

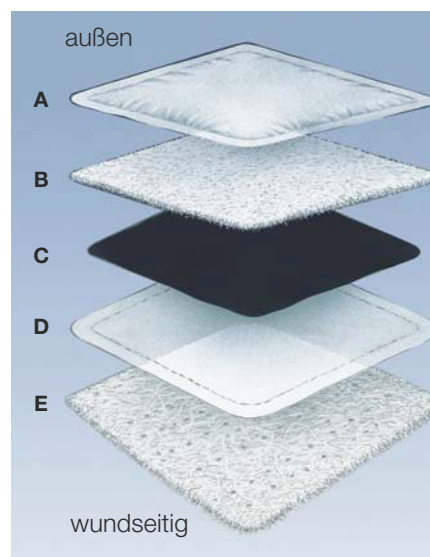

1 Zusammensetzung

Bestellinformationen				D	A	CH	
Handelsform	Packungs- inhalt	Außengröße/ Gewicht	Wundkissen	Art.-Nr./ PZN	Art.-Nr.	Art.-Nr. REF	Pharma- code
	10 Stück	10 x 10 cm		085 911 53	403 202	403 202	195 64 04
oval	5 Stück	8 x 15 cm		085 911 76	403 203	403 203	195 64 10
	5 Stück	15 x 20 cm		085 911 82	403 204	403 204	195 64 27