

3M™ Cavilon™ NSBF

Hautschutzfilm

Cavilon Hautschutzfilm ist ein lang anhaltender, transparenter und wasserdichter Hautschutz, der nach der Applikation eine hauchdünne Trennschicht zwischen Haut und allfälligen Körperflüssigkeiten bildet. Es gibt ihn als Lolly oder in Sprayform.



Eigenschaften

- n atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- n nicht zytotoxisch, beeinträchtigt die Wundheilung nicht
- n Schutz vor Stuhlgang, Urin und anderen Körperflüssigkeiten
- n Schutz vor Hautschäden, die durch tägliches Entfernen von Pflastern und klebenden Produkten verursacht werden
- n alkoholfrei, kann auch auf beschädigter Haut schmerzfrei angewendet werden
- n beeinträchtigt nicht die Absorptionsleistung von Windeln oder absorbierenden Verbänden
- n sterile Verpackung für Lollys
- n schützt zuverlässig bis zu 72 Stunden

Indikationen

- n bei Inkontinenz
- n bei Windeldermatitis
- n als Wundrandschutz
- n als Prophylaxe gegen gereizte Haut, verursacht durch Kleber, Verbände oder Stomaplatten
- n zur Therapie von Wundrandmazerationen
- n zur Stomapflege

Kontraindikationen

- n manifeste bakterielle oder mykotische Infektsituationen
- n bei Kindern unter 1 Monat
- n kein Schutz vor Allergien

Anwendung



- Reinigen und trocknen Sie die Haut.
- Tragen Sie Cavilon Hautschutzfilm gleichmässig und einschichtig auf. Lassen Sie den Film 30-60 Sekunden trocknen.
- Erneuern Sie Cavilon Hautschutzfilm alle 2-3 Tage bzw. bei jedem Verbandwechsel.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig Cremes oder ähnliche Substanzen – diese lösen den Schutzfilm auf.
- Cavilon Hautschutzfilm eignet sich auch hervorragend unter klebenden Verbänden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt / Box	Pharmacode
3343	Lolly	1 ml	25 Stück	1937186
3343P	Lolly	1 ml	5 Stück	2962803
3345	Lolly	3 ml	25 Stück	4132715
3346	Spray	28 ml	12 Stück	4132738
3346P	Spray	28 ml	1 Stück	3033413