

## Die Kontrolle behalten von Beginn an....

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


- Wird von den Patienten einem Urinbeutel vorgezogen
- Der frühzeitige Gebrauch erhält den Tonus der Blase
- Die Freiheit und die Möglichkeit zu wählen bleiben erhalten
- Unauffällig unter den meisten Kleidungsstücken
- Patienten können die Blase entleeren, wenn es passend ist
- Vielseitig - kann an Nachtdrainagebeutel angeschlossen werden
- Vermindert den Zeitaufwand für die Pflege

## Die Kontrolle behalten von Beginn an....



Diese Information haben Sie erhalten von:



Bard, Advancing the Delivery of Health Care Worldwide and Flip-Flo sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc., oder eines Tochterunternehmens. Copyright © 2009, C. R. Bard GmbH. All Rights Reserved. B801111 (01/2009)

**BARD**

C. R. Bard GmbH  
Wachhausstraße 6  
D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124  
FAX: +49 721 9445-100

BARD MEDICA S.A.  
Seestraße 64  
CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60  
FAX: +41 44 722 53 70

[www.bard.de](http://www.bard.de)

BARD MEDICA S.A.  
Thaliastraße 125a/1/5  
A-1160 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130  
FAX: +43 1 49 49 130-30



## DIE KONTROLLE BEHALTEN ...



## ... VON BEGINN AN

| Beschreibung                | VE       | Bestell-Nr. |
|-----------------------------|----------|-------------|
| FLIP-FLO™<br>Katheterventil | 5 Stück  | BFF5        |
| FLIP-FLO™<br>Katheterventil | 20 Stück | BFF20       |

**BARD**

ADVANCING THE DELIVERY OF HEALTH CARE WORLDWIDE®

# Die Anwendung des FLIP-FLO™ Katheterventils

**Achtung:** Dieses Produkt ist nur nach vorheriger Blasenuntersuchung durch entsprechendes medizinisches Fachpersonal zu verwenden.



## Anwendungsgebiete

- Zur Verwendung mit einem Verweilkatheter/Dauerkatheter


## Gegenanzeigen

- Verminderte Blasenkapazität
- Beeinträchtigung der Wahrnehmungsfähigkeit
- Mangelndes Empfinden der Blase
- Unzureichende manuelle Geschicklichkeit, um das FLIP-FLO™ Ventil zu bedienen




## Die Verbindung des Ventils mit Ihrem Katheter

- Hände waschen
- Verbinden Sie das FLIP-FLO™ Ventil mit dem Katheter. Achten Sie darauf, dass Sie dabei weder das Katheterende noch den Verbindungsstecker des Ventils berühren.

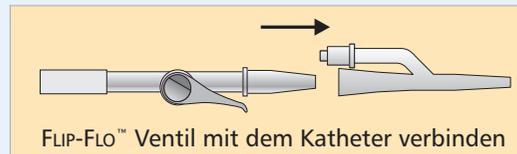


## Betätigen des Ventils

- Hände vor und nach Betätigen des Ventils sorgfältig waschen
- Blase so oft wie vom Arzt oder der Krankenschwester angegeben entleeren
- Drücken Sie zum **Öffnen** des Ventils den Hebel nach **unten**

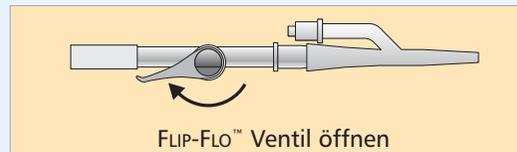

- Urin in eine Toilette oder ein geeignetes Gefäß entleeren
- Drücken Sie zum **Schließen** des Ventils den Hebel nach **oben**

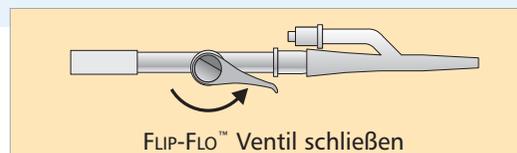

## Kontinuierliche Drainage in der Nacht

- Für die kontinuierliche Drainage über Nacht kann man einen Nachtdrainagebeutel über einen flexiblen Verbindungsschlauch befestigen.
- **Achtung:** Lassen Sie in diesem Fall das Ventil offen!
- Wir empfehlen den Austausch des FLIP-FLO™ Ventils alle 5-7 Tage. Nehmen Sie einfach das Ventil vom Katheter ab und entsorgen Sie es. Bringen Sie das neue Ventil gemäß den obigen Anweisungen an.

