

KALTOSTAT®

Der Verband für die leicht blutende Wunde



Produktgruppierung

Alginate
Primärverband und Wundfüller

Zusammensetzung

Kalzium-Natriumalginat aus
der Braunalge
Laminaria hyperborea

Indikation

Primärverband und Wundfüller für leicht blutende,
oberflächliche und tiefe Wunden

KALTOSTAT® eignet sich im Speziellen für:

- Spalthautentnahmestellen
- Wunden nach chirurgischem Débridement
- Risswunden
- Abschürfungen
- Nasenbluten
- Zahnextraktionen

Als Sekundärverband eignen sich AQUACEL® Foam ,
Versiva® XC®, VARIHESIVE® Signal, VARIHESIVE® E,
VARIHESIVE® E Border, VARIHESIVE® Extra dünn,
CombiDERM® oder CombiDERM®-N.

Wirkungsweise

- In Kontakt mit Wundexsudat quellen die trockenen Fasern auf.
- Durch die Aufnahme von Natriumionen aus dem Wundexsudat werden Kalziumionen aus dem Verband an die Wunde abgegeben.
- Die Kalziumionen lösen die Gerinnungskaskade aus und unterstützen die Blutstillung in der Wunde.


Produktnutzen

- Durch den hohen Kalziumanteil wirkt KALTOSTAT® hämostatisch und eignet sich besonders zur Versorgung von leicht blutenden Wunden.
- Der hohe Anteil an Gularonsäure gewährleistet die Formstabilität von KALTOSTAT®.

Handhabung

- Nicht über den Wundrand applizieren, da kein Mazerationsschutz besteht.
- Tiefe Wunden locker mit der Tamponade auffüllen.
- Blutende Wunden erfordern eine engmaschige Kontrolle durch den Arzt.
- KALTOSTAT® eignet sich nicht für stark blutende Wunden.
- In Notfällen, in denen starker Blutverlust droht, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden.

Weitere Informationen zur Anwendung von KALTOSTAT® und zu möglichen Kontraindikationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

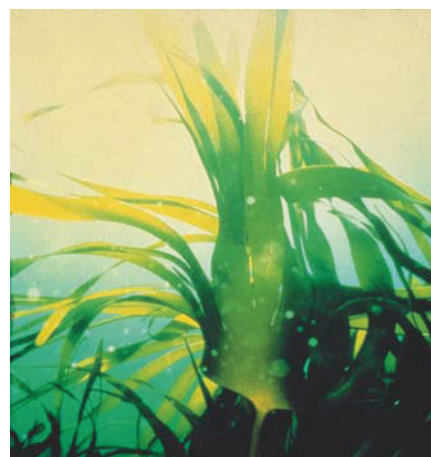

1_ Braunalge Laminaria hyperborea

Bestellinformationen				D	A	CH	
Handelsform	Packungs- inhalt	Außengröße/ Gewicht	Wundkissen	Art.-Nr./ PZN	Art.-Nr.	Art.-Nr. REF	Pharma- code
Komresse	10 Stück	5 x 5 cm		069 653 65	696 53 65	168 210	168 92 68
	10 Stück	7,5 x 12 cm		069 653 13	696 53 13	168 212	168 92 51
	10 Stück	10 x 20 cm		069 653 36	696 53 36	168 214	168 92 45
	10 Stück	15 x 25 cm		075 113 18	751 13 18	168 215	168 92 39
Tamponade	5 Stück	30 x 60 cm		075 113 24	751 13 24	168 219	168 92 22
	5 Stück	2 g		069 653 59	696 53 59	168 117	168 91 91