



Kohrsolin[®] FF Tissues

Aldehydhaltige Schnelldesinfektion mit breitem Wirkungsspektrum und umfassender Materialverträglichkeit

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- wirksam gegen murine Noroviren (MNV)
- hervorragende Benetzung und Reinigung
- rückstandsarm
- hochwertige, weiche und flauschige Tuchqualität (Tuchgrösse 180x200 mm)

Wirkstoffe

Die 1%ige Tränkflüssigkeit Kohrsolin[®] FF enthält die Wirkstoffe:

Glutaral 0,5 mg/g; Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchlorid 0,3 mg/g;

Didecyldimethylammoniumchlorid 0,3 mg/g.

Wirkungsspektrum

Bakterizid (einschliesslich Salmonellen, Listerien, MRSA, ORSA, ESBL, EHEC), levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, MNV (Norovirus), Adeno-, Rota- und Polyomavirus.

Anwendungsgebiete

Die Kohrsolin[®] FF Tissues eignen sich zur desinfizierenden Reinigung abwaschbarer Oberflächen im Wischverfahren, z.B.:

- bei medizinischen Geräten und Inventar, die unter das Medizinproduktegesetz fallen. Nicht geeignet für invasive Medizinprodukte.
- bei Flächen in Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Alters- und Pflegeheimen und in der Industrie.

Kontakte zwischen aldehydischen und aminischen Produkten sind zu vermeiden. Deshalb ist – insbesondere, wenn vorher mit einem aminischen Produkt gearbeitet wurde – vor erstmaliger Anwendung von Kohrsolin[®] FF Tissues eine Zwischenreinigung durchzuführen.

Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Anwendung

Oberflächen mit dem Kohrsolin[®] FF Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen (z.B. bei direktem Hautkontakt mit der Fläche). Nach Gebrauch Tissues der Abfallentsorgung zuführen. Das Tragen von geeigneten Handschuhen wird empfohlen. Nicht zur Hautreinigung verwenden. Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschliessen. Die Tissues sind nach Anbruch 3 Monate verwendbar.

Dosierung

Kohrsolin[®] FF Tissues sind gebrauchsfertig. Nach Anbruch 3 Monate haltbar.

Kohrsolin® FF Tissues

Bakterien und Pilze		
VAH Zertifizierte Anwendungsempfehlung zur prophylaktischen Wischdesinfektion vom Verbund für Angewandte Hygiene (VAH). Basierend auf Suspensions- und praxisnahen Versuchen, getestet unter geringer (entspr. optisch sauberen Flächen)/hoher Belastung (entspr. sichtbar kontaminierten Flächen)	Bakterizidie/Levurozidie - geringe Belastung - hohe Belastung	15 Min. 30 Min.
EN Phase 2/Stufe 1 Wirksam nach EN Phase 2/Stufe 1 (Suspensionsversuche), getestet unter geringer/hoher Belastung	Bakterizidie (EN 13727) - geringe Belastung	15 Min.
	Levurozidie (EN 13624) - geringe Belastung - hohe Belastung	5 Min. 5 Min.
Viren		
Wirksam gegen Viren (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten [DVV])	Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	5 Min.
Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (DVV)	Adenovirus	15 Min.
	Polyomavirus	15 Min.
Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (in Anlehnung an DVV)	Rotavirus	5 Min.
Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (in Anlehnung an EN)	MNV (Norovirus) - geringe Belastung - hohe Belastung	15 Min. 30 Min.
	EN Phase 2/Stufe 1 (Suspensionsversuche), getestet unter Belastungen	Adenovirus (EN 14476) - geringe Belastung - hohe Belastung
Begrenzt viruzid PLUS (EN 14476) - geringe Belastung - hohe Belastung		15 Min. 30 Min.

Packung

Kohrsolin® FF Tissues
Flowpack à 80 Tücher

REF

981201

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

