

Meliseptol® New Formula

Gezielte Sprüh- und Wischdesinfektion



Desinfektion

Meliseptol® New Formula ... Gutes besser gemacht

Auf einen Blick

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel
- Besonders geeignet für glänzende metallische Oberflächen
- Einwirkzeit: 1 Minute
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid, gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV, Vacciniaviren)¹, Rota-, Adeno- und Noroviren
- Angenehmer Zitrus-Duft
- Ohne mikrobizide Zusätze (wie z.B. Aldehyde, QAV)
- DGHM⁻²/VAH⁻³ gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste⁴

Hinweis zur Anwendung

Meliseptol® New Formula auf ein Einmaltuch giessen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mittels der Sprühflasche einsprühen und mit einem Tuch verreiben – 1 Minute wirken lassen. Die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. Werden elektrische Geräte desinfiziert, diese vorher ausschalten (Netzstecker ziehen) und abkühlen lassen. Ist dies nicht möglich, ist sicherzustellen, dass

Wirkspektrum

Wirkspektrum	Einwirkzeit
Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH	1 Min.
Bakterizid / Levurozid	
Mykobakterizid	1 Min.
Tuberkulozid	
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV, Vacciniaviren, BVDV ⁵)	30 Sek.
Rotavirus	30 Sek.
Adenovirus	30 Sek.
Norovirus (MNV ⁶)	30 Sek.

während der Desinfektion keine Schaltvorgänge ablaufen. Alkoholempfindliche Materialien (z.B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit prüfen.

Desinfektionsmittel sorgfältig verwenden. Vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.

Auf Ethanol-Basis

Artikel	Art.-Nr.	Pharmacode
Meliseptol® New Formula Flasche 250 ml	19762	6444749
Meliseptol® New Formula Sprühflasche 250 ml	19763	6380908
Meliseptol® New Formula Flasche 1000 ml	19761	6444755
Meliseptol® New Formula Sprühflasche 1000 ml	19764	6380914
Meliseptol® New Formula Kanister 5 l	19758	6380877



Meliseptol® New Formula

100 g Lösung enthalten: Ethanol 44.0 g

Angaben gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5% amphotere Tenside, Parfum.

Angaben gemäss Gefahrstoffverordnung: Entzündlich. Nicht in offene Flamme sprühen! Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Berufsgenossenschaft schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Schutzhandschuhen vor.

31 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Ausbringung max. 50 ml/m².

1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

2) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

3) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene

4) www.iho-viruzidie-liste.de

5) BVDV = Bovines Virusdiarrhoe-Virus

6) MNV = Murines Norovirus

Meliseptol® New Formula

Gutes besser gemacht



Desinfektion



- Exzellente Reinigungsleistung, auch auf glänzenden Metalloberflächen
- Einwirkzeit: 1 Minute
- Angenehmer Zitrus-Duft
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid, gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV, Vacciniaviren), Rota-, Adeno- und Noroviren
- Ohne mikrobizide Zusätze (wie z.B. Aldehyde, QAV)



effizient



schnell



ökologisch