

Meliseptol® Wipes sensitive

Desinfektionstücher für empfindliche Materialien



- breites Wirkspektrum
- nur 1 Minute Einwirkzeit
- optimale Materialverträglichkeit

Meliseptol® Wipes sensitive

hohe Wirksamkeit, schnell, sanft und sicher



hohe Wirksamkeit, schnelle Einwirkzeit

Wirkspektrum	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (<i>C. albicans</i>), behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV, Vacciniaviren) und Rotaviren	1 Min.
Mykobakterien (Tuberkulose-Bakterien, <i>M. Terraе</i>)	3 Min.
Polyomaviren	5 Min.
Aviäre Influenza A-Viren	15 Sek.
Noro-Viren (MNV*)	5 Min.

* MNV = Murines Noro-Virus Gutachen auf Anfrage erhältlich

Optimale Materialverträglichkeit:

- geeignet für alle Ultraschallgeräte und -köpfe (z.B. Philips, Hitachi, ALOKA)
- Acrylglas
- Untersuchungsliegen und -stühle (z.B. Schmitz)
- Bleischürzen
- Latex, Gummi, Silikon, Makrolon
- Karten-Terminals
- Dialog- und Hämodialysemaschinen
- Perfusor® Space, Infusomat® Space



sanft zu den Materialien, sicher in der Anwendung

Eigenschaften	Ihr Nutzen
Tränklösung Meliseptol® Foam pure greift selbst hochempfindliche Materialien nicht an	Werterhalt von hochwertigen Medizinprodukten, auch für alkoholempfindliche Oberflächen geeignet
optimale Menge der Tränklösung	vermeidet das Eindringen von Flüssigkeiten in die Geräte
weiche Vliestuchqualität	schützt hochempfindliche Oberflächen sicher vor Verkratzungen
es liegen zahlreiche Freigaben für Sonographie-Geräte und Ultraschallköpfe vor	hohe Sicherheit für Ihre Geräte*

Hinweis zur Anwendung:

- Flächen mit Meliseptol® Wipes sensitive so wischen, dass sie vollständig mit der Wirkstofflösung benetzt sind (Einwirkzeit siehe Tabelle)
- Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden
- nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden!
- auffüllen der Spenderbox: Folienbeutel aufschneiden und in die Spenderbox setzen. Erstes Tuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen und in die Entnahmeöffnung des Deckels einfädeln. Deckel auf die Spenderbox aufschrauben

* Gutachten zur Materialverträglichkeit mit der Tränklösung Meliseptol® Foam pure finden Sie auf unserer Homepage unter www.bbraun.ch.

Meliseptol® Wipes sensitive

Desinfektionstücher für empfindliche Materialien



Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
Meliseptol® Wipes sensitive Tuchgrösse: 15.2 x 20 cm			
Spenderbox mit 60 Tüchern	1	19582	4922073
Nachfüllpackung mit 60 Tüchern	1	19530	5030017



Zusammensetzung:

60 Tücher sind mit 300 g Lösung Meliseptol® Foam pure getränkt
100 g Lösung enthalten: 17 g Propan-1-ol, 0.23 g Didecyldimethylammonium chloride
Excipients: < 5 % non-ionic surfactants, purified water

Sichern Sie sich mit Meliseptol® Wipes sensitive langfristig den Werterhalt und die Optik Ihrer hochwertigen Medizinprodukte