

Mepilex® Border Ag

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

DER WIRKSAME ANTIMIKROBIELLE ABSORBIERENDE ALL-IN-ONE-SCHAUMVERBAND


- Minimiert Schmerz und Verletzungsgefahr beim Verbandwechsel^{1,2,3}
- Schnelle und nachhaltige antimikrobielle Wirkung⁵
- Effektives Exsudatmanagement
- Sichere Fixierung und doch atraumatische Entfernung

Polyurethanfilm

- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Schützt vor Viren und Bakterien*

Safetac® -Beschichtung

- Reduziert Schmerz und Trauma vor, während und nach dem Verbandwechsel¹
- Verklebt nicht mit dem feuchten Wundgrund, sondern haftet nur auf trockener Haut³
- Versiegelt die Wundränder und minimiert das Mazerationsrisiko⁴

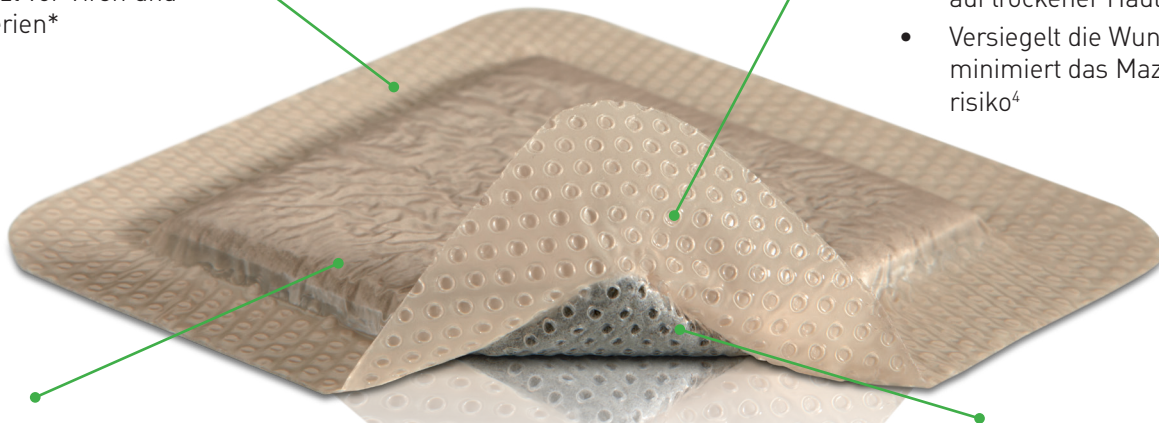

Mehrschichtiges absorbierendes Schaumpad

- Der komprimierte Schaum mit Silber absorbiert und verteilt das Exsudat und lässt gleichzeitig die Freisetzung von Silber zu
- Faserschicht für eine maximale Retention

Safetac®
TECHNOLOGY

Schnelle nachhaltige Freisetzung von Silberionen

- Antimikrobielle Wirkung innerhalb von 30 Minuten und bis zu 7 Tage lang⁵
- Silbersulfat 1,2 mg/cm²


* Mikroben grösser als 25 nm

Safetac® technology


Safetac® technology. Less pain and less trauma.

Safetac ist eine patentierte, sanfte Silikon-Haftechnologie. Verbände mit Safetac/Safetac®-Technologie sind sowohl atraumatisch während des Tragens als auch beim Entfernen. Dies bedeutet weniger Schmerz für den Patienten. Ausserdem verhindern Verbände mit Safetac®-Technologie Mazerationen, da die Wundränder versiegelt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.safetac.com

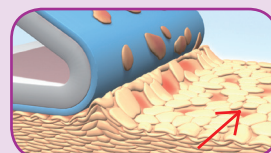


Schmerzhaftes Entfernen von Epidermiszellen mit herkömmlichen Kleber

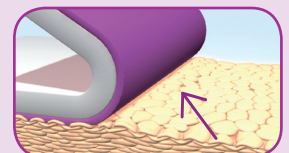


Kein Entfernen von Epidermiszellen mit der Safetac-Technologie

Anwendungshinweise Mepilex® Border Ag

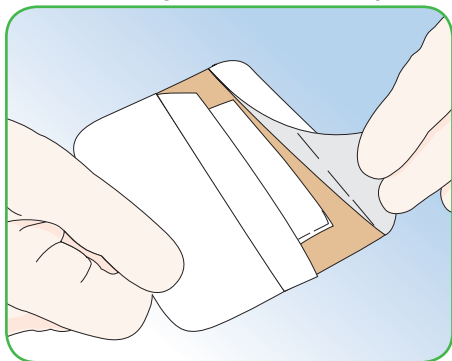

Den Wundbereich reinigen.
Die Schutzfolie abziehen.

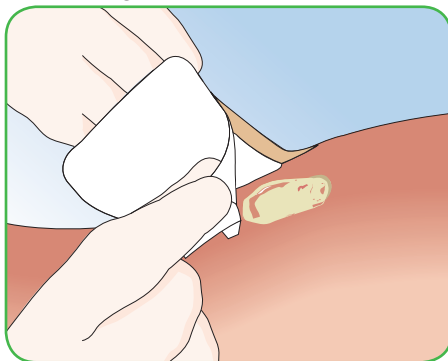

Die Haftseite auf die Wunde legen.
Nicht dehnen.


Die Wirkungsweise von Mepilex® Border Ag

Mepilex Border Ag ist ein antimikrobieller All-in-one-Schaumverband, der wirksam Exsudat absorbiert und zurückhält und dabei ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält. Die Safetac-Schicht versiegelt die äusseren Wundränder und verhindert so, dass Exsudat ausläuft und eine Mazeration der wundumgebenden Haut verursacht. Die Safetac-Schicht gewährleistet, dass der Verband gewechselt werden kann, ohne dabei die Wunde oder die wundumgebende Haut zu verletzen oder den Patienten zusätzlichen Schmerzen auszusetzen.

Mepilex Border Ag inaktiviert wundpathogene Mikroorganismen innerhalb von 30 Minuten mit einer nachhaltigen Wirkung von bis zu 7 Tagen. Durch Reduzierung der Anzahl von Mikroorganismen kann Mepilex Border Ag auch den Geruch eindämmen.

Die Vorteile von Mepilex® Border Ag

- Ermöglicht einen nahezu schmerz- und verletzungsfreien Verbandwechsel
- Haftet von allein – keine sekundäre Abdeckung erforderlich
- Duschfest
- Kann unter Kompressionsbandagen getragen werden
- Fördert den Patientenkomfort beim Tragen
- Kann je nach Zustand der Wunde bis 7 Tage belassen bleiben
- Geringes Risiko einer Hautreizung oder Allergie

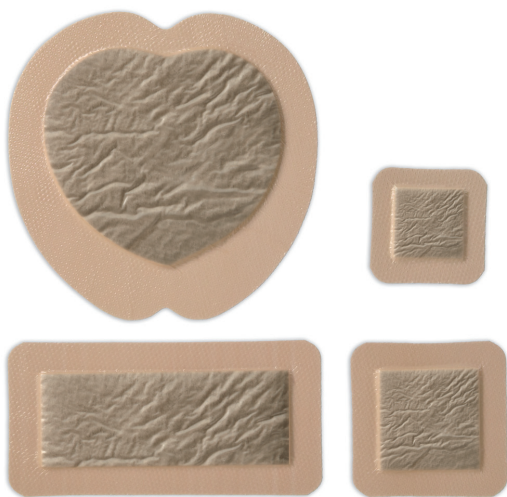

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Bein- und Fussgeschwüre
- Druckgeschwüre
- Tumor-Wunden
- Verbrennungen 2. Grades
- Traumatische und chirurgische Wunden
- Feuchte Wunden, Exsudatmanagement, bei der vorsichtige Fixierung und antimikrobielle Massnahmen angezeigt sind

Vorsichtsmassnahmen

- Nicht bei Patienten einsetzen, die eine bekannte Empfindlichkeit für Silber aufweisen
- Mepilex Border Ag nicht während einer Strahlenbehandlung oder -untersuchung, z. B. Röntgen, Ultraschall oder Magnetresonanztomographie, verwenden
- Mepilex Border Ag nicht zusammen mit Oxidationsmitteln wie Hypochloritlösungen sowie Hydrogenperoxid verwenden



MEPILEX® BORDER AG SORTIMENT (steril verpackt)

Art. Nr.	Grösse cm	Pharma-Code	Stück Packung	Stück Karton
395200	7,5 x 7,5	4677277	5	70
395300	10 x 10	4677283	5	50
395400	15 x 15	4677231	5	50
Mepilex Border Sacrum				
382000	18 x 18	4677225	5	35