

Mepilex® Ag


Antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Polyurethanfilm

- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Viren- und bakterienundurchlässig (Mikroben > 25nm)

Polyurethanschaum

- Absorbiert Exsudat
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Passt sich den Körperkonturen an

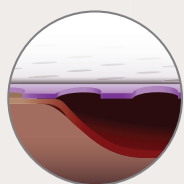

Safetac®- Beschichtung

Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut ^{1,2,5,6}

Die Safetac Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde ^{6,7}

Antimikrobieller Effekt

- Bereits nach 30 Minuten und bis zu 7 Tage lang³



Mepilex Ag muss bei Kompression nicht auf die Größe der Wunde zugeschnitten werden


- Haftet sanft und sicher und bietet optimalen Patientenkomfort⁴
- Verträgliche und verschreibungsfreie Silbersubstanz
- Schnelle (innerhalb 30 Minuten) und lang anhaltende antimikrobielle Wirkung (bis zu 7 Tagen)³

Mepilex® Ag




Mölnlycke®


Anwendungshinweise

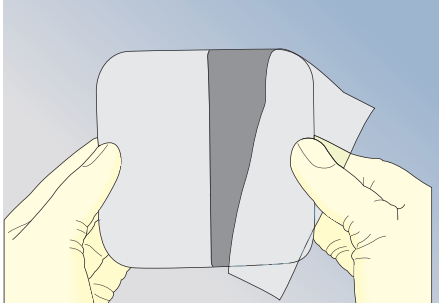

Reinigen Sie die Wunde und trocknen Sie die wundumgebende Haut. Entfernen Sie die Schutzfolie.

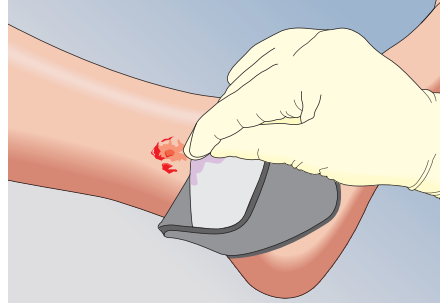

Mepilex Ag sollte die Wunde mindestens zwei Zentimeter überlappen. Mit der haftenden Seite auf die Wunde applizieren. Verband nicht dehnen!

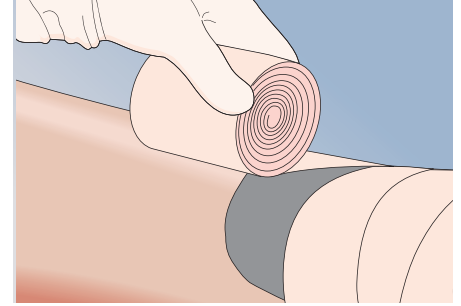

Falls notwendig, fixieren Sie den Verband zusätzlich, z.B. Tubifast.

So funktioniert Mepilex® Ag

Mepilex Ag ist ein antimikrobieller Schaumverband, der Wundexsudat effektiv absorbiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält. Innerhalb von 30 Minuten neutralisiert Mepilex Ag pathogene Keime, wobei die Wirkung bis zu 7 Tage lang anhält. Durch die Verringerung der Mikroorganismen reduziert Mepilex Ag auch die Geruchsbildung.

Vorteile von Mepilex® Ag

- Minimiert Schmerz und Trauma während des Verbandwechsels
- Sichere, verträgliche und verschreibungsfreie Silbersubstanz
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Kann je nach Zustand der Wunde und Exsudatmenge mehrere Tage auf der Wunde belassen werden

Bestellinformationen

Home Care

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
28 70 50	10 x 10 cm	09 06 26 81	10
28 72 10	10 x 20 cm	02 22 72 39	5
28 73 10	15 x 15 cm	02 22 72 74	5
28 74 10	20 x 20 cm	02 23 09 68	5
28 75 10	20 x 50 cm	01 23 54 61	2

Mepilex Heel Ag

38 81 00	13 x 20 cm	06 57 49 20	5
38 83 00	15 x 22 cm	06 57 49 43	5

Steril – einzeln verpackt

Anwendungsgebiete

Mepilex Ag ist für die Versorgung leicht bis mittelstark infizierte oder Wunden mit Infektionsrisiko geeignet, wie z.B. Bein- und Fußgeschwüre, Druckgeschwüre und partielle Verbrennungen. Mepilex Ag kann auch unter Kompressionsverbänden verwendet werden.

Wichtige Hinweise!

- Mepilex Ag darf nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Silber eingesetzt werden.
- Mepilex Ag darf nicht während Strahlentherapien oder Bildgebungsverfahren wie z.B. Röntgen, Ultraschall, MR oder Diathermie verwendet werden.
- Mepilex Ag darf nicht zusammen mit Oxidationsmitteln wie Hypochloridlösung oder Wasserstoffperoxyd verwendet werden.

Klinik

Art.-Nr.	Größe	Stück/Packung
28 71 10	10 x 10 cm	5
28 72 10	10 x 20 cm	5
28 73 10	15 x 15 cm	5
28 74 10	20 x 20 cm	5
28 75 10	20 x 50 cm	2

Mepilex Heel Ag

38 81 00	13 x 20 cm	5
38 83 00	15 x 22 cm	5

Steril – einzeln verpackt

REFERENZEN: 1. Gee Kee, E.L., Kimble, R.M., Cuttle, L., Khan, A., Stockton, K.A. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns 2015, <http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2014.11.005> [Epub ahead of print]. 2. Silverstein, P., Heimbach, D., Meites, H., Latenser, B., Mazingo, D., Mullins, F., Garner, W., Turkowski, J., Shupp, J., Glat, P., Purdue, G. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam dressing (intervention) vs silver sulfadiazine cream. Journal of Burn Care and Research 2011;32(6):617-626. 3. Chadwick, P., Taherinejad, F., Hamberg, K., Waring, M. Clinical and scientific data on a silver-containing soft-silicone foam dressing: an overview. Journal of Wound Care 2009; 18(11):483-491.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und das Produkt Mepilex® Ag sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0054

