


Mepilex®

Schaumverband

Polyurethanfolie

- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Viren- und bakteriendicht

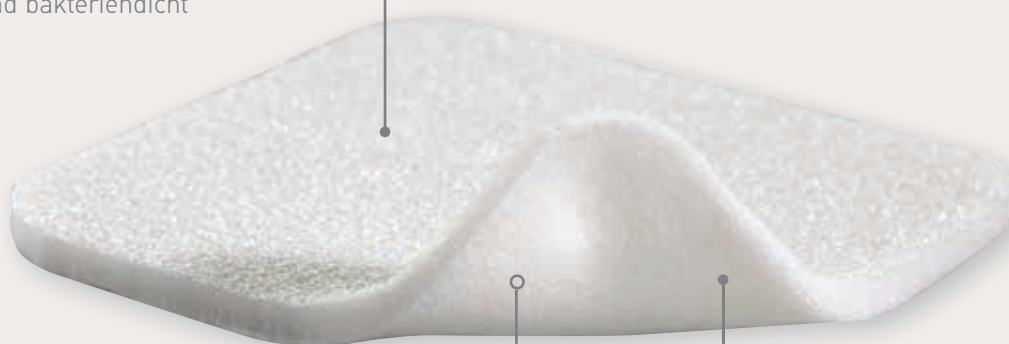

Safetac®- Beschichtung

Polyurethanschaum

- Absorbiert zuverlässig Exsudat
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Passt sich den Körperkonturen an

Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut ^{1,5,6}

Die Safetac® Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde ^{1,5,6}




- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel ^{1,2}
- Haftet sanft und sicher auf der Wundumgebung
- Hoher Tragekomfort durch optimale Anpassung, auch an schwierigen Körperstellen

Mepilex®



Mölnlycke®

Anwendungshinweise

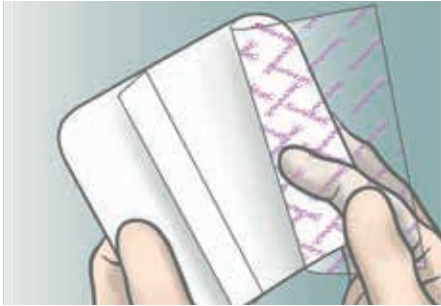

Reinigen Sie die Wunde und trocknen Sie die wundumgebende Haut. Entfernen Sie die Schutzfolie.



Mepilex®, mit der haftenden Seite, mindestens 2 cm über die Wunde, auf die Wundumgebung ohne zu dehnen, applizieren.



Den Verband, individuell, je nach Lokalisation, fixieren, z.B. mit Tubifast.

So funktioniert Mepilex®

Mepilex® absorbiert Wundexsudat effektiv und minimiert durch die Wundrandversiegelung das Mazerationsrisiko. Der Verband erhält ein feuchtes Wundmilieu und unterstützt so den Heilungsprozess. Durch die Safetac®-Eigenschaften verläuft der Verbandwechsel für den Patienten atraumatisch und ohne zusätzliche Schmerzen.

Vorteile von Mepilex®

- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel
- Kann je nach Zustand der Wunde und Exsudatmenge bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben
- Erhält ein feuchtes Wundmilieu
- Reduziert das Mazerationsrisiko
- Kombinierbar mit Salben, Gelen, Wundfüllern
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Kann je nach Bedarf, ein-/zugeschnitten werden

Anwendungsgebiete

Mepilex® ist für eine Vielzahl an leicht bis mittelstark exsudierender, oberflächlichen, akuten wie chronischen Wunden geeignet. Bei tieferen Wunden wird die zusätzliche Verwendung von Wundfüllern und Gelen empfohlen.

Wichtige Hinweise!

Mepilex® sollte, je nach Größe der Wunde, mindestens 2 cm über den Wundrand auf die Wundumgebung appliziert werden. Bei Entzündungs- oder leichten Infektzeichen sollte medizinisches Fachpersonal herangezogen werden bzw. eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden.

Bestellinformationen

Home Care

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
29 40 15	5 x 5 cm	09 31 30 54	5
29 41 50	10 x 12 cm	01 60 33 38	5
29 42 50	12 x 20 cm	01 60 33 50	5
29 43 50	15 x 17 cm	01 60 33 73	5
29 44 50	20 x 22 cm	01 60 34 04	5
29 45 00	20 x 50 cm	01 16 68 14	2

Mepilex Heel

28 81 00	13 x 20 cm	04 79 10 62	5
----------	------------	-------------	---

Steril – einzeln verpackt

Klinik

Art.-Nr.	Größe	Stück/Packung
29 40 15	5 x 5 cm	5
29 41 00	10 x 10 cm	5
29 42 00	10 x 20 cm	5
29 43 00	15 x 15 cm	5
29 44 00	20 x 20 cm	5
29 45 00	20 x 50 cm	2

Mepilex Heel

28 81 00	13 x 20 cm	5
----------	------------	---

Steril – einzeln verpackt



Referenzen: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und die Produkte Mepilex® und Mepilex® Heel sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

