

Mepitac[®]


Hautschonender Fixierverband

Polyurethanfilm

- Atmungsaktiv
- Wasserdicht

Gewebsstruktur

- Komfortabel
- Einfach zuzuschneiden

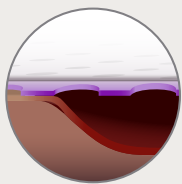

Safetac[®]- Beschichtung

Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut^{1,3}

Die Safetac Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut




- Minimiert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel^{1,3}
- Ideale Fixiermöglichkeit für Patienten mit fragiler und empfindlicher Haut
- Passt sich gut Körperunebenheiten an

Mepitac[®]




Mölnlycke[®]


Anwendungshinweise

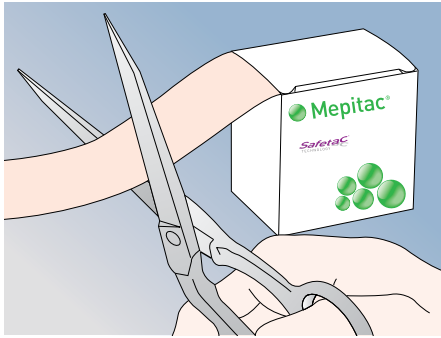

Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber, trocken und frei von Salben und sonstigen Rückständen ist. Ziehen Sie bei der Erstverwendung den grünen Streifen aus der Verpackung heraus, bis der Verband sichtbar wird und schneiden sie diesen auf die gewünschte Länge zu.

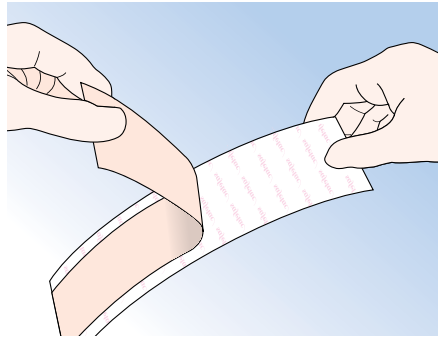

Entfernen Sie die Schutzfolie.

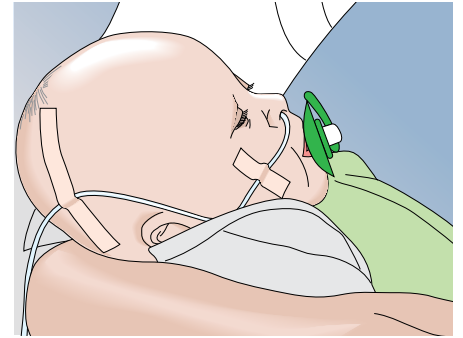

Applizieren Sie Mepitac ohne es zu dehnen. Falls eine Kontrolle oder Neupositionierung notwendig ist, kann Mepitac angehoben und neu fixiert werden.

So funktioniert Mepitac®

Mepitac bietet einen hohen Tragekomfort und kann einfach appliziert und entfernt werden. Safetac gewährleistet eine sanfte und dennoch sichere Fixierung, auch auf behaarter Haut.

Mepitac hinterlässt keine Rückstände auf der Haut und ist die ideale Lösung für Patienten mit empfindlicher oder erkrankter Haut. Wenn eine Inspektion oder Neupositionierung erforderlich ist, kann Mepitac angehoben und neu fixiert werden.

Vorteile von Mepitac®

- Atraumatisch zu entfernen
- Passt sich gut Körperunebenheiten an
- Rückstandsloses Entfernen
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Reapplizierbar



Anwendungsempfehlungen

Mepitac wurde für die Fixierung von medizinischen Produkten, wie beispielsweise Drains, Schläuchen, Sonden, Elektroden und Verbänden entwickelt. Mepitac kann auch als sanfter Hautschutz unter med. Geräten, z.B. Tuben verwendet werden.

Wichtige Hinweise!

Die Haftung von Mepitac kann in einer feuchten Umgebung wie z. B. in Inkubatoren oder bei Patienten mit Fieber abnehmen. Verwenden Sie Mepitac zur Fixierung von lebenswichtigen Zu- und Ableitungen nur als zusätzliche Maßnahme. Verwenden Sie Mepitac nicht zur Fixierung von arteriellen Kathetern oder Kanülen.

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung
29 83 00	2 x 300 cm	03 88 58 49	1
29 84 00	4 x 150 cm	03 88 58 55	1

Unsteril – auf Rolle



REFERENZEN: 1. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; 4: 1, 14-22. 2. Waring, M., Biefeldt, S., Matzold, K.P., Butcher, M. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care 2011;20(9):412-422. 3. White, R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005; 1: 3, 104-109 4. Wound Union of Wound Healing Societies. Principles of best practice. Minimising pain at wound dressing related procedures. A consensus document. 2004. Published by Medical Educational Partnership London. 5. Principles of best practice: Minimising pain at dressing-related procedures. A consensus document. Toronto, Ontario, Canada: ©WoundPedia Inc 2007.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und das Produkt Mepitac® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0061

