


Mepitel® Film

Hautschonender Folienverband

- Transparente, atmungsaktive, elastische Polyurethanfolie für mehr Patientenkomfort.
- Duschfest, Schutz vor Bakterien und Viren (Mikroben >25nm)

- Applikationsrahmen für einfache Anwendung

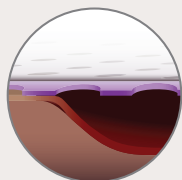

Safetac®- Beschichtung

Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut ^{1-3,5,6}

Die Safetac Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde^{1-3,5,6}



- Sanft haftender, transparenter, atmungsaktiver Folienverband
- Lässt sich atraumatisch, schmerzfrei und rückstandslos entfernen
- Ist einfach und vielseitig in der Anwendung

Mepitel® Film



Mölnlycke®

Anwendungshinweise



Trocknen Sie die wundumgebende Haut. Entfernen Sie die Schutzfolie (Safetac Aufdruck) um den Film freizulegen.



Positionieren Sie den Verband ohne zu dehnen und drücken Sie ihn gut an. Entfernen Sie anschließend den weißen Papierrahmen hautnah. Für eine optimale Haftung/Fixierung sollte Mepitel Film, je nach Größe des Wundareals oder Verbandes, ca. 2–5cm überlappen.



Streichen Sie den Verband auf der Haut glatt und drücken Sie, vor allem den Rand nochmals gut an. Die Entfernung erfolgt schmerzfrei und rückstandslos.

So funktioniert Mepitel® Film

Mepitel Film ist ein sanfter, transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie. Er kann als sanfter Hautschutz im Bereich von reibungs-, scherkraft- und mazerationsgefährdeten Körperstellen oder für die Versorgung oberflächlicher Wunden angewendet werden.

Vorteile von Mepitel® Film

- Die transparente, atmungsaktive Oberfläche ermöglicht eine einfache Wundinspektion
- Passt sich optimal den Körperkonturen an und gewährleistet einen hohen Tragekomfort
- Duschfest und für Bakterien und Viren (>25 nm) undurchlässig
- Geringes Hautreizungs- oder Allergierisiko
- Rückstandslos zu entfernen
- Reduziert Reibung und Scherkräfte

Anwendungsempfehlungen

Der innovative Folienverband schützt sanft fragile, empfindliche Haut und reduziert Reibung und Scherkräfte.

Er kann sowohl direkt, für oberflächliche, nicht exsudierende Wunden als auch zur Fixierung von Verbänden herangezogen werden. Beispiele: oberflächliche Verbrennungen und Hautverletzungen, Dekubitus Stadien 1 und 2, als Schutz nach chirurgischen Eingriffen oder als „Landezone“ (Hautschutz) um darauf Sonden, Katheter, etc. mit einem Tape zu fixieren.



Wichtige Hinweise!

- Falls Mepitel Film überlappend mit anderen Verbänden verwendet wird, kann es zu Einschränkungen der Permeabilität mit vermehrter Feuchtigkeitsansammlung unter dem Verband kommen.
- Mepitel Film kann nicht als primäre Fixierung bei intravenösen Zugängen, Kanülen, Ports oder anderen Infusionen sowie lebenserhaltenden Geräten verwendet werden.

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
29 61 70	6 × 7 cm	04 10 73 38	10
29 62 70	10 × 12 cm	04 10 73 50	10
29 64 70	10 × 25 cm	04 10 73 73	10
29 66 70	15 × 20 cm	04 10 74 04	10

Steril – einzeln verpackt



REFERENZEN: 1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008. 2. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005. 3. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Ostomy Wound Management 2003. 4. Wiberg AB et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication. WUWHS congress, Canada 2008. 5. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001. 6. Waring M, et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und das Produkt Mepitel® Film sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0062

