


Mepore® Film & Pad

Atmungsaktiver, transparenter, selbstklebender, absorbierender Wundverband

Tragende Schutzfolie und
Papierrahmen für eine einfache
und aseptische Anwendung.

Absorbierendes Wundkissen
mit einer haftenden Oberflächen-
beschichtung für höheren
Patientenkomfort und längere
Tragedauer.

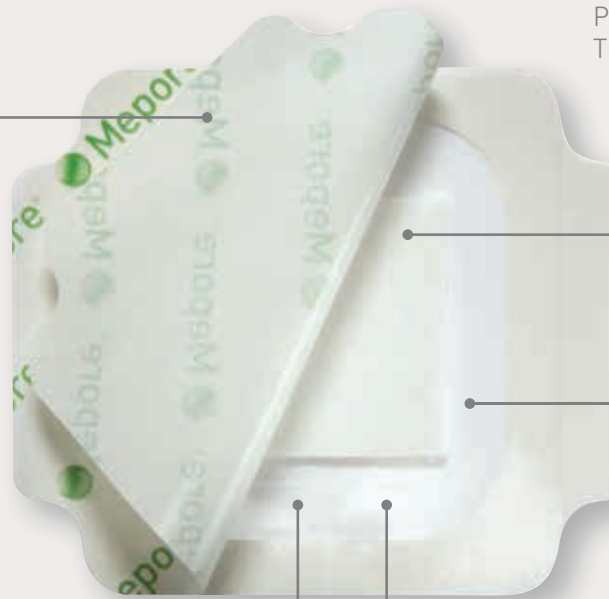

Viren und bakteriendichter*
Film, undurchlässig für
Flüssigkeiten für Sicherheit
und Schutz.

Hautfreundlicher Kleber
zur sanften und sicheren
Fixierung.

Transparente, atmungsaktive,
duschfeste Folie für Patienten-
komfort und längere Tragedauer.



* (Mikroben > 25nm)

Mepore Film & Pad ist ein transparenter, selbstklebender und absorbierender Wundverband. Die Anwendung ist besonders einfach und das dezente Design erhöht den Tragekomfort für den Patienten.

Mepore® Film & Pad



Mölnlycke®

Anwendungshinweise



Entfernen Sie die Trägerfolie. Positionieren Sie den Verband.
Verband nicht unter Spannung anbringen.



Entfernen Sie anschließend den Papierrahmen und die zwei weißen Hilfsflügel.



Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, legen Sie Ihre Hand ein paar Sekunden lang auf den Verband.

So funktioniert Mepore® Film & Pad

Durch das hochabsorbierende Wundkissen und die stark wasserdampfdurchlässige Folie bietet Mepore Film & Pad ein sehr gutes Exsudatmanagement. Mepore Film & Pad bietet eine anpassungsfähige Abdeckung um die Wunde zu schützen und passt sich gut an Körperkonturen und Oberflächenunebenheiten an. Der hautfreundliche Polyacrylatkleber ermöglicht eine sanfte und gleichzeitig sichere Fixierung.

Mepore Film & Pad ist einfach in der Anwendung und kann auch mit Handschuhen aseptisch gewechselt werden.

Vorteile von Mepore® Film & Pad

- Atmungsaktiv
- Ausgezeichnetes Exsudatmanagement
- Einfache Anwendung, auch mit Handschuhen
- Passt sich gut an Körperkonturen an
- Viren- und bakterienundurchlässig*
- Auslaufschutz
- Hautfreundlicher Kleber
- Duschfest
- In vielen Größen erhältlich

Anwendungsempfehlungen

Mepore Film & Pad kann bei einer Vielzahl von Wunden mit geringer bis mäßiger Exsudatmenge eingesetzt werden, wie z. B. bei chirurgischen Wunden, Schnittwunden und Hautabschürfungen.

Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt vom Zustand der Wunde ab.



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Mölnlycke® und das Produkt Mepore® Film & Pad sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0045

Wichtige Hinweise!

Mepore Film & Pad sollte nicht bei Patienten mit einer Unverträglichkeit gegen Polyacrylatkleber angewendet werden. Mepore Film & Pad soll nicht unter Spannung angebracht werden. Scherkräfte können eine Verletzung der Haut zur Folge haben. Die Wunde sollte stets auf Anzeichen einer Infektion überwacht werden. Die Einbeziehung von medizinischem Fachpersonal und eine adäquate Infektionstherapie sind bei Anzeichen/Auftreten einer Infektion unerlässlich.

Bestellinformationen

Home Care

| Art.-Nr. | Größe | Größe Wundkissen | PZN/Packung | Stück/Packung |
|----------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|
| 27 51 10 | 4 x 5 cm | 1,5 x 2,5 cm | 01 62 41 51 | 5 |
| 27 52 10 | 5 x 7 cm, oval | 2,5 x 4 cm | 01 62 91 48 | 5 |
| 27 53 10 | 5 x 7 cm, quadratisch | 2,5 x 4 cm | 01 62 41 80 | 5 |
| 27 54 10 | 9 x 10 cm | 4,5 x 5 cm | 01 65 05 04 | 5 |
| 27 55 10 | 9 x 15 cm | 4,5 x 10 cm | 01 65 05 10 | 5 |
| 27 56 10 | 9 x 20 cm | 4,5 x 15 cm | 01 65 05 27 | 5 |

Steril – einzeln verpackt

Klinik

| Art.-Nr. | Größe | Größe Wundkissen | Stück/Packung |
|----------|-----------------------|------------------|---------------|
| 27 51 00 | 4 x 5 cm | 1,5 x 2,5 cm | 85 |
| 27 52 00 | 5 x 7 cm, oval | 2,5 x 4 cm | 85 |
| 27 53 00 | 5 x 7 cm, quadratisch | 2,5 x 4 cm | 85 |
| 27 54 00 | 9 x 10 cm | 4,5 x 5 cm | 30 |
| 27 55 00 | 9 x 15 cm | 4,5 x 10 cm | 30 |
| 27 56 00 | 9 x 20 cm | 4,5 x 15 cm | 30 |
| 27 57 00 | 9 x 25 cm | 4,5 x 20 cm | 30 |
| 27 58 00 | 9 x 30 cm | 4,5 x 25 cm | 25 |
| 27 59 00 | 9 x 35 cm | 4,5 x 30 cm | 25 |

Steril – einzeln verpackt

