

Mepore® Film

Atmungsaktiver, selbstklebender,
transparenter Folienverband

Polyurethanfolie

- Atmungsaktiv und elastisch
- Viren- und bakterienundurchlässig (Mikroben > 25nm)

Schutzfolie und Papierrahmen

- Ermöglichen eine einfache Applikation



Hautfreundlicher Polyacrylatkleber

- Gewährt eine sichere Fixierung




Mepore Film ist ein transparenter, selbstklebender Folienverband, der sich als Sekundärverband ideal zur Abdeckung und Fixierung von Primärverbänden und auch als Primärverband für eine große Bandbreite von „sauberen“ Wunden eignet. Mepore Film ist einfach in der Anwendung.

Mepore® Film




Mölnlycke®


Anwendungshinweise

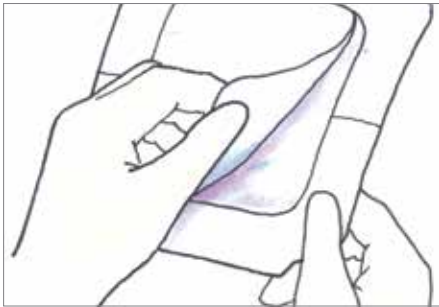

Für die Größen 10 x 25 cm und 15 x 20 cm gilt: Bitte zuerst das ausgestanzte mittige Schutzpapier entfernen.

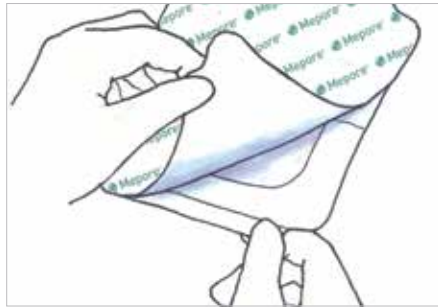

Entfernen Sie die Schutzfolie (mit Mepore Film Aufdruck) um den Kleber freizulegen.

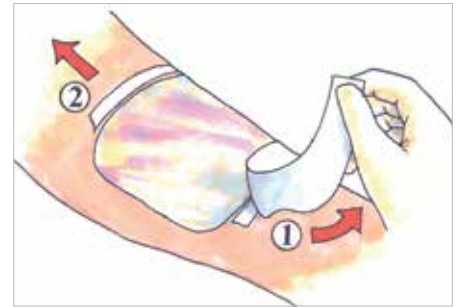

Positionieren Sie den Verband und fixieren Sie diesen mit der haftenden Seite auf der Haut. Bitte beachten Sie, dass der Verband während der Applikation nicht überdehnt wird. Entfernen Sie dann den Papierrahmen und die beiden seitlichen Streifen.

Eigenschaften von Mepore® Film

Mepore Film ermöglicht einen flexiblen, transparenten Schutz der Wunde und passt sich ausgezeichnet an unterschiedliche Körperkonturen an. Der viren- und bakterienundurchlässige Polyurethanfilm bietet Schutz vor äußerer Kontamination. Mepore Film ist wasserdampfdurchlässig und ermöglicht die Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus. Gleichzeitig wird überschüssige Feuchtigkeit von der Wunde und der wundumgebenden Haut abgeleitet.

Vorteile von Mepore® Film

- Atmungsaktiv
- Einfache Anwendung auch beim Tragen von Handschuhen
- Schutz vor Reibung
- Passt sich den Körperkonturen an
- Hautfreundlicher Kleber
- Zuverlässige und sichere Fixierung
- Bewahrt ein feuchtes Wundmilieu
- Bakterien- und virenundurchlässige Folie
- Flüssigkeitsundurchlässig

Anwendungsgebiete

Mepore Film ist ideal als Sekundärverband zur Abdeckung und Fixierung von Primärverbänden, wie z.B. bei der Verwendung von Hydrogelen, Alginaten oder Schaumverbänden. Des Weiteren kann Mepore Film als Primärverband bei einer großen Bandbreite von „sauberen“ Wunden mit wenig bis kaum Exsudation angewendet werden:

- Schürfwunden
- Risswunden
- Hautentnahmestellen
- Oberflächliche Verbrennungen
- Oberflächliche Druckgeschwüre
- Geschlossene chirurgische Wunden
- Vorbeugung von Hautschädensowie als Duschpflaster und Sekundärverband.

Hinweis

Mepore Film sollte nicht als Primärverband bei tiefen Wunden, bei denen Muskel-, Sehnen- oder Knochenverletzungen zugrundeliegen sowie bei Verbrennungen 3. Grades eingesetzt werden. Bei Patienten mit Unverträglichkeiten von Polyacrylatklebern sollte Mepore Film ebenfalls nicht angewendet werden.

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 06 70	6 x 7 cm	02 38 13 19	10	50
27 15 70	10 x 12 cm	02 38 13 31	10	70
27 25 70	10 x 25 cm	02 38 94 62	10	50
27 30 00	15 x 20 cm	02 39 11 40	10	50

Steril – einzeln verpackt



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke® und das Produkt Mepore® Film sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0064

