

Mepore® Pro

Wasserfester, selbstklebender Wundverband

Schutzfolie

- Einfach zu entfernen

Weiches, elastisches Vlies

- Aus Polyester

Polyacrylatkleber

- Hautfreundlich, bindemittelfrei und auf Wasser-Emulsionsbasis

Polyurethanfilm

- Viren- und Bakterienundurchlässig (Mikroben > 25nm)
- Atmungsaktiv und wasserfest

Absorbierendes Wundkissen

- Aus Viskose mit einer gering haftenden Oberfläche



Mepore Pro ist ein selbstklebender, absorbierender und luftdurchlässiger Verband mit einer äußeren Folie, welche die Wunde vor Wasser und Kontamination schützt. Der hautfreundliche, lösemittelfreie Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis ermöglicht eine sanfte und sichere Haftung.

Mepore® Pro



Mölnlycke®

Anwendungshinweise



Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Verband.



Die überlappenden Schutzfolien in die Hand nehmen und auf die Wunde applizieren.



Verband sanft und spannungsfrei auf der Haut anbringen und den Rest der Schutzfolie entfernen. Ziehen Sie den haftenden Rand glatt, um eine gute Adhäsion zu erreichen. Den Verband während des Aufbringens nicht überdehnen.

Eigenschaften von Mepore® Pro

Die wasserundurchlässige Folie ermöglicht das Duschen und schützt die Wunde vor Wasser und Kontamination. Sie schützt gleichzeitig Bekleidung und Bettwäsche vor dem Durchnässen. Durch das stark absorbierende Wundkissen und die atmungsaktive Folie verfügt der Verband über ein gutes Aufnahmevermögen. Der Polyacrylatkleber ist sanft zur Haut und bietet gleichzeitig eine sichere Haftung. Die einfach zu entfernende Schutzfolie ermöglicht eine sterile und einfache Applikation. Auch die Stabilität des lamellenförmig angeordneten Gewebes ermöglicht die einfache Anwendung.

Vorteile von Mepore® Pro

- Ermöglicht das Duschen mit Verband
- Die gering haftende Wundkissenoberfläche schützt vor dem Verkleben mit der Wunde
- Schützt Wunde vor Wasser und Kontamination
- Viren- und bakterienundurchlässiger Polyurethanfilm
- Gute Absorptionskapazität
- Einfache Applikation
- Atmungsaktiv
- Geringe Reibung an Kleidung und Bettwäsche
- Hautfreundlicher Kleber auf Wasser-Emulsionsbasis



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke® und das Produkt Mepore® Pro sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0045

Anwendungsgebiete

Mepore Pro wird eingesetzt zur Behandlung von leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden, z.B. postoperativen Wunden, Schnittwunden und Hautabschürfungen.

Häufigkeit des Verbandwechsels

Die Häufigkeit hängt vom Zustand der Wunde ab. Heben Sie eine Ecke und ziehen Sie den Verband vorsichtig in Haarwuchsrichtung ab.

Hinweis

Mepore Pro soll nicht unter Spannung angebracht werden. Scherkräfte können eine Verletzung der Haut zur Folge haben. Dies ist besonders wichtig bei der Applikation über Gelenken.

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/Packung	Stück/Packung
67 08 20	6 x 7 cm	3 x 4 cm	00 75 53 71	60
67 09 20	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	04 65 66 54	40
67 10 20	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	04 65 66 83	40
67 11 20	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	00 75 54 31	30
67 12 20	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	00 75 54 54	30
67 13 20	9 x 30 cm	4,5 x 25 cm	00 75 54 77	30

Steril – einzeln verpackt

