




Hochabsorbierender Saugverband mit flüssigkeitsundurchlässiger Exsudatbarriere

Mesorb ist ein weicher, hochabsorbierender Saugverband, welcher sehr große Mengen von Exsudat aufnimmt. Die flüssigkeitsundurchlässige Exsudatbarriere verhindert die Verschmutzung von Bekleidung und Bettwäsche.

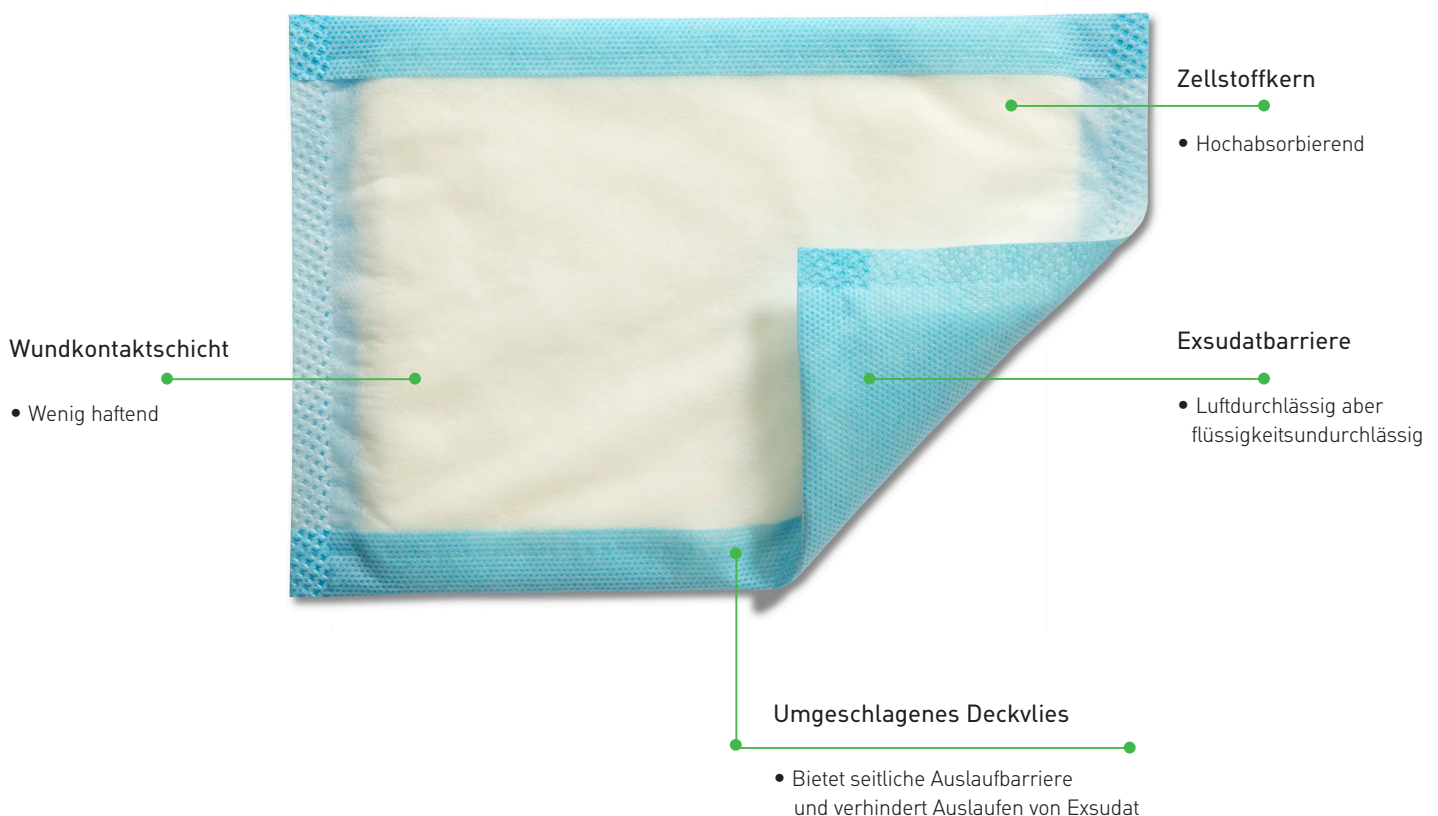


Eigenschaften


Das Exsudat wird von der Wundkontaktschicht und von der Diffusionsschicht aufgenommen und in den Zellstoffkern transportiert. Der hochsaugfähige Verband absorbiert Exsudat, während er gleichzeitig guten Schutz und eine hohe Luftzufuhr gewährleistet.

Die flüssigkeitsundurchlässige Exsudatbarriere schützt vor äußerer Kontamination und verhindert die Verschmutzung von Bekleidung und Bettwäsche. Dank der seitlichen Auslaufbarriere verhindert Mesorb das Auslaufen von Exsudat durch die Seitenränder.


Anwendungshinweise

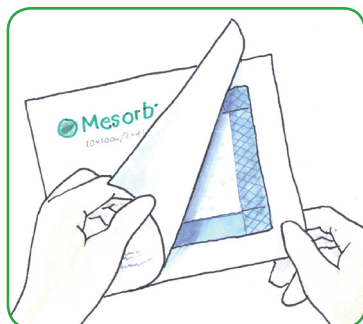

Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Verband.

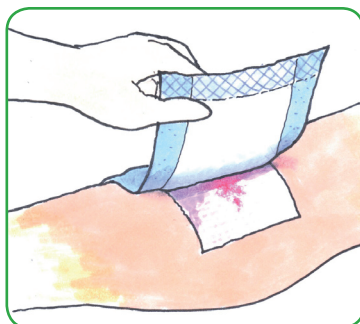

Applizieren Sie Mesorb auf die Wunde oder auf den Primärverband und lassen Sie Mesorb mindestens 1 cm überlappen.

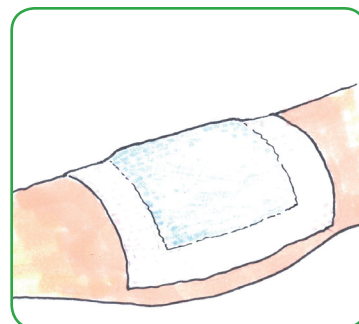

Fixieren Sie Mesorb mit einem geeigneten Verband (z.B. Mefix®, Mepore® Film, oder Tubifast™)

Häufigkeit des Verbandwechsels

Mesorb kann bis zu 7 Tage getragen werden, abhängig vom Zustand der Wunde und der Haut oder in Absprache mit medizinischem Fachpersonal.

Vorteile von Mesorb

- Hochabsorbierend
- Gute Polsterwirkung
- Hoher Tragekomfort
- Kosteneffizient, da weniger Verbandwechsel und Schutz vor Verschmutzung von Bekleidung und Bettwäsche

Hinweis

Im Falle von Anzeichen einer Infektion, ziehen Sie bitte medizinisches Fachpersonal zu Rate, um eine adäquate Behandlung der Infektion zu gewährleisten.



Mesorb ist einzeln steril verpackt.

Art. Nr.	Grösse cm	Pharma Code	Stück Packung	Stück Karton
677001	10 x 13	3753817	50	400
677201	13 x 15	3753846	50	300
677401	10 x 23	3753881	50	300
677601	15 x 23	3753929	50	300
677701	25 x 23	3753935	30	120
677801	30 x 23	1409665	30	120

Verbandmittel sind CE geprüfte Medizinprodukte und keine Arzneimittel! Verbandmittel sind weiterhin verordnungsfähig.

Mölnlycke Health Care AG
Heimstr. 18, 8953 Dietikon
T 044 744 54 00, F 044 744 54 11
info.ch@mölnlycke.com
www.mölnlycke.com



Mesorb ist eine eingetragene Marke der Mölnlycke Health Care.