



PARI BOY® Classic

Technisches Datenblatt



Für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene

Bestell-Nr.:	130G1200
PZN:	13868409
Hilfsmittel-Nr.:	14.24.01.0150

Technische Daten:

Wechselstrom	220–240 V/~ 50 Hz
Druck:	1,6 bar
Gewicht:	1,7 kg
Gehäuseabmessungen:	18,5 x 13 x 15 cm (B x H x T)
Garantie:	4 Jahre

Effizientes Inhalationssystem zur Therapie von akuten und chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege

PARI BOY Classic enthält:

- PARI LC SPRINT Vernebler mit PIF Control
- Blauer Düsenaufsatz für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene
- Mundstück mit Ventilsystem
- Anschlusschlauch

PARI PIF Control – atemsensorisches Feedback-System

Eine langsame Einatmung fördert die Deposition der Wirkstoffe in der Lunge. Um beim Patienten eine bestmögliche Inspiration für eine hohe Lungendeposition zu erreichen, hat PARI ein atemsensorisches Feedbacksystem – das PIF-Control System – entwickelt (PIF = Peak Inspiratory Flow, d. h. Einatem-Spitzenfluss). Dabei verschließt bei zu schneller Einatmung das Einatem-Ventilplättchen den Kamin des Verneblers bis auf eine kleine Öffnung. Dies spürt der Patient als Widerstand – ein Zeichen für ihn, auszutreten und beim nächsten Atemzug langsamer einzutreten, sodass kein Widerstand mehr spürbar ist.

Aerosolcharakteristika:

Blauer Düsenaufsatz:

Total Output Rate:	600 mg/min
MMD:	3,5 µm
Massenanteil < 5 µm:	67 %







Messung mit Malvern Mastersizer X bei 23 °C und 50 % relativer Feuchte.
Vernebeltes Medium: 0,9 % NaCl (5 ml).
Inspiratorischer Fluss 20 l/min.

PARI Year Packs

- Unterschiedliche Aerosolspektren durch verschiedene Düsenaufsätze
- Gezielte Deposition im gewünschten Bereich der Atemwege
- Flexibel einsetzbar je nach Alter und Indikation
- Eine hygienisch sichere Inhalationsbehandlung für alle weiteren Familienmitglieder: denn Eltern oder Geschwister sollten ihren eigenen Vernebler benutzen.

Für eine gleichbleibende Therapieeffizienz empfehlen wir bei regelmäßigem Gebrauch, den Vernebler, den Anschlusschlauch und den Filter jährlich zu tauschen.

Die PARI Year Packs sind auch passend für die Vorgängermodelle.

Produkt	Zielgruppe/Charakteristika	Indikationen	Ausstattung	Bestell-Nr.:
 <p>PARI BOY Classic Year Pack</p>	<p>Blauer Düsenaufsatz produziert Tröpfchen für die effiziente Deposition im zentralen Bereich der Lunge bei älteren Kindern (ab 4 Jahre) und Erwachsenen</p> 	Bronchialasthma und allergisches Asthma, Akute und chronische Bronchitis, Atelektasen oder Bronchiektasen, COPD	PARI LC SPRINT Vernebler (Düsenaufsatz blau) mit PIF-Control, Mundstück universell, Anschlusschlauch (f/m)*, 2 Filter (einer passend für die Vorgängermodelle)	023G3210
 <p>PARI BOY Junior Year Pack</p>	<p>Gelber Düsenaufsatz produziert kleine Tröpfchen für kleine Atemwege bei Babys und Kindern. Zusätzlicher roter Düsenaufsatz produziert feinste Tröpfchen für kleinste Atemwege.</p> 	Bronchialasthma und allergisches Asthma, Akute und chronische Bronchitis, Atelektasen oder Bronchiektasen	PARI LC SPRINT Junior Vernebler (Düsenaufsatz gelb) mit PIF-Control, zusätzlicher roter Düsenaufsatz, Mundstück universell, langer Anschlusschlauch (f/m)*, 2 Filter (einer passend für die Vorgängermodelle)	023G3310
 <p>PARI BOY Pro Year Pack</p>	<p>Blauer Düsenaufsatz produziert Tröpfchen für die effiziente Deposition im zentralen Bereich der Lunge. Zusätzlicher roter Düsenaufsatz produziert feinste Tröpfchen für die peripheren Bereiche der Lunge.</p> 	Bronchialasthma und allergisches Asthma, Akute und chronische Bronchitis, Atelektasen oder Bronchiektasen, Lungenemphysem COPD	PARI LC SPRINT Vernebler (Düsenaufsatz blau) mit PIF-Control, zusätzlicher roter Düsenaufsatz, Mundstück universell, Anschlusschlauch (f/m)*, 2 Filter (einer passend für die Vorgängermodelle)	023G3010

* female/male: passend für alle PARI Geräte außer PARI COMPACT und PARI BOY free

Nützliches Zubehör	Bestell-Nr.:	PZN:	Hilfsmittel-Nr.:
PARI LC SPRINT Vernebler	023G1100	03870061	14.99.99.1038
PARI LC Unterbrecher	022G1000	08613417	–
PARI Filter/Ventil Set	041G0500	00631841	–
PARI PEP S System	018G4000	04671412	14.24.08.0008
PARI TRACHEO SET	025G0007	02912550	
PARI Aufbewahrungstasche	085E1100	02859169	–
SMARTMASK	041G0730	02235894	–



PARI GmbH
 Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
 E-Mail: info@pari.de
 Tel. +49 (0) 8151 279 0
 www.pari.com

