

Physiopack®

Neue Varianten

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch



Wiederverwendbare Kalt-/Warm-Kompresse.

Anschmiegsam. Einfach anzuwenden.

Viele akute und chronische Schmerzen lassen sich mit Wärme und Kälte therapieren. Ein bewährtes Mittel dazu sind Kalt-/Warm-Kompressen wie das Physiopack®. Je nach Therapieziel wird es erwärmt oder gekühlt und kann mehrmals wiederverwendet werden.

Produkteigenschaften

Physiopack® wird für die Kältetherapie mindestens 90 Min. in einem Gefrierfach gekühlt. Für die Wärmerotherapie wird Physiopack für ca. 8 Min. in ein Wasserbad gelegt oder mit dem Mikrowellen-Ofen (350–800 Watt) in 30-Sekunden-Intervallen bis zur gewünschten Temperatur erwärmt.

Wie bei allen Kalt-/Warm-Kompressen empfiehlt sich die Verwendung eines Hautschutzes, ein Handtuch zum Beispiel oder das Physiopack® Wrap mit Klettverschluss. Physiopack® kann, wenn nötig, mit einer kohäsiven Binde wie Gazo-fix® fixiert werden.

Die isolierende Polystyrol-Verpackung hält die Komresse bis zu 5 Stunden unter 0 °C resp. bis zu 6 Stunden über 42 °C.

Lieferformen

REF	Abmessung	Verp.-Einheiten
Physiopack®		
1 Komresse mit Hülle in Faltschachtel		
72075-10	7,0 cm x 38,0 cm	1/12
72075-11	13,0 cm x 30,0 cm	1/10
72075-12	19,0 cm x 30,0 cm	1/8
1 Komresse, isolierte Polystyrol-Verpackung		
72075-03	13,0 cm x 30,0 cm	1/8
Economy, Einzelkomresse lose in Karton		
72075-01	7,0 cm x 38,0 cm	12/72
72075-02	13,0 cm x 30,0 cm	12/72
72075-04	19,0 cm x 30,0 cm	6/6
Physiopack® Wrap		
Fixierbandage mit Klettverschluss		
72078-00	15,0 cm x 75,0 cm	1/12

MiGel: 16.01.01 (< 300 cm² Nutzfläche) und
16.01.02 (> 300 cm² Nutzfläche)

Weitere Eigenschaften

- wiederverwendbar
- hohe gleichbleibende Anschmiegsamkeit

Anwendungsgebiete

Für die Kältetherapie bei Entzündungen, Verletzungen und Schmerzen. In der Wärmerotherapie z.B. bei Arthritis und anderen chronischen Schmerzen.

