

SILVERCEL® NON-ADHERENT

ENTWICKELT UM NICHT ANZUHAFTEN

WORUM HANDELT ES SICH?


SILVERCEL® NON-ADHERENT ist eine silberhaltige antimikrobielle Wundauflage, die mit einer einzigartigen nichthaftenden Wundkontaktschicht ausgestattet ist, wodurch der Schutz des Wundbettes insbesondere beim Verbandwechsel erhöht wird.


WAS KANN ES?

- Speziell entwickelt, um nicht am Wundbett anzuhaften¹
- Nachgewiesene antimikrobielle Wirkung¹
- Nachgewiesene kontinuierliche Abgabe von Silber¹

Die optimal perforierte Wundkontaktschicht ermöglicht eine ungehinderte Exsudataufnahme und stellt sicher, dass die Wundauflage ihre Form behält.

**EasyLIFT™**
PRECISION FILM

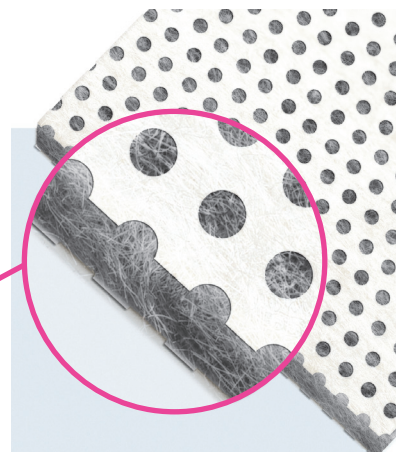

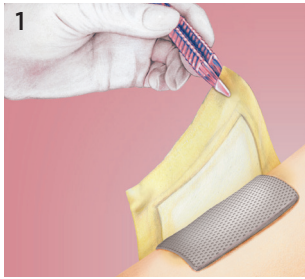

WIE WIRD ES EINGESETZT?

Schneiden oder falten Sie **SILVERCEL® NON-ADHERENT**, um es der Wunde anzupassen. Bedecken Sie die Wundauflage mit einem nicht-okklusiven Sekundärverband.

Erneuern Sie **SILVERCEL® NON-ADHERENT**, wenn der Sekundärverband seine Absorptionskapazität erreicht hat oder entsprechend der geltenden Pflegestandards.

Verbandwechsel

Schritt 1


Entfernen Sie vorsichtig den Sekundärverband. Das Entfernen des Verbandes sollte entsprechend der Pflegestandards immer mit Schutzhandschuhen oder mit der Pinzette vorgenommen werden.

Schritt 2

Entfernen Sie **SILVERCEL® NON-ADHERENT** anschließend vorsichtig von der Wundfläche. Wenn die Wunde trocken erscheint, befeuchten Sie die Wundauflage vor dem Entfernen mit steriler Kochsalzlösung.

Schritt 3

Spülen Sie die Wundfläche vor dem Auflegen eines neuen Verbandes mit einer geeigneten Lösung.

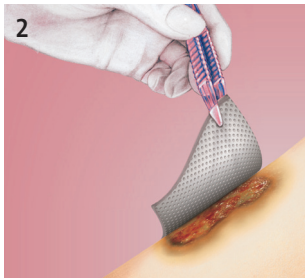


WANN WIRD ES EINGESETZT?

SILVERCEL® NON-ADHERENT antibakterielle Wundauflage aus Hydroalginat mit Silber ist für die Behandlung aller mäßig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden unterschiedlicher Tiefe geeignet, darunter Dekubitus- (Druck-)Geschwüre, venöse Geschwüre, diabetische Geschwüre, Hautentnahmestellen sowie traumatische und chirurgische Wunden.

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Gebrauchshinweise in der Packungsbeilage.

DARÜBER SOLLTEN WIR REDEN...

Um mehr über den Nutzen von **SILVERCEL® NON-ADHERENT** zu erfahren, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Außendienstmitarbeiter von Systagenix auf oder besuchen Sie unsere Website unter www.systagenix.com

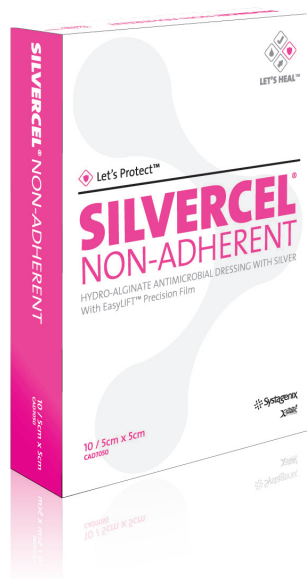

Best.-Nr. D/A/CH	PZN/CT D	PZN/CT CH	Größe in cm	Stück/CT (=OP)	Stück/Box (=Karton)	Stück/ CS
CAD7050	5378370	4331366	5,0 x 5,0	10	50	500
CAD7011	5378387	4331389	11,0 x 11,0	10	50	600
CAD7020	5378393	4331478	10,0 x 20,0	5	25	200
CAD7230	5378401	4331857	2,5 x 30,5 Tamponade	5	25	150

Referenzen

1. Clark, R; Stephens, S-A; Del Bono, M; Aboye, O; Bayliff, S; The Evaluation of Absorbent Silver containing Dressings In Vitro; Systagenix Wound Management. Poster Presentation CAWC Quebec City October 2009

© Systagenix 2011. Alle anderen in dieser Broschüre genannten Produkte sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

www.systagenix.com

