


FIXIERSYSTEM

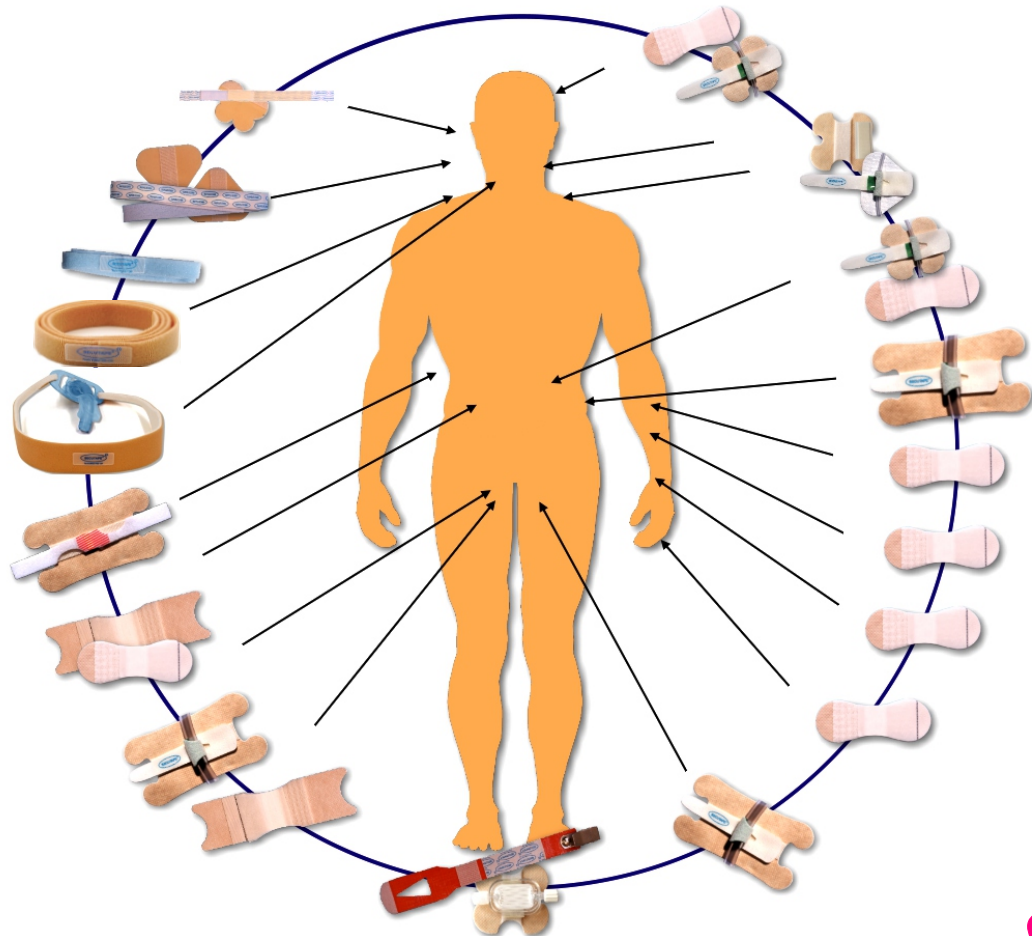

KATALOG

Wir bieten kostenlose Produktschulungen!



TechniMed AG

SWITZERLAND since 1987
fon 0041 / 71 844 49 20

Kirchstrasse 54
CH-9400 Rorschach

fax 0041 / 71 845 52 45

Germany

fon 0800 007 9892

fax 0800 941 3012

Austria

fon 01/ 440 7979

fax 01/ 440 7990

mail: info@technimed.ch



Made in Germany

www.secutape.ch

Copyright by TechniMed AG


Das SECUTAPE Prinzip

Das Basispflaster klebt komplett auf der Haut, es gibt keine angelöste Stelle !

Der "Schlauch" wird in Klebstoff gebettet, ein Klettverschluss verhindert das Öffnen der Lasche!

Über diese Lasche werden die Bewegungen des Schlauchs auf das gesamte Pflaster übertragen. Die Fixierung hält und wird durch den Klettverschluss geöffnet und wieder verschlossen !

Alle unsere SECUTAPE Fixierungen funktionieren nach dem gleichen Prinzip.

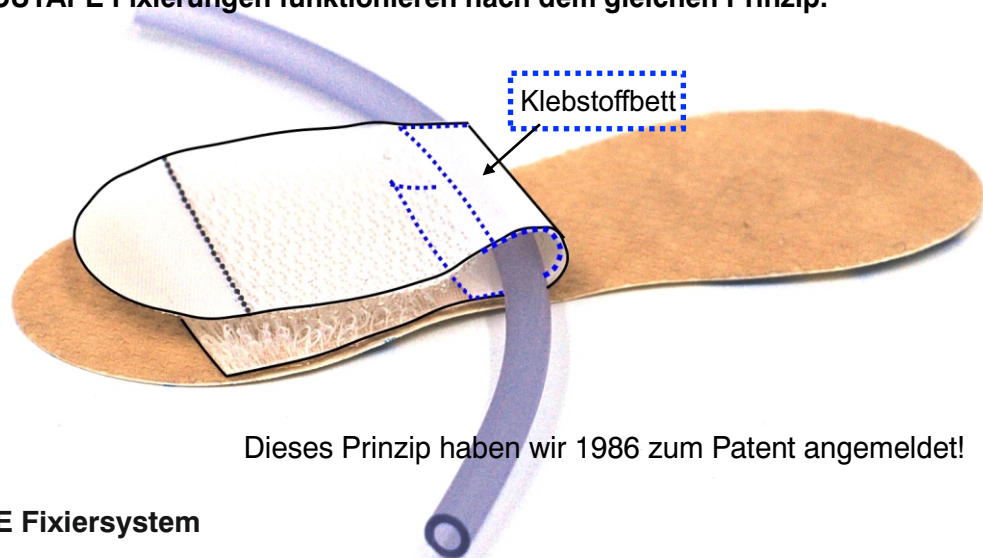

Dieses Prinzip haben wir 1986 zum Patent angemeldet!

Das SECUTAPE Fixiersystem

bietet sichere und zuverlässige Lösungen für praktisch alle zu befestigenden Katheter, Drainagen, Sonden, Tuben und Leitungen, also für alle schlauchförmigen Hilfsmittel.

Wir sind Spezialisten auf diesem Gebiet. Seit über dreissig Jahren entwickeln, fertigen und vertreiben wir zig-millionenfach Fixierungen und halten eine ganze Anzahl Patente dafür.

Wir bieten unseren Kunden:

kostenlose Schulungen und Beratung incl. umfangreicher Unterlagen.

Unsere **e-learning Plattform INFOCARE**, zur Schulung von neuen Mitarbeitern und zur Auffrischung vorhandener Kenntnisse.

Unsere Fixierungen sind High-Tech Produkte in Deutschland und der Schweiz gefertigt. aus speziell für uns hergestellten Materialien aus der Schweiz, Deutschland und den USA. Sie sind hypoallergen, med. unbedenklich und enthalten keinerlei Lösungsmittel.

Nur durch den Einsatz hochwertiger Materialien in Verbindung mit unseren ergonomischen Formen erreichen wir die erstaunliche Haltekraft unserer Fixierungen.

Unsere Fixierungen halten besser und länger, verursachen in aller Regel keine Hautschäden und müssen weniger häufig gewechselt werden als Andere.

Über den Einsatzzeitraum gerechnet sind sie somit auch kostengünstig.

In die EU liefern wir ab Lager Deutschland!

Unsere Produkte tragen einen QR-Code und sind mit GTIN-Barcodes ausgestattet.

Betrifft: Anwenderschulungen

Das **neue med. Produkte Gesetz**, MDR „Medical Device Regulation“ bringt Änderungen für uns alle. Auch **Medizinprodukte der Klasse 1** dürfen nicht mehr ohne Anwenderschulung eingesetzt werden.

So können wir **keine Produktmuster mehr ohne Einweisung** abgeben. Darüber hinaus haben wir uns praktisch zu vergewissern, dass unsere Produkte richtig angewandt bzw. eingesetzt werden.

Nach **MedBetreibV**, „Medizin Betreiber Verordnung“ hat der Betreiber/Klinik dafür zu sorgen, dass **alle Mitarbeiter** im Gebrauch der vorhandenen Medizinprodukte **geschult sind**. Dies gilt für alle nicht selbsterklärenden Produkte.

Deshalb haben wir ein qualifiziertes Team für laufende **Anwendungsschulungen** aufgebaut. Diese Schulungen sind kostenlos und können auch im laufenden Betrieb erfolgen.

Unser Mitarbeiter/in erklärt die Anwendung, weist auf Anwendungsfehler hin, gibt Hinweise und Tips. Über unsere Schulungsplattform sind **auch Online-Schulungen** möglich.

Der erfolgte Besuch/Schulung **wird dokumentiert** und Sie als Haus erhalten für Ihre Dokumentation eine entsprechende Mitteilung.

Von unserem Team ist auch danach immer jemand für Sie da und zu erreichen.

Diese Schulungen/Einweisungen sind sicher kein Nachteil, durch den richtigen Einsatz der Produkte wird Zeit gespart, es sinkt der Verbrauch und es verbessert sich die Pflegequalität.

Wir alle kommen damit auch den gesetzlichen Vorgaben nach.

TechniMed AG

Peter Piwonka
Direktor



Die original SECUTAPE Standardfixierungen! Seit über 35 Jahren millionenfach bewährt.

Die gut haltenden Fixierungen mit ergonomischer Form sind aus einem atmenden, hochwertigen und besonders hautverträglichen Vlies bzw. Tape.


Einfach in der Anwendung können sie **mehrmals geöffnet** und wieder verschlossen werden. Sie halten auch wenn sie nass werden, z.B. wenn der Patient gewaschen wird oder duscht.

Speziell zur Fixierung von:

PEG, CAPD, ZVK, NFC, Suprapubische Katheter, Infusionen, Urin-Katheter, Redondrainagen, Ports, Wunddrainagen, Sonden zur Druckmessung und allen anderen "Schläuchen"

Hinweis:

Art. Nr. 8500200 klebt besser auf Verbänden,
Art. Nr. 8500201 hält besser auf der Haut!

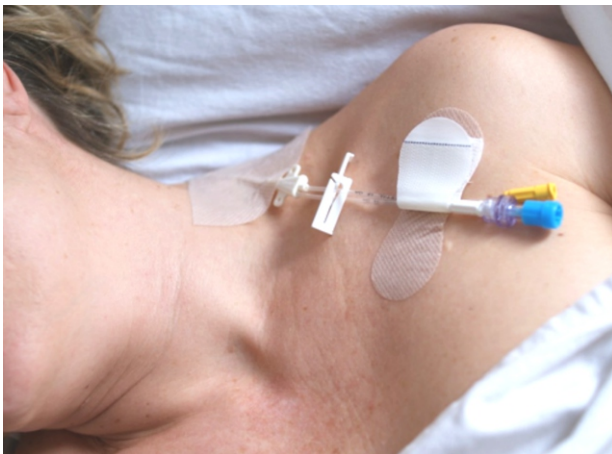

Art. Nr. 8500200 1 VE 200 Stk.
Folie Transpore®
2 Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.
Art. Nr. 8500210 1 VE 1000 Stk.
20 Btl. à 50 Stk.
9 x 3.5 cm




Art. Nr. 8500201 1 VE 200 Stk.
Vliesbasis
2+ Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.
Art. Nr. 8500211 1 VE 1000 Stk.
20 Btl. à 50 Stk.
9 x 3.5 cm



Art. Nr. 8500301 1 VE 200 Stk.
Vliesbasis
3+ Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.
Art. Nr. 8500311 1 VE 1000 Stk.
20 Btl. à 50 Stk.
15 x 4.5 cm

Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 3 - 5 Tage

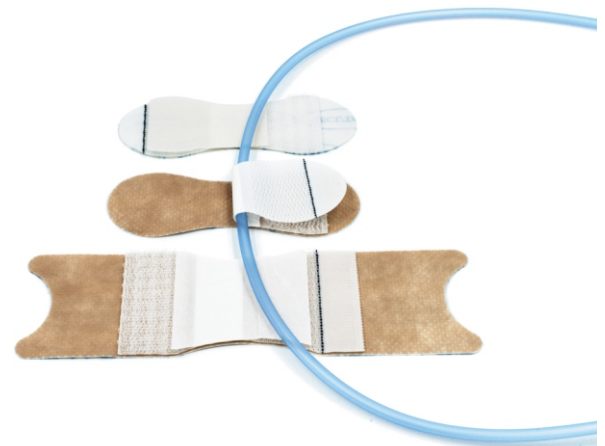



Ein universelles System für alle Anwendungsbereiche und alle Durchmesser!

Fixieren ohne Klebstoff an Schlauch oder Leitung!
Zuverlässig gehalten durch NANOPLAST®
eine neu entwickelte Antirutschfolie mit Gecko Effekt.



Die Fixierung kann beliebig oft geöffnet werden.
Es bleiben keine Rückstände am Schlauch
die **Fixierung hält immer wieder!**

Den Klettbinder gibt es als Set mit 2 verschiedenen Haltern auch in Hydrocolloid für jeden Anwendungsbereich.

Durch die ergonomischen Formen und das hochwertige, atmende und hautschonende Material halten die Fixierungen auch bei häufigem Zug, selbst wenn sie nass werden!

Für implantierte Zu- und Abgänge ist der Klettbinder besonders gut geeignet!


Die NANOPLAST® Folie ist aus Silicon mit ca. 29000 Haftelementen per qcm.

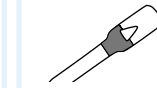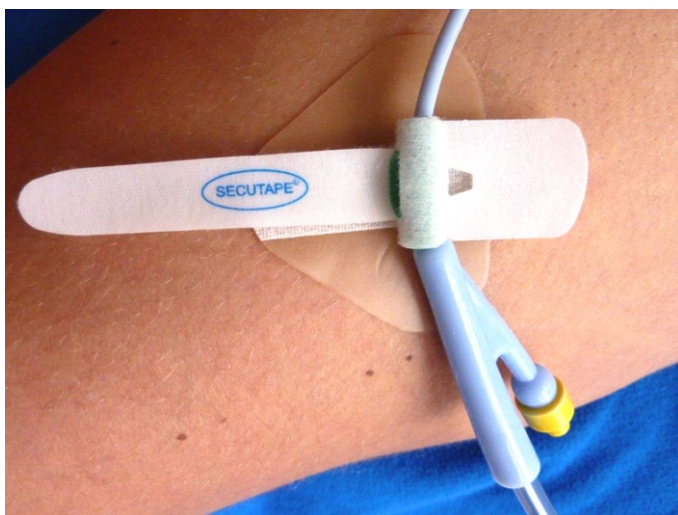

Klettbinder

Art. Nr. 8501000 1 VE 200 St.


Einzelverp. 8 Btl. a 25 St.
13.5 x 2.5 cm

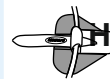

Klettbinder - Set KLEIN Hydrocolloid

Art. Nr. 8501100 1 VE 100 St.

Einzelverp. 4 Btl. a 25 St.
Halter 6.5 x 5 cm

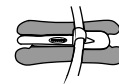

Klettbinder - Set GROSS

Art. Nr. 8501130 1 VE 100 St.

Einzelverp. 4 Btl. a 25 St.
Halter 12 x 6.5 cm



Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3Tage
Hydrocolloid - 6 Tage





Zur Fixierung von "Schläuchen" und Leitungen speziell ZVK!!

UNIFIX eignet sich hervorragend zur sicheren Befestigung von dünneren Kathetern, Sonden und Leitungen, z.B. mehrlumige ZVK..

Die Basis ist ein sehr gut haltender und ergonomisch geformter Halter aus hautschonendem, atmendem Vlies bzw. Hydrocolloid der auch hält wenn er nass wird, z. B. wenn der Patient gewaschen wird oder duscht.


Der Katheter wird im Klebstoffbett mit Klettverschluss sicher gehalten. Der Verschluss lässt sich mehrmals öffnen.



Zur Zugentlastung der z.T. langen Ableitungen empfehlen wir unser **KROKOFIX**, ein rutschfester flexibler Halter der an Kleidung und Bettwäsche befestigt werden kann.

Auf diese Weise werden Zug und Bewegungen z.B. am ZVK verringert, was Entzündungen verhindern hilft.

Krokofix klein Art. Nr. 8501410

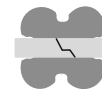

Unifix

Art. Nr. 8501500 1 VE 200 Stk.



8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.

Halter 6 x 6 cm



Unifix Hydrocolloid

Art. Nr. 8501509 1 VE 200 Stk.




8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.

Halter 6.5 x 5 cm

Es können mit UNIFIX auch kleinere Teile z.B. **Filter, Tansducer** o.ä. sicher am Körper befestigt werden.

Liegedauer nach Anwendung:
ca. 3- 6 Tage

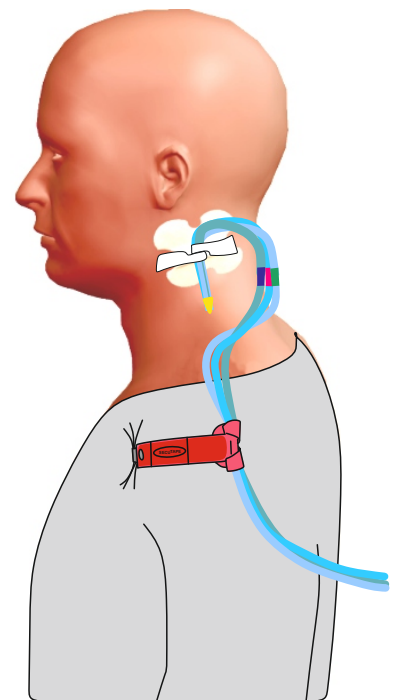



Die ideale Fixierung für dicke "Schläuche".


Mit einer Basis aus einem hautschonenden und atmenden Vlies oder einem Hydrocolloid in spezieller ergonomischer Form mit einem Klettverschluss.

Der Halter hat eine Antirutschbeschichtung die im Gegensatz zu Klebstoff

auch Siliconschläuche sicher hält!

Die Fixierung hält sehr gut, selbst wenn sie nass wird, z.B. wenn der Patient duscht.

Diese Fixierung ist besonders geeignet für Thoraxdrainagen, ECMO, Spülkatheter, Urinkath. u.ä..

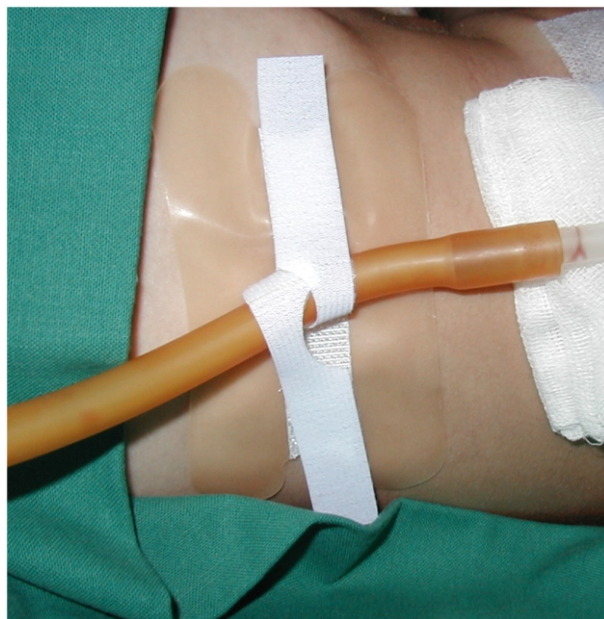

Art. Nr. 8501200

1 VE 100 Stk.


Hydrocolloid

4 Btl. à 25 Stk.

Einzelverp.



Halter 12 x 6.5 cm

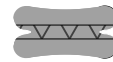

Art. Nr. 8501201

1 VE 100 Stk.

Vlies

4 Btl. à 25 Stk.

Einzelverp.



Halter 12 x 6.5 cm

Liegedauer je nach Anwendung:
bis ca. 4 Tage
Hydrocolloid ca. 6 Tage





Patenterte Fixierung, zweiteilig für alle nasalen Sonden.

Ein ergonomisch geformter Halter mit Klettverschluss, hergestellt aus einem speziellen, hautfreundlichen und atmenden Vlies.

Sowie einem Haltebändchen mit Klebefläche.


Der Halter bleibt auf der Nase, wenn nötig wird nur das Bändchen gewechselt.

Durch den Klettverschluss lässt sich die Sonde locker befestigen, es entstehen keine Druckstellen in der Nase.

Auch gibt es keine Hautschäden mehr durch ständiges abreißen der Pflasterstreifen.

Eine aufwändige Hautpflege entfällt!

Die Fixierung hält auch wenn sie nass wird, z.B. wenn der Patient gewaschen wird.

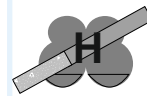


Nasal-Set Hydrocolloid

Art. Nr. 8500400 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Halter 4.4 x 3.5 cm

Bändchen 7.5 x 0.8 cm

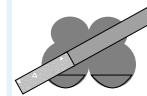


Nasal-Set Vlies-Basis

Art. Nr. 8500401 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Halter 4.4 x 3.5 cm

Bändchen 7.5 x 0.8 cm

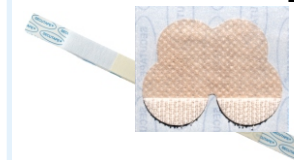


Nasalhalter Vlies-Basis

Art. Nr. 8500410 1 VE 400 Stk.

Verp. Kärtchen à 4 Stk.
Einzelverp.

Halter 4.4 x 3.5 cm

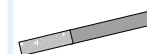

Nasalbändchen

Art. Nr. 8500440 1 VE 500 Stk.

Verp. Kärtchen à 5 Stk.
Einzelverp.

Bändchen 7.5 x 0.8 cm



Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 2-3 Tage
Hydrocolloid - 5 Tage



Das Original SECUTAPE Tubus-Fixier-Set! Seit über 35 Jahren millionenfach bewährt.

Zwei Halter aus sehr gut haftendem und hautschonendem Vlies oder Hydrocolloid mit Klettverschluss.


Hypoallergene **nicht dehnende Nylonbänder** die keine Feuchtigkeit aufnehmen.

Die Bänder sind mittig mit einem med. Klebstoff beschichtet der Kunststoffe nicht angreift!

Das gut haltendes System ermöglicht einfaches und sicheres **Absaugen durch nur eine Person**. Einfach in der Anwendung ist es durch lange Verweildauer preiswert im Gebrauch.

Das Fixierband Standard ist einseitig flauschig.

Das Softband ist doppelseitig flauschig, was Hautschäden verhindern hilft.

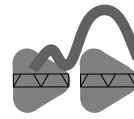


Art. Nr. 8500609

Hydrocolloid



1 VE 100 Stk.
4 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Set

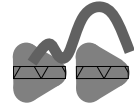


Art. Nr. 8500600

Vlies



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Set

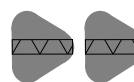

Art. Nr. 8500700



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
zwei Stk.
Halter 6.5 x 5 cm



Art. Nr. 8500709

Hydrocolloid



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Halter 6.5 x 5 cm



Fixierband
standard

Art. Nr. 8500800



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Band Länge 40cm



Softband
hautfarben

Art. Nr. 8500805



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Band Länge 40cm

Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3Tage
Hydrocolloid - 5 Tage



Fixier-Set für Endotrachealtuben oral/nasal



Anwenden

Fixier-Set EXTRA für Endotrachealtuben Unser bewährtes Fixier-Set mit neuem Band!

Ein neuentwickeltes, doppelseitig flauschiges Nylonband, hypoallergen und **mittig geschlitzt**.

Zwei Halter aus sehr gut haftendem und hautschonendem Vlies mit Klettverschluss.


Durch den Schlitz lässt sich das Band **besser und exakter positionieren!**

Das hochwertige Band nimmt keine Feuchtigkeit auf und **dehnt sich nicht**.

Am Tubus wird es mit einem high-tech Klettstreifen befestigt.

Beim Entfernen bleibt kein Klebstoff am Tubus.

Eine sichere Fixierung mit langer Verweildauer, einfach in der Anwendung!

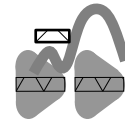

Fixier-Set EXTRA

Art. Nr. 8500610 1 VE 200 Stk.


Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Band Länge 40cm

Beide Komponenten sind auch einzeln erhältlich.



Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3 Tage

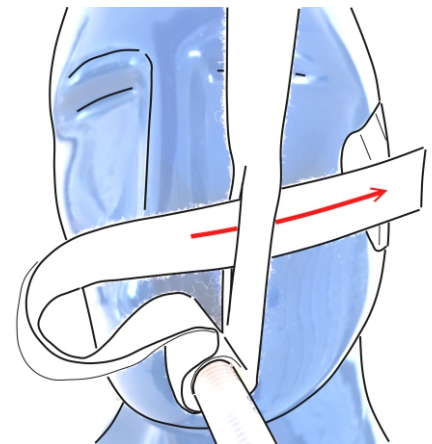

CE

Made in Germany

www.secutape.ch



Kurzzeit-Fixierband selbstklebend für Endotrachealtuben.



Anwenden

Fixierband für Endotrachealtuben zur Kurzzeitfixierung.

Speziell für den **Einsatz in der Anästhesie!**

Neu entwickeltes, hochwertiges, selbstklebendes Fixierband.

Das **einfach** anzuwendende und hervorragend klebende Tape-Band ist **reissfest und dehnt sich nicht**.

Hygienisch verpackt in einer Spenderschachtel, ist es auf Grund seiner Form und des speziell gestanzten Abdeckpapiers einfach im Handling.

Die Schachteln sind perforiert und können an der Front geöffnet werden, was die Entnahme und die Aufbewahrung erleichtert.



Kurzzeit-Fixierband

Art. Nr. 8500820 1 VE 400 Stk.

Schachteln a. 100 Stck.

Länge 37cm



Liegedauer je nach Anwendung:
bis 24 Std.

**Das Band ersetzt nicht die
korrekte Langzeitfixierung.**



Made in Germany

www.secutape.ch



SECUTAPE® Tubus-Band SILICON

Ein patentiertes, hypoallergenes, weiches Nylonband, das sich **nicht dehnt und keine Flüssigkeit aufnimmt**.

Durch die Siliconbeschichtung hat das Band **keine harten Kanten** und sie **verhindert das Verrutschen auf der Haut**.


Man muss das Band auch nicht straff spannen.

So entstehen **keine Hautschäden** mehr durch Feuchtigkeit oder starken Zug.

Am Tubus wird das Band von einem selbstklebenden Klettstreifen zuverlässig gehalten. Es bleiben beim Ablösen keine Rückstände.

Das Band ist einfach in der Handhabung und muss wesentlich **weniger oft gewechselt werden** als herkömmliche Schaumstoffbänder.

Modernste Klettverschluss Technik für sicheren Halt.

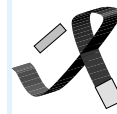

Tubus-Band

Art. Nr. 8500850 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Länge 75 cm



Liegedauer je nach Anwendung:
bis 2 Tage



SECUTAPE Tubus-Band Silicon 8500850



Für Endotrachealtuben & Trachealkanülen.

Neu entwickeltes weiches, doppelseitiges Nylonband, hypoallergen und angenehm flauschig.


Das Band **dehnt sich nicht** und saugt sich nicht voll Flüssigkeit.

Auf Grund seiner Materialeigenschaften muss es wesentlich **weniger häufig gewechselt** werden als herkömmliche Schaumstoff- bzw. Textilbänder.

Es entstehen **weniger Hautschäden** durch Druck und Feuchtigkeit, da man es nicht wie üblich straff anlegen muss!

Vielseitig einsetzbare **multifunktionale** und sichere Fixierung, geringerer Verbrauch, einfach in der Handhabung.

Ein Produkt für beide Anwendungen, sie können aber z.B. auch eine Leitung am Bein damit befestigen!

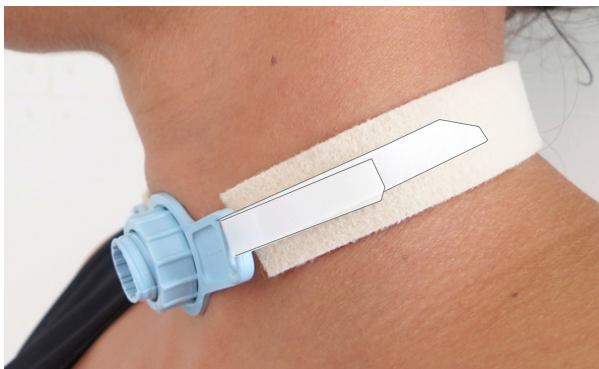

Universal-Band

Art. Nr. 8500890 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Länge 75 x 2 cm



Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 1 - 2 Tage





Für Endotrachealtuben.


Neu entwickelte doppelseitige Nylonbänder,
Hypoallergen und angenehm flauschig.
Die Bänder dehnen sich nicht!

Das bewährte weiche **Fixierband** (Softband) ist mittig mit einem med. Klebstoff beschichtet der um den Tubus gewickelt diesen sicher hält.

Das breitere dickflauschige **Halteband**, das um den Hals gelegt wird, ergibt in Verbindung mit dem Fixierband eine ausgesprochen sichere Tubusfixierung.

Die Fixierung kann bei Patienten mit Hautschäden problemlos eingesetzt werden.

Sehr gut haltende Fixierung, einfach in der Handhabung, auf Grund der Materialeigenschaften entstehen keine Druckstellen.

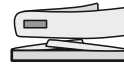

Soft-Set

Art. Nr. 8500900 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Zweiteilig



Das Halteband (Softband) ist auch einzeln erhältlich.

Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 1 - 3 Tage





Fixierband für Trachealkanülen D.B.G.M.

**Vorteile durch neue Materialien!
Eine Grösse für alle!**

Neu entwickeltes dickes, weiches **Superflauschband** aus Nylon, hydrophob und hypoallergen.


Das zweiteilige Band **dehnt sich nicht**, ist einfach anzulegen, variabel verstellbar und saugt sich **nicht voll Flüssigkeit**.

Da es nicht feucht wird ist es angenehm zu tragen.

Auf Grund seiner Materialeigenschaften muss es **weniger häufig** gewechselt werden als herkömmliche Schaumstoff- oder Textilbänder!

Das Band passt für die meisten Halsweiten, bei Überlänge einfach kürzen.

Weniger Verbrauch, weniger Arbeitsaufwand, weniger Müll.

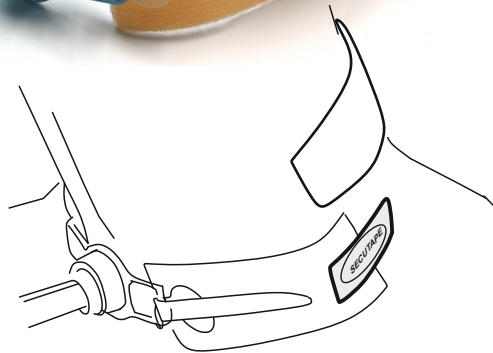

Bei Hautschäden oder stark schwitzenden Patienten empfiehlt sich unser Pad aus **med. Superabsorber**. Es ist selbstklebend und hält den Hals zuverlässig trocken.

Damit lassen sich Hautschäden verbessern bzw. zuverlässig vermeiden!

Ideal zur Langzeitfixierung!




Tracheofix Comfort

Art. Nr. 8501750 1 VE 100 Stk.

Einzelverp. 4 Btl. à 25 Stk.

Länge 50 x 3cm

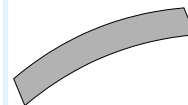

Superabsorber Pad

Art. Nr. 8501770 1 VE 100 Stk.

Einzelverp. 4 Btl. à 25 Stk.

Länge 20 x 4cm



Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 3 Tage
mit Absorber Pad ca. 5 Tage.





Verstellbarer Kopfhalter zur Fixierung einer veno-arteriellen ECMO.

Der elastische Kopfhalter aus flauschigem Nylon ist auf **jede Kopfgröße** einstellbar.

Er ist in Verbindung mit dem Fixierbändchen, und den Hydrocolloidhaltern eine sehr sichere Fixierung die dem Patienten ein gewisses Mass an Bewegungsfreiheit lässt.

Das Material **saugt sich nicht voll** Feuchtigkeit wie z.B. Schaumstoff und wird deshalb **nicht locker**.

Durch die zusätzliche Fixierung der Leitungen am Hals verringert sich die Belastung an der Austrittsstelle.

Die im Set enthaltenen Krokofix dienen zur Zugentlastung der weiteren Ableitung an der Bettwäsche.



Kopfhalter-Set:ECMO

Art. Nr. 8501610, VE 10 Set



Die Fixierhalter und Krokofix sind auch einzeln erhältlich.



Bei Krokofix rutschen Leitungen nicht durch!

Krokofix ist eine manuelle **rutschhemmende Befestigung** für Schläuche oder Leitungen aller Art.



Zur sicheren Befestigung von Zu- und Ableitungen an Kleidung und Bettwäsche.

Spezielle Streifen aus Antirutschmaterial sorgen für sichere Fixierung!

Krokofix wird mit einer **Edelstahlklammer** an Kleidung oder Bettwäsche befestigt und ist mit üblichen Mittel zu desinfizieren.

Zum Einsatz bei mobilen Patienten und oder grosser Zugbelastung.

Krokofix gross wird hauptsächlich für Beatmungsschläuche eingesetzt.

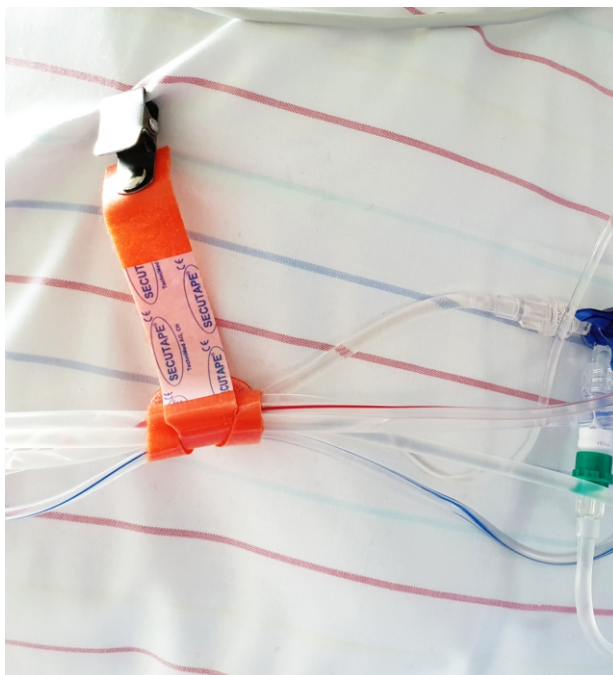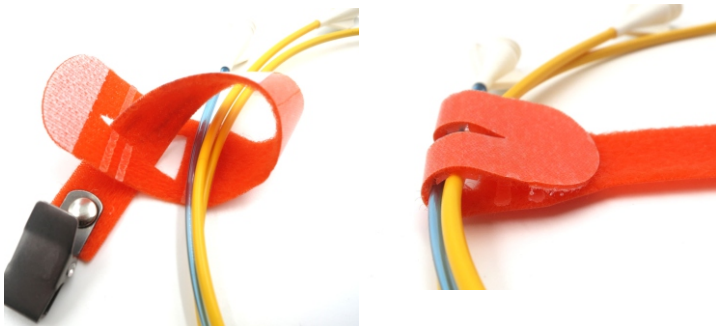


 **Krokofix klein**

Art. Nr. 8501410 1 VE 200 Stk.
8 Beutel zu 25 St.




 **Krokofix gross**


Art. Nr. 8501420 1 VE 200 Stk.
8 Beutel zu 25 St.

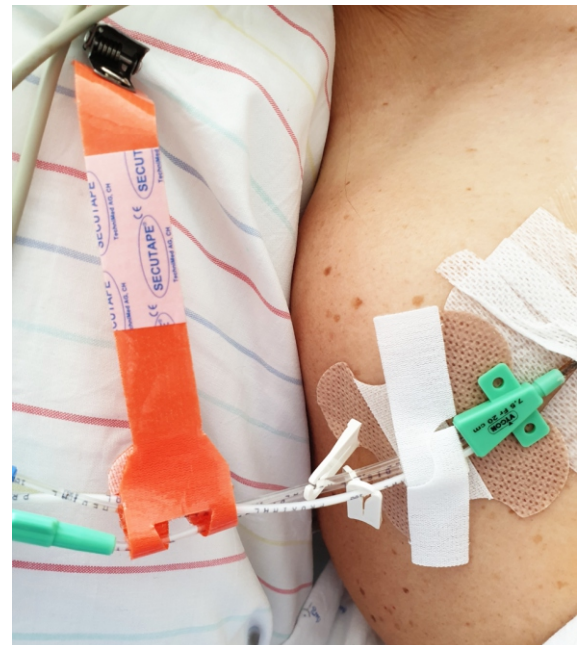

Anwendungsbereiche

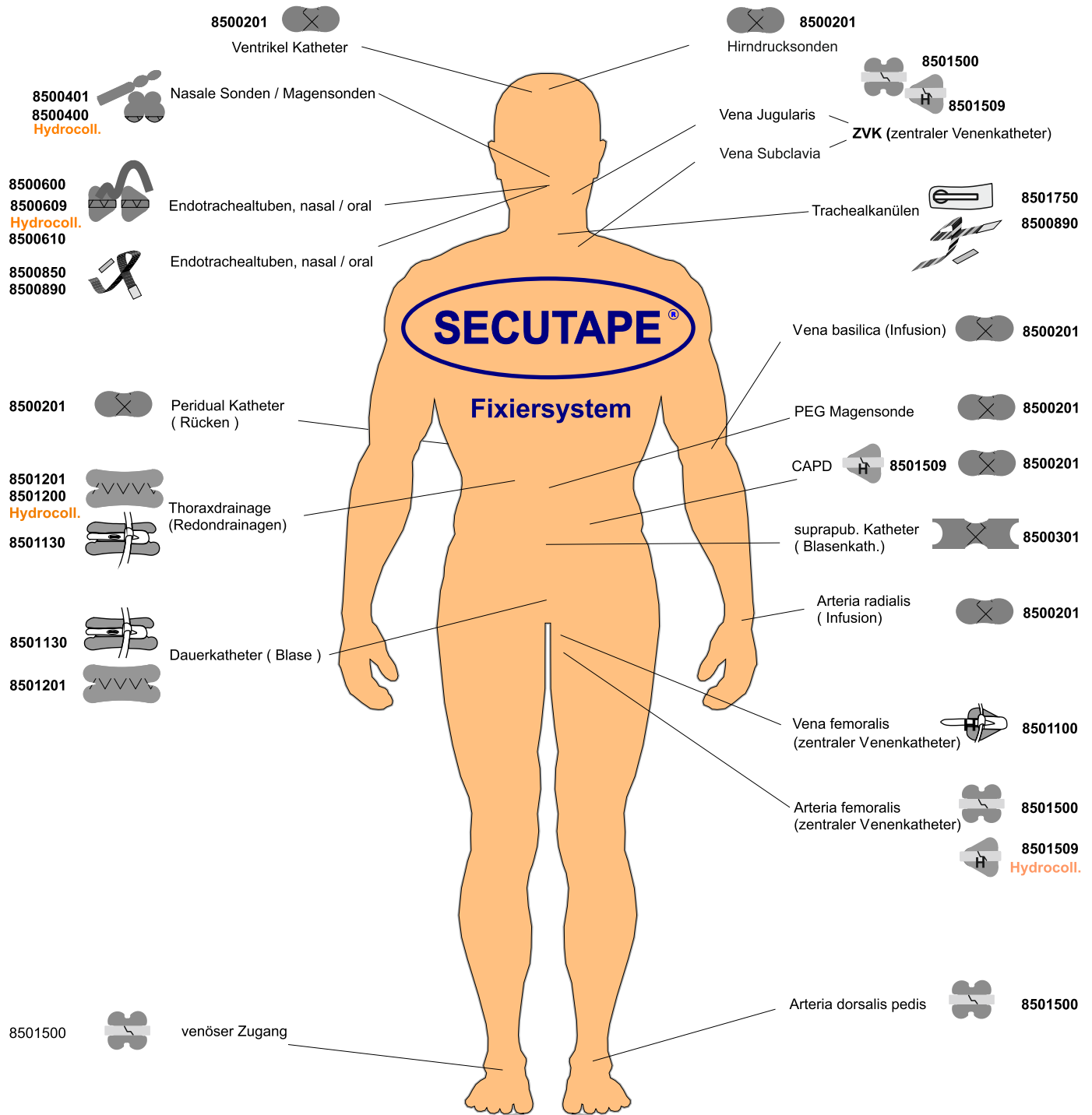

für Schläuche und Leitungen
an Bettwäsche oder Kleidung

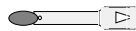


8501410



SECUTAPE®

**FIXIERUNG
FIXATION
FISSAGGIO**

lieber sicher SECUTAPE

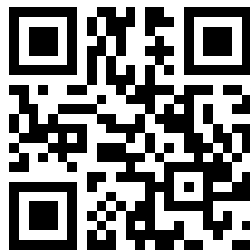

www.secutape.ch

