




Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

SECUTAPE®

SECUTAPE 
1986 - 2024 
ANS

Système de fixation

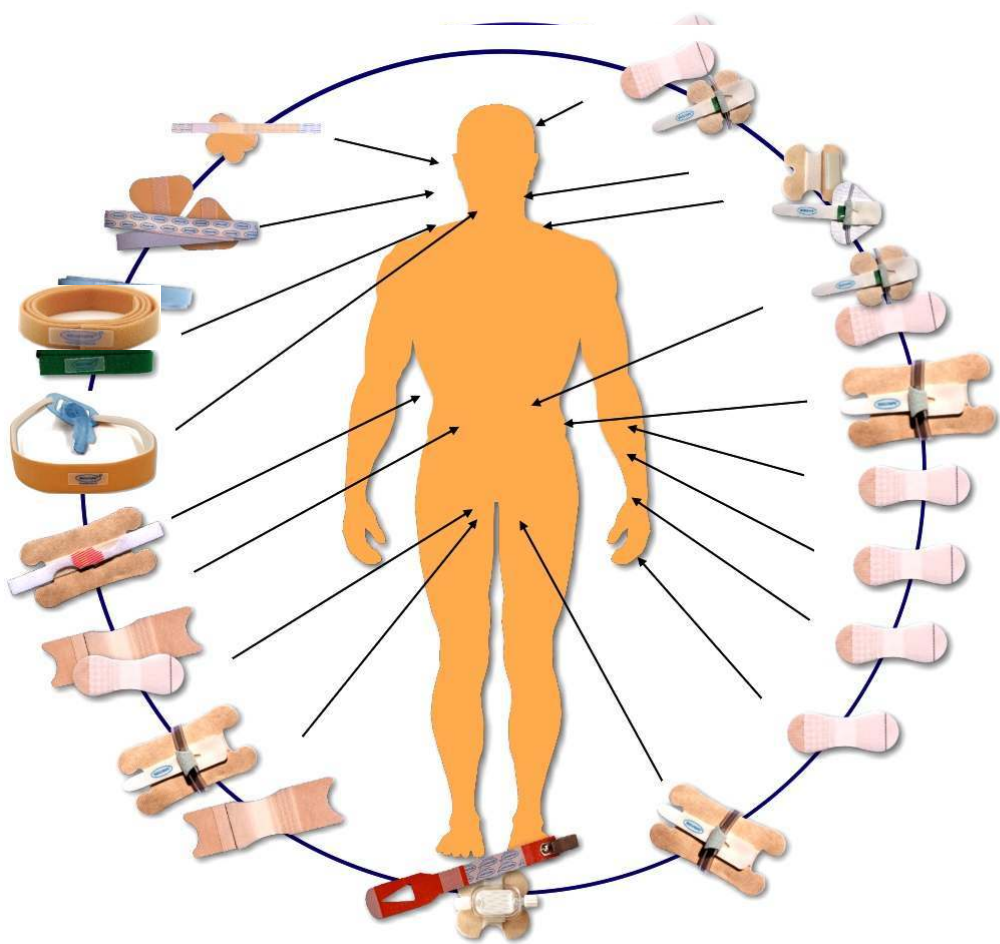

CATALOGUE

Nous offrons formations gratuites de produits!

 **TechniMed AG**
SWITZERLAND since 1987
fon 0041 / 71 844 49 20

Kirchstrasse 54 **Germany**
CH-9400 Rorschach **fon** 0800 007 9892
fax 0041 / 71 845 52 45 **fax** 0800 941 3012
mail: info@technimed.ch

Austria
fon 01/ 440 7979
fax 01/ 440 7990

CE
Made in Germany
www.secutape.ch
Copyright by TechniMed AG

SECUTAPE®

Le principe SECUTAPE

Le support de base colle complètement à la peau. Il n'y a pas d'angle partiellement décollé!


Le tube est posé sur le point collant. Une languette velcro empêche l'ouverture!

Les mouvements du tube sont transférés sur tout le support via la languette. La fixation tient parfaitement!

Toutes les fixations SECUTAPE travaillent sur le même principe.

Chez toutes les fixations, le tube peut être enlevé de la languette velcro et de nouveau remis sûr!

Ce principe a été patenté en 1986!

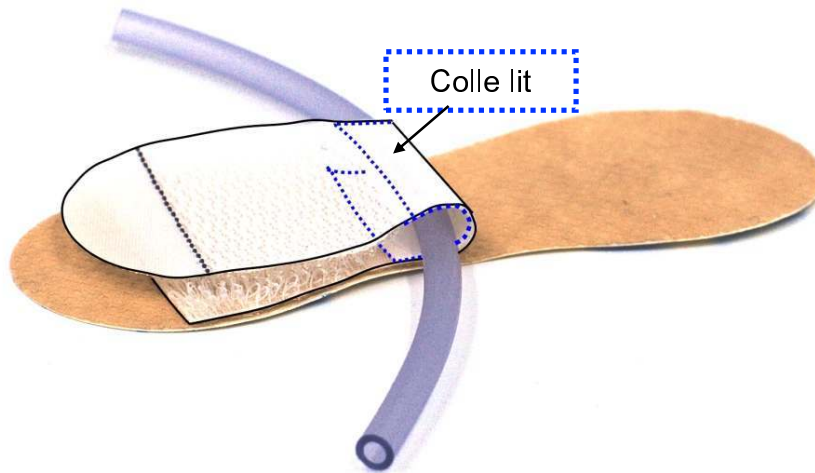

Made in:

Nous attachons une grande importance à une bonne qualité de nos produits fabriqués entièrement en Allemagne.

Les adhésifs et silicones proviennent de la Suisse. Les fermetures velcro sont faites en Allemagne et en Suisse - spécialement pour notre maison - selon nos spécifications. Elles sont tissées ou tricotées de fils de haute qualité.

Contrairement aux produits étrangers ils ne contiennent pas de solvants.


Nos Tapes proviennent de l'Allemagne et des Etats-Unis; l'Hydrocolloïde du Royaume-Uni. Tous les matériaux utilisés sont hypoallergéniques et méd sûr.

Seulement en utilisant des matériaux de haute qualité nous arrivons à la force de maintien incroyable de nos fixations.

Bonne qualité ne peut pas être pas cher..

Au cours de la période d'utilisation nos fixations doivent être considérées comme favorables. Elles tiennent mieux, ne causent pas de dommages à la peau et peuvent rester plus longtemps au patient.

**Prenez nous au mot et testez nos produits !
Dans l'UE nous livrons de l'entrepôt Allemagne.**

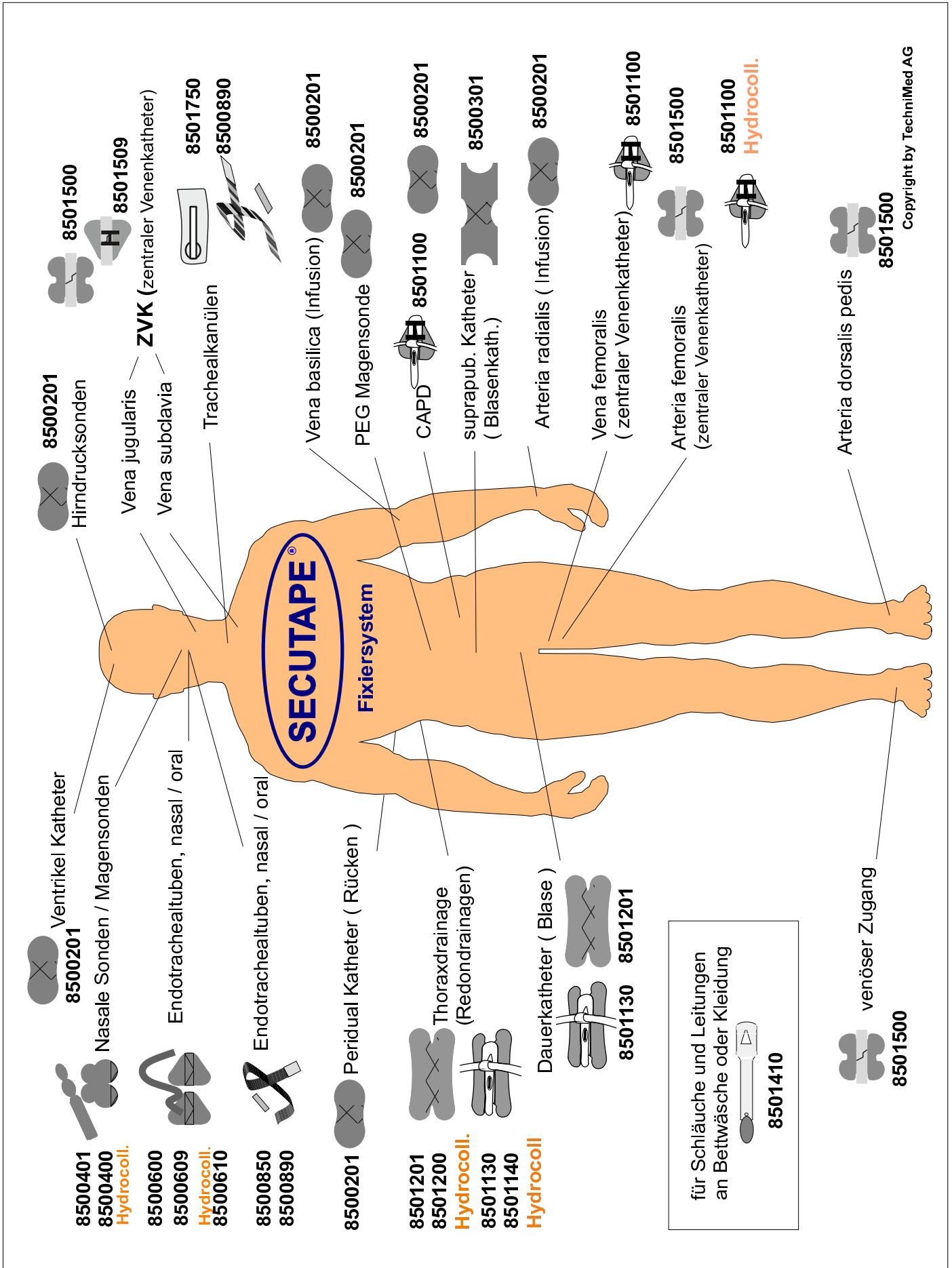

SECUTAPE® Fixierungen können in der Regel einige Tage am Patienten verbleiben und bieten die unter den Gegebenheiten bestmögliche Fixierung !!



Originalgrösse





Tailles 2 / 2+ / 3+ Fixations standard



Appliquer

SECUTAPE: Les fixations standard ORIGINALES!

Éprouvées dès 35 ans millions de fois

Les fixations tenant bien ont une forme ergonomique et sont faites d'un non-tissé ou d'un tape qui respire, de haute qualité et particulièrement bien toléré par la peau.

Faciles à utiliser, elles peuvent être ouvertes et refermées plusieurs fois. Elles tiennent également lorsqu'elles sont mouillées, par exemple lorsque le patient est lavé ou sous la douche.

Fixation spécialement pour:

PEG, CAPD, ZVK, cathéters suprapub, infusions, cathéters vessie, drainages redon, ports, drainages de blessure, sondes pour mesurage de la pression et tous les autres tubes.

Indication:

Art. No 8500200 colle mieux sur les bandages,
Art. No 8500201 tient mieux sur la peau!



Art. No 8500200 1 emb. à 200 p.
emball. séparé. 8 sacs à 25 p.

Art. No 8500210 1 emb. à 1000 p.
20 sacs à 50 p.



Art. No 8500201 1 emb. à 200 p.
emball. séparé. 8 sacs à 25 p.

Art. No 8500211 1 emb. à 1000 p.
20 sacs à 50 p.



Art. No 8500301 1 emb. à 200 p.
emball. séparé. 8 sacs à 25 p.

Art. No 8500311 1 emb. à 1000 p.
20 sacs à 50 p.



Durée d'utilisation:
environ 4 - 5 jours



Made in Germany
www.secutable.ch



Originalgrösse





Système de fixation LIANT VELCRO



Appliquer

Les fixations de la prochaine génération!

Système universel pour toutes les circonstances et pour tuyaux quelconques!

Le LIANT VELCRO tient le tube sûr **sans adhésif** grâce au nouveau film **anti-glisse NANOPLAST®** avec effet Gecko!

La fixation peut être **ouverte et refermée à tout moment sans laisser de résidu** au tube. La fixation tient toujours sûre!



Le Liant Velcro est disponible comme Set avec de différents supports - **aussi en hydrocolloïde** - selon l'application.

Grâce au matériels de bonne qualité, respirants et doux pour la peau, la fixation tient aussi si elle est **mouillée**, p.ex. durant la **douche** du patient.

Le film **NANOPLAST®** est fait de silicone. Il est donc particulièrement adapté pour la fixation **de longue durée!**

	Liant velcro Art. No 8501000 emb.200 p. emball.séparé 8 sacs à 25 p.
	Liant velcro - Set PETIT Hydrocolloïde Art. No 85001100 emb.100 p. emball.séparé 4 sacs à 25 p.
	Liant velcro - Set GRAND Art. No 8501130 emb.100 p. emball.séparé 4 sacs à 25 p.



Durée d'utilisation:
environ **3 jours**
Hydrocolloïde: - 6 jours

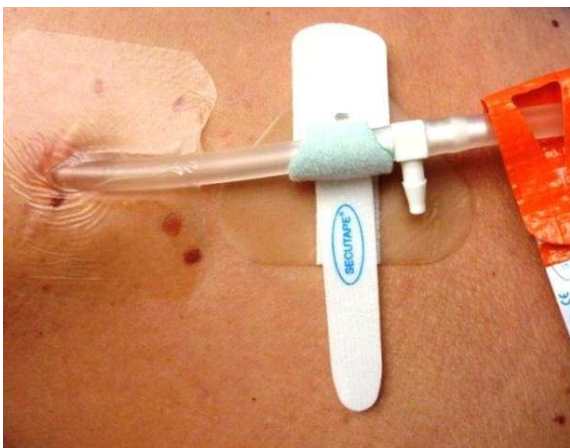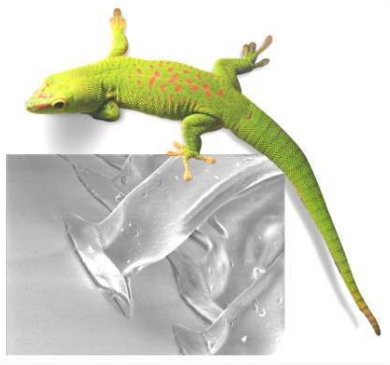

Made in Germany
www.secutape.ch



Originalgrösse

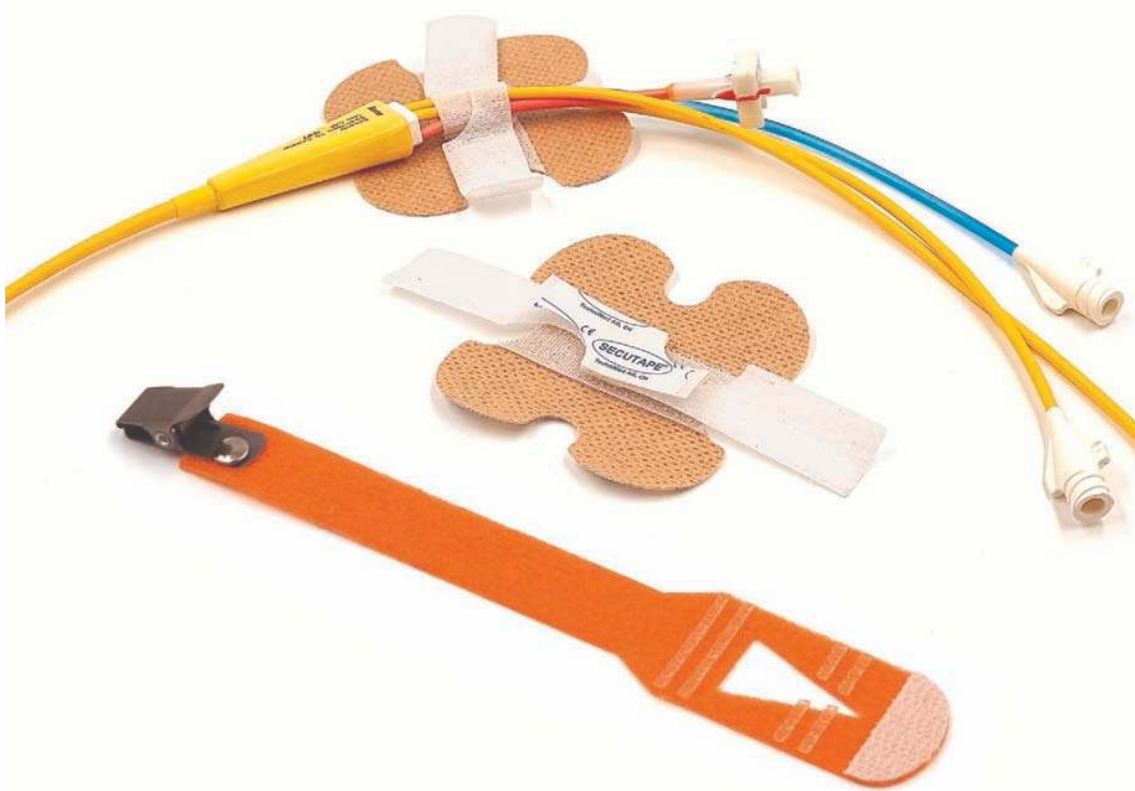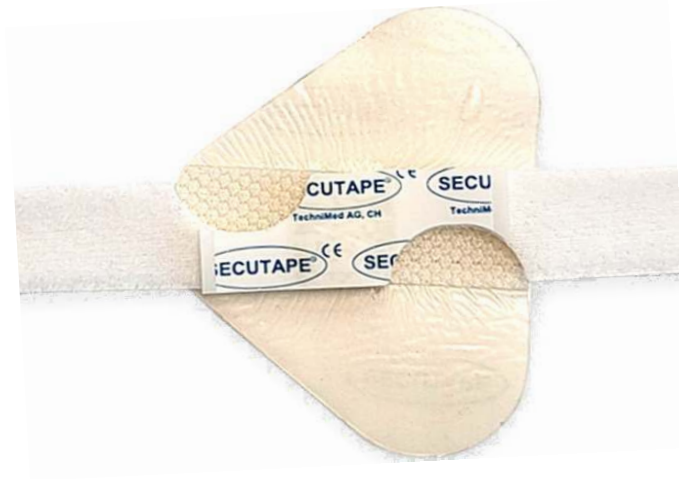

CE
Made in Germany
www.secutape.ch



Unifix



Appliquer

Pour fixation de tubes et drainages spécialement de ZVK!!

UNIFIX en deux parties est idéal pour **fixation sûre** de fins cathéters, sondes et drainages, p.ex. de multiple cathéters veineux central. p.ex. de multiple ZVK..

La base est un support de très bonne tenue, de forme ergonomique spéciale, en non-tissé respirant et doux pour la peau, qui tient même lorsqu'il est mouillé, par exemple lorsque le patient est lavé ou sous la douche.

Le cathéter est maintenu solidement sur un adhésif avec une fermeture velcro.



Pour soulager la traction des drainages parfois longs, nous recommandons notre **KROKOFIX**, un support flexible antidérapant qui peut être fixé aux vêtements et aux draps

Ainsi, la traction et les mouvements au ZVK sont réduites, ce qui contribue à prévenir l'inflammation.

Krokofix petit Art.No 8501410





Unifix
Art. No 8501500 1 emb. 200 p.
8 sacs à 25 p. emball.séparé
Fixation 6.5 x 5 cm



Unifix Hydrocolloid
Art. Nr. 8501509 1 emb. 200 p.
8 sacs à 25 p. emball.séparé
Fixation 6.5 x 5 cm

UNIFIX peut aussi être utilisé pour fixer solidement aux corps de **petites pièces** telles que **filtres**, des **transducer**, etc.

Durée d'utilisation:
environ 3 - 6 jours

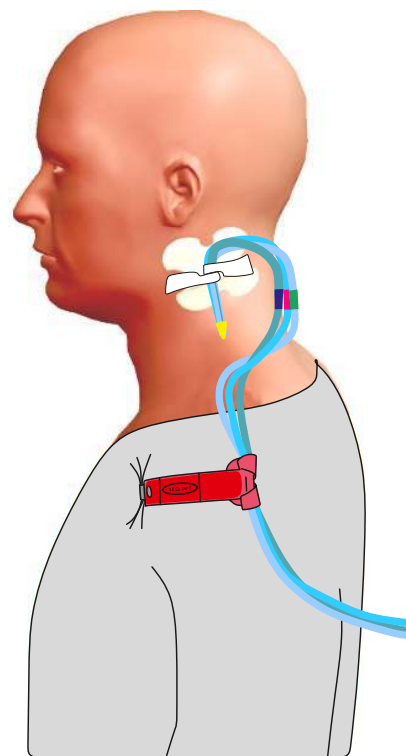

CE

Made in Germany
www.secutape.ch



Originalgrösse





Set de fixation pour grande lumina



Appliquer

La fixation idéale pour tubes épais.

Fixation très sûre fabriquée de non-tissé ou hydrocolloïde **respirant et doux pour la peau**. La fixation tient même si elle est mouillée, p.ex. durant la douche du patient.

Le pansement dispose d'un **revêtement anti-dérapant** spécial que, contrairement à l'adhésif, tient solidement bien les tubes de silicone !

La fixation est appropriée spécialement aux drainages thoraciques, ECMO, drainages de rincer et similaire.



Art. No 8501200 1 emb. 100 p.
Hydrocolloïde 4 sacs à 25 p.
emballage séparé



Fixation
12 x 6.5 cm



Art. No 8501201 1 emb. 100 p.
Non-tissé 4 sacs à 25 p.
emballage séparé



Fixation
12 x 6.5 cm


Durée d'utilisation:
environ 4 jours;
Hydrocolloïde 6 jours.



Made in Germany
www.secutape.ch



Originalgrösse

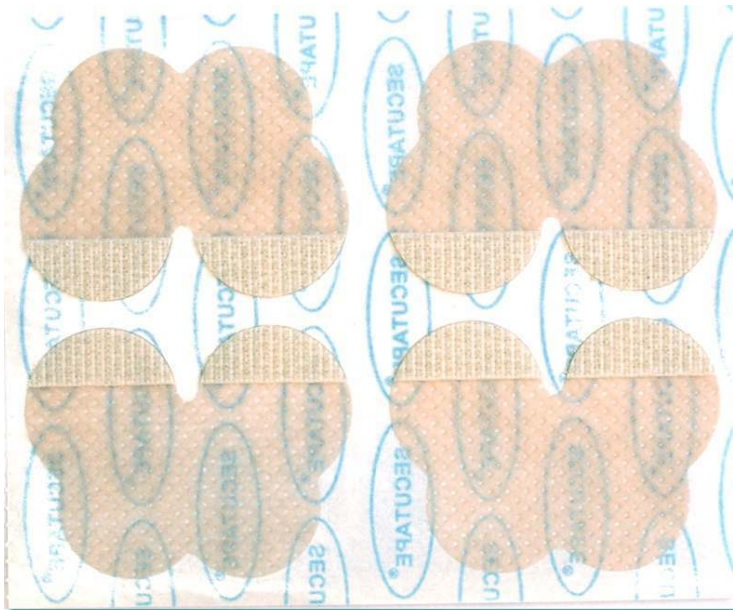



Fixation en deux parties brevetée pour toutes les sondes nasal.

Support de fixations avec une forme ergonomique, constitué d'un tissu polaire respirant et doux pour la peau.

Ainsi qu'une **bandelette** avec fermeture à velcro et surface adhésive.

Le support reste sur le nez. Si nécessaire, seule la bandelette est changée.

Il n'y a **pas de lésions cutanées**.
Il n'y a **pas besoin de soins de la peau** qui prennent du temps !


En raison de la fixation par velcro, la sonde peut être fixée sans attacher, le résultat est pas de points de pression sur le nez.

La fixation tient même si elle est mouillée.
Par exemple, lorsque le patient est lavé.




Art. No 8500400 **1 emb. 200 p.**
Hydrocolloide
8 sacs à 25 p. emb.séparé
Fixation 4.4 x 3.5 cm
Bandelette 7.5 x 0.8 cm

Set



Art. No. 8500401 **1 emb. 200 p.**
Non-tissé
8 sacs à 25 p. emb. séparé
Fixation 4.4x3.5 cm
Bandelette 7.5x0.8 cm

Set



Art. No 8500410 **1 emb. 400 p.**
Cartes à 4 p.
emb. séparé
Fixation 4.4 x 3.5 cm



Art. No 8500440 **1 emb. 500 p.**
Cartes à 5 p.
emb. séparé
Bandelette 7.5 x 0.8 cm

Durée d'utilisation:
environ 2-3 jours.
Hydrocolloide: jusqu'à
5 jours.



Originalgrösse



SECUTAPE®

Set de fixation

pour tubes endotrachéaux oral & nasal



Appliquer

Éprouvées dès 35 ans millions de fois Set original fixation pour tubes endotrachéaux!

Deux pansements fabriqués en non-tissé ou hydrocolloïde très sûrs et doux pour la peau, avec velcro.

Une **bande de nylon** hypoallergénique **n'absorbant pas l'humidité** et qu'au centre est affiché par un adhésif spécial.

L'adhésif n'attaque pas les plastiques

Ce système permet une **aspiration sûre et simple**.
Très facile et sûr à utiliser et **avantageux** grâce à une longue durée!

Le ruban standard est **pelucheux d'un côté**.
La bande souple est **pelucheuse des deux côtés**, qui permet de prévenir des dommages cutanés.



 Art. No 8500609 **1 emb. 100 p.**
Hydrocolloïde 4 sacs à 25 p.
emball. séparé


 Set


 Art. No 8500600 **1 emb. 200 p.**
Non-tissé 8 sacs à 25 p.
emball. séparé


 Set


 Art. No 8500700 **1 emb. 200 p.**
8 sacs à 25 p.
emball. séparé
deux pièces

 Fixation 6.5 x 5 cm

 Art. No 8500709 **1 emb. 200 p.**
Hydrocolloïde 8 sacs à 25 p.
emball. séparé

 Fixation 6.5 x 5 cm

 Art. No 8500800 **1 emb. 200 p.**
8 sacs à 25 p.
emball. séparé

 Bandelette 40 cm

NOUVEAU  **Ruban doux**
Art. No 8500805 **1 emb. 200 p.**
8 sacs à 25 p.
emball. séparé

 Bandelette 40 cm

Durée d'utilisation: environ 4 jours; **Hydrocolloïde**: 6 jours.

CE

Made in Germany
www.secutape.ch



Originalgrösse
Band 40 cm





Set de fixation pour tubes endotrachéaux oral / nasal



Appliquer

Set de fixation EXTRA

Notre Set de fixation prouvé avec bande nouvelle!

Deux supports de toison **bien adhérents et doux pour la peau** ou bien en hydrocolloïde avec velcro.


Bande nouvellement développée, **entaillée**, double face, moelleuse nylon, hypoallergénique.

Elle se laisse **positionner mieux et plus exacte grâce à la fissure**

Elle **n'absorbe pas l'humidité et ne s'étend pas.**

Elle est fixée au tube par une bande velcro **de haute technologie**. Lorsqu'on l'enlève, il **ne reste pas d'adhésif** sur le tube.

Une fixation sûre avec un long temps de rétention, facile dans l'application

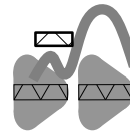

Set Fixation EXTRA

pour tubes endotrachéaux


Art. No 8500610 1 emb. à 200 p.
emb. séparé 8 sacs à 25 p.

Les deux composants sont disponibles séparément.

Bandelette 40 cm



**Durée d'utilisation:
environ 4 jours**

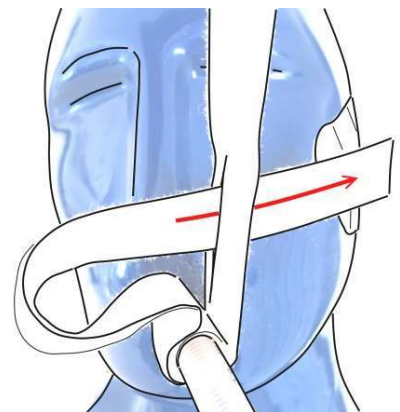

CE

Made in Germany

www.secutape.ch



Länge 37 cm



Made in Switzerland
www.secutape.ch



Bande de fixation à court terme auto-adhésive pour tubes endotrachéaux



Appliquer


Bande de fixation à court terme pour tubes endotrachéaux

Nouvellement développée, de haute qualité, **auto-adhésive**, spécialement conçue pour l'anesthésie.

La bande adhésive colle parfaitement et est résistante **à la déchirure et elle ne s'étire pas.**

Emballée de manière hygiénique dans une boîte distributrice, elle est facile à manipuler grâce à sa forme et à son papier de couverture spécialement perforé.


Les boîtes sont perforées et peuvent être ouvertes à l'avant pour faciliter le retrait et le stockage.

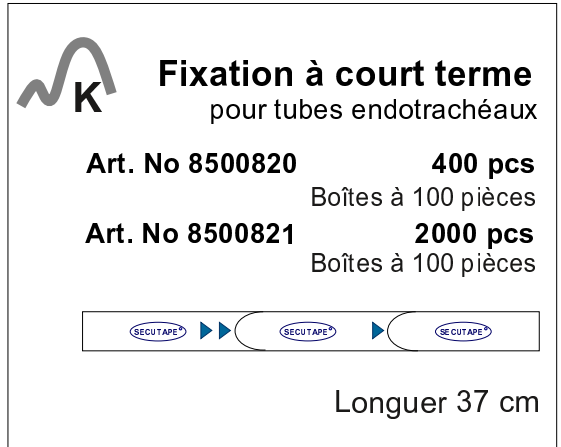

Fixation à court terme
pour tubes endotrachéaux

Art. No 8500820 **400 pcs**
Boîtes à 100 pièces


Art. No 8500821 **2000 pcs**
Boîtes à 100 pièces



Longuer 37 cm

**La bande ne remplace pas
la fixation correcte à long
terme**



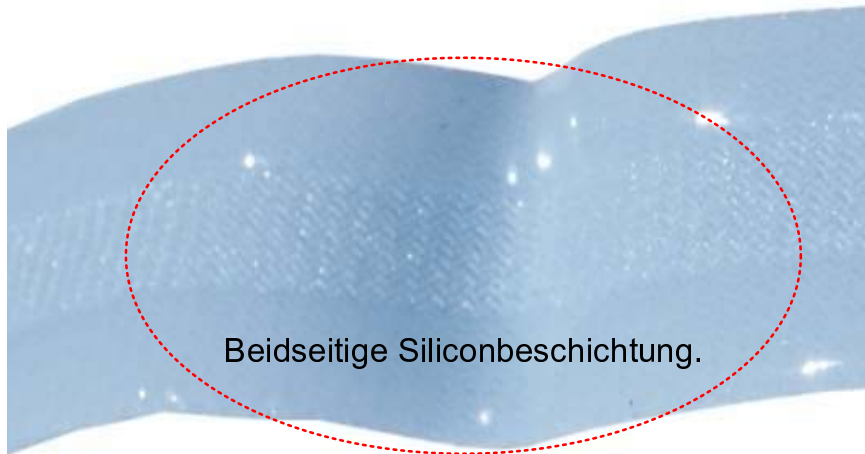

Beidseitige Siliconbeschichtung.



Bande tubus pour tubes endotrachéaux



Appliquer

SECUTAPE® Bande tubus SILICONE

Une bande brevetée, hypoallergénique, douce en Nylon. Elle **ne s'étire pas** et **n'absorbe aucun liquide**.

En raison du revêtement de **silicone** sur une face la bande n'a pas de bords durs et **ne glisse pas sur la peau**.


Il ne doit l'être, en raison de ses propriétés **ne pas être trop serré**.

Ceci et les propriétés hydrophobes de la bande prévenissent en grande partie les dommages cutanés .

Le ruban adhésif est fixé au tube par un velcro autocollant et peut être retiré en laissant aucun résidu.

Il est facile à appliquer et doit être essentiellement **échangé moins souvent** que les bandes conventionnelles.

La dernière technologie de velcro pour un soutien sûr.

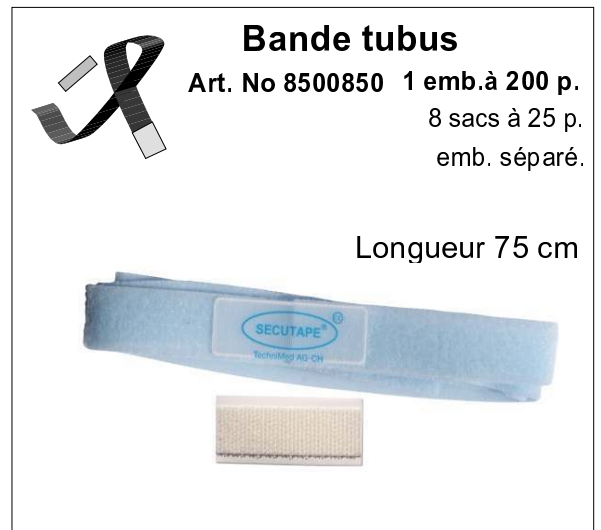

**Durée d'utilisation:
environ 1 - 2 jours**



CE
Made in Germany
www.secutape.ch



Länge 75 x 2cm





Bande Universelle



Appliquer

Pour tubes endotrachéaux et trachéostoma

Bande nylon double face nouvellement développée.
Hypoallergénique et agréablement moelleuse.

La bande ne s'étend pas, n'absorbe pas l'humidité et est facile à garder propre.

Elle doit donc être **changée beaucoup moins souvent** que des bandes traditionnelles en mousse ou textiles.

La bande ne doit pas être serrée et ainsi il y aura **moins de dommages à la peau**.

Fixation très sûre, faible consommation, application facile

Une bande pour toutes les deux applications!
Par ex. peut elle aussi être utilisée comme fixation d'un tube à la jambe.



Durée d'utilisation:
environ 1 - 2 jours





Originalgrösse
Band 40 cm





Soft Set



Appliquer

Pour tubes endotrachéaux

Rubans en nylon double face nouvellement conçus. Hypoallergéniques et agréablement moelleux. **Les bandes ne s'étirent pas!**

La **bande de fixation** éprouvée est recouverte au milieu d'un adhésif médical qui, enroulé autour du tube, le maintient en toute sécurité

La **bande de fixation plus large, épaisse et duveteuse**, qui est placée autour du cou, permet, en combinaison avec la bande de fixation de fixer le tube de manière extrêmement sûre.

La fixation peut être utilisée sans problème chez les patients présentant des lésions cutanées.

La fixation tient très bien, est facile à utiliser et ne provoque pas de points de pression en raison des propriétés du matériau.

Soft Set

Art. No 850900 1 emball. 200 p.

8 sacs. à 25 p.

Emball. séparé..



La bande de maintien peut être achetée séparément

**Durée d'utilisation: jusqu'à environ 3 jours.
Avec Pad Superabsorbent jusqu'à 5 jours**



CE

Made in Germany

www.secutape.ch



Tracheofix Comfort
53 x 3 cm
Absorber 20 x 4 cm



CE
Made in Germany
www.secutape.ch



Tracheofix[®]
Confort



Appliquer

Bande de fixation pour trachéostoma

Des avantages grâce à de **nouveaux matériaux!**


Bande nouvellement développée, très douce, épaisse et moelleuse en Nylon, hydrophobe et hypoallergénique.

La bande en deux parties **ne s'étire pas**, est simple à appliquer, réglable et **reste sèche**. Comme elle ne s'humidifie pas, elle est agréable à porter.


En raison des propriétés de son matériau, elle doit être changée moins souvent que les bandes de mousse ou de textile traditionnelles.

La bande convient à la plupart des largeurs du cou, il suffit de raccourcir en cas de longueur excessive.

Moins de consommation, moins de travail et de **déchets**.

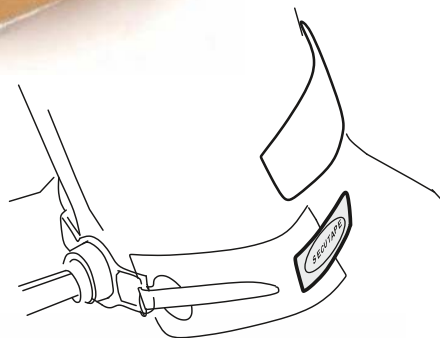

Tracheofix Confort

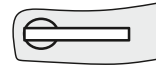

Art. No 8501750


Emball.séparé 4 sacs à 25 pcs

Longueur 50 x 3 cm

1 Emb. 100 pcs



Superabsorber Pad

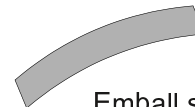

Art. No 8501770

Emball.séparé 4 sacs à 25 pcs

Longueur 20 x 4 cm

1 Emb. 100 pcs



plus d'informations:

www.secutable-schulungen.ch

**La bande peut rester au patient
quelques jours!**

Pad absorbant pour cette bande.

En cas de lésions de la peau ou de forte transpiration, nous recommandons notre **pad superabsorbant médical**.

Il est autocollant et garde le cou sec.

**Il permet d'améliorer ou d'éviter de
manière fiable les lésions de la peau!**

Idéal comme fixation à long terme!

CE

Made in Germany

www.secutable.ch



Originalgrösse





Krokofix



Appliquer

Pour la fixation de tubes quelconques aux vêtements ou à la lingerie

Fixation manuelle **anti-glisser** pour fixer tous les tubes.

Spécialement pour des patients mobiles ou **pour le relâchement de traction.**

Tout simplement attacher aux vêtements ou à la lingerie.

Krokofix est **réutilisable** et peut être désinfecté par des moyens classiques.

Krokofix **grand** peut être utilisé en tant que pour la fixation de **sacs à urine** normaux.



Krokofix grand

Art. No 8501420 1 emb. à 200 p.
8 sacs à 25 p.




23 cm



Krokofix petit

Art. No 8501410 1 emb. à 200 p.
8 sacs à 25 p.

16.5 cm

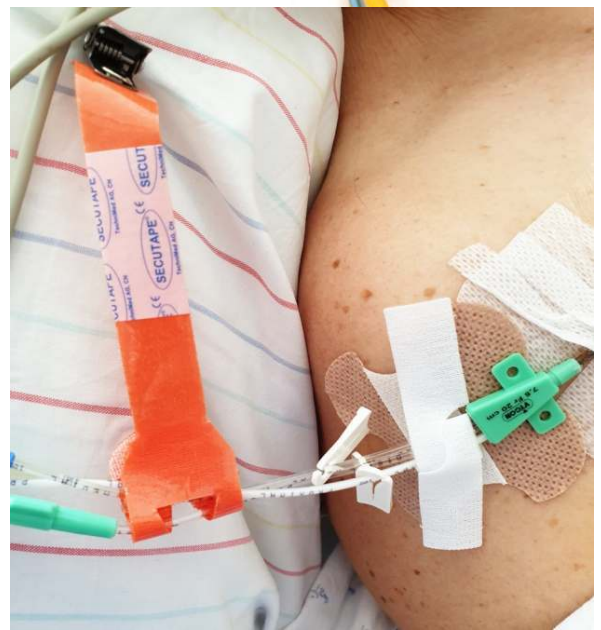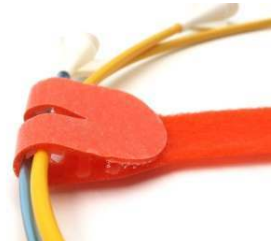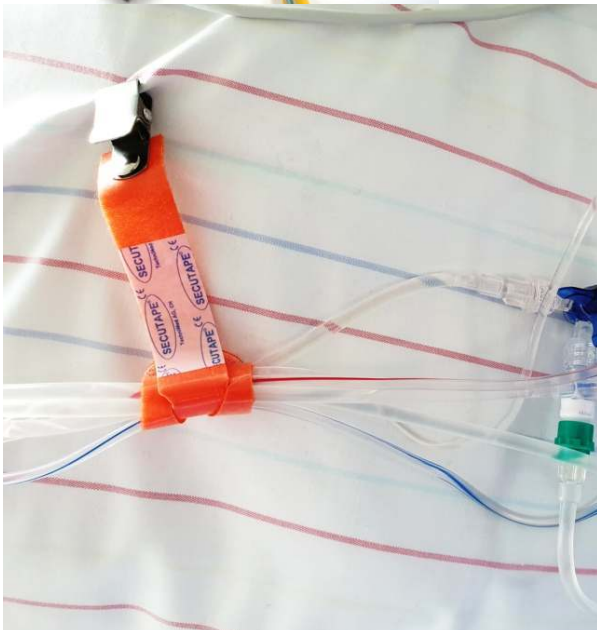



Set de fixation pour ECMO



Anwenden


Support de tête réglable pour fixer une ECMO veino-artérielle

Le support de tête en nylon hypoallergénique est réglable à **toutes les tailles de tête**

Il est en relation à la bande de fixation et les supports hydrocolloïdes une **fixation très sûre** laissant au patient un certain degré de **liberté dans ces mouvements**

La fixation supplémentaire des tubes au cou **réduit le chargement** au point de sortie

Les Krokofix ci-inclus - fixés à la literie - servent au relâchement de traction des tubes

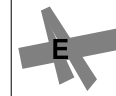


Set de fixation: ECMO

Art. No 8501610, emb. 10 sets



Le support de fixation et Krokofix peuvent être achetés séparément.

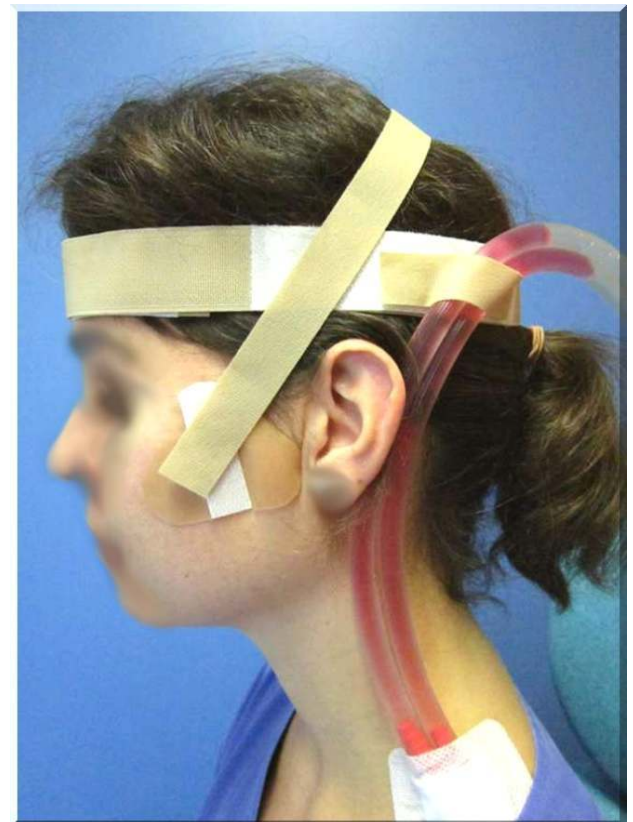


Made in Germany
www.secutape.ch

SECUTAPE[®]

**FIXIERUNG
FIXATION
FISSAGGIO**

mieux et sûr SECUTAPE

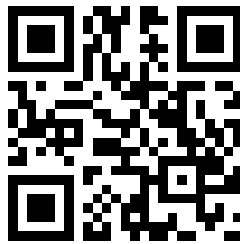

www.secutape.ch

