

# SINGLE-LET™ NEXT: Die sterile Einweg-Sicherheitslanzette<sup>1,2</sup>

## Ihre Vorteile mit SINGLE-LET™ NEXT:

### SICHERHEIT

- Schützt Sie und Ihre Patienten vor versehentlichen Nadelstichverletzungen

### KOMFORT

- Die silikonbeschichtete 28-Gauge-Nadel und die feste Einstichtiefe von 1,5 mm sorgen für zusätzlichen Patientenkomfort

### EINFACHE ANWENDUNG

- Einfache Bedienung in nur 2 Schritten: drehen und drücken (siehe Rückseite)

Die Nadel wird **automatisch zurückgezogen und arretiert, um eine Wiederverwendung auszuschliessen**

Gamma-sterilisierte **28-Gauge-Nadel**

1,5 mm Einstichtiefe

**Auslöseknopf** mit einer geriffelten Fingermulde<sup>3,4</sup>

Ergonomische Form mit zusätzlichen Seitenflügeln für einen **sicheren Halt**<sup>3,4</sup> beim Tragen von Handschuhen

Die lange Schutzkappe garantiert eine **sterile Nadel** und sorgt für ein **einfaches Abdrehen der Kappe**<sup>3,4</sup>

#### Medizinprodukt für qualifiziertes Fachpersonal

Die Abbildung entspricht nicht der tatsächlichen Produktgrösse

1. HTL-STREFA S.A. Data on file. TDS of Single-Let® Next type 520 safety lancets. 2. Simulated Clinical Use Testing to Evaluate Sharps Injury Prevention Features of HTL-STREFA's safety lancet type 520. Study report; dated 2019-02-12. 3. HTL-STREFA S.A. Data on file. Clinical study report version 1.0 according to the Study Protocol 02Lan2017, April 24, 2018 (appendix) 4. Janus-Dziedzic K, Zurawska G, Banyas K., Morozowska J. The impact of needle diameter and penetration depth of safety lancets on blood volume and pain perception in 300 volunteers: A randomized controlled trial. J Med Lab Diagn 2019 Jan Vol 10 (1), pp 1-12

# SINGLE-LET™NEXT: Bedienung in nur 2 einfachen Schritten\*



- 1 Schutzkappe **drehen** (A) und dann gerade **abziehen** (B).



- 2 Fest an der gewünschten Einstichstelle ansetzen und den Auslöseknopf **drücken**.



Pharmacode: **1122546**

**Ascensia Diabetes Care Service:**  
**+41 61 544 79 90**  
info@ascensia.ch  
www.ascensia-diabetes.ch

**ACHTUNG:** Nur für die Entnahme von Blutproben aus den Fingern verwenden.  
**Sterile Lanzetten** - nicht verwenden, wenn die Schutzkappe vorher von der Lanzette entfernt wurde.  
Reinigen Sie die Einstichstelle gemäss Ihren Sicherheitsvorschriften.  
Lanzetten nach Gebrauch nicht wiederverwenden.

\* Vollständige Anweisungen und Sicherheitshinweise finden Sie auf der Packung von SINGLE-LET™NEXT.

© 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle Rechte vorbehalten. Erstellungsdatum: Januar 2025.

Ascensia, das „Ascensia Diabetes Care“-Logo, Contour und Single-Let sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

92001844 01/25

Distributed by  
**puras**  
031 996 85 85  
puras.ch

  
**ASCENSIA**  
Diabetes Care