

3M™ Tegaderm™ Roll

unsteriler Transparentverband von der Rolle

Tegaderm Roll ist die unsterile Version von Tegaderm Film zum Abrollen und individuellen Zuschneiden.



Eigenschaften

- n wasser-, bakterien- und virendicht
- n atmungsaktiv
- n einfache Applikation und Handhabung – auch mit Handschuhen
- n wirtschaftlich
- n ist anschmiegsam und passt sich den Körperkonturen an
- n kann in Länge und Form zugeschnitten werden

Indikationen

- n Schutz gefährdeter Haut vor Reibung und Flüssigkeitskontakt
- n wasserfeste Fixierung von Primärverbänden
- n Fixierung von Kathetern oder Drainageschläuchen
- n Schutz beim Baden und Duschen

Kontraindikationen

- n kein steriles Produkt, daher nicht auf verletzter Haut, offenen Wunden oder i.v. Einstichstellen verwenden

Anwendung



Schneiden Sie die gewünschte Länge ab und entfernen Sie die Trägerfolie (weiss).



Halten Sie den Verband an den klebstofffreien Rändern und modellieren Sie ihn an gewünschter Stelle an.



Entfernen Sie die beiden Trägerfolien und drücken Sie den Verband für 15-20 Sekunden an.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt / Box	Pharmacode	MiGeL
16002	Rolle	5 cm x 10 m	1 Rolle	2987200	34.15.01.01.1
16004	Rolle	10 cm x 10 m	1 Rolle	2987217	34.15.01.03.1
16004S	Rolle	10 cm x 2 m	1 Rolle	4479726	34.15.01.03.1
16006	Rolle	15 cm x 10 m	1 Rolle	2987223	34.15.01.05.1