

VARIHESIVE®
E

VARIHESIVE®
E Border

Der bewährte Hydrokolloidverband



Produktgruppierung

Hydrokolloidverband
Primärverband und Sekundärverband

Zusammensetzung

Wundkontaktschicht:
Dreifach-Hydrokolloidmatrix,
bestehend aus Natriumcarboxymethyl-
cellulose, Pektin, Gelatine

Äußere Schicht:
filmbeschichteter Polyurethan-Schaum

VARIHESIVE® E Border hat einen
zusätzlichen Fixierband.

Indikation

Primärverband für alle trockenen bis feuchten, akuten und
chronischen Wunden

VARIHESIVE® E Border eignet sich durch den zusätzlichen
Fixierband speziell zur Versorgung von Wunden an Körper-
stellen / Lokalisationen, an denen eine besondere Haftung
des Wundverbandes benötigt wird, wie z.B. im Sakralbe-
reich oder Gelenkbereich.

VARIHESIVE® E / VARIHESIVE® E Border eignet sich als
Sekundärverband in Kombination mit AQUACEL® Extra™,
AQUACEL® Ag Extra™ und KALTOSTAT®

Wirkungsweise

- Bei Kontakt mit Wundexsudat kommt es zur Bildung
eines Gels, das ein optimales, feuchtes Milieu für die
Wundheilung schafft und die körpereigene Autolyse
unterstützt.
- Die Dreifach-Hydrokolloidmatrix geliert in unterschied-
licher Geschwindigkeit. (> Abb. 1)
- Der Polyurethan-Schaum absorbiert Wundexsudat.
- Der Polyurethan-Film gewährleistet eine zuverlässige,
wasserdichte Bakterien- und Virenschranke. (> Abb. 1)


Produktnutzen

- Die Dreifach-Hydrokolloidmatrix geliert in unterschiedlicher Geschwindigkeit, so dass ein dynamisches, gleichzeitig aber über längere Zeit beständiges System für die Aufnahme von Wundexsudat entsteht.
- Klinisch nachgewiesene Barriere gegen schädliche Bakterien und Viren, wie z. B. MRSA, Hepatitis-B-Virus und HIV-1
- schafft ein feuchtes Wundheilungsmilieu und fördert die Autolyse, wie in zahlreichen klinischen Studien nachgewiesen
- maximaler Patientenkomfort durch die schmerzlindernde Wirkung des Gels

Handhabung

- Um eine gute Haftung von VARIHESIVE® E und VARIHESIVE® E Border zu gewährleisten, sollte der Verband mindestens 3 cm über den Wundrand hinaus appliziert werden.
- Ab 3 mm Wundtiefe sollte ein Wundfüller, z.B. AQUACEL® Extra™, AQUACEL® Ag Extra™ oder KALTOSTAT® verwendet werden.

Weitere Informationen zur Anwendung von VARIHESIVE® E und VARIHESIVE® E Border und zu möglichen Kontraindikationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

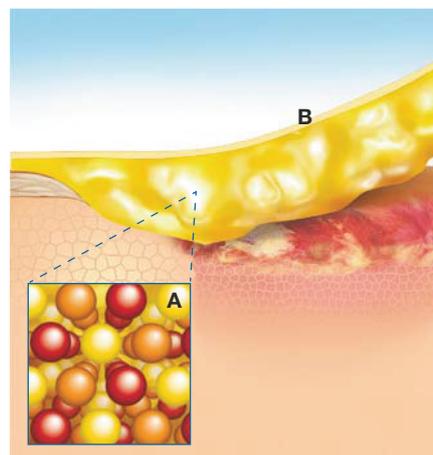

1_ Aufbau:

A Dreifach-Hydrokolloidmatrix für eine kontrollierte Absorptionsrate

B Bakterien- und Virenschranke



Bestellinformationen				D	A	CH	
Handelsform	Packungs-inhalt	Außengröße/ Gewicht	Wundkissen	Art.-Nr./ PZN	Art.-Nr.	Art.-Nr. REF	Pharma- code
VARIHESIVE® E							
	10 Stück	10 x 10 cm		075 228 07	752 28 07	187 639	181 84 06
	20 Stück	10 x 10 cm		075 228 13	–	–	–
	5 Stück	15 x 15 cm		038 177 01	381 77 01	187 661	139 97 54
	3 Stück	20 x 20 cm		038 177 18	381 77 18	187 663	139 97 60
	3 Stück	20 x 30 cm		038 177 24	381 77 24	187 642	139 97 77
VARIHESIVE® E Border							
	5 Stück	10 x 10 cm	6 x 6 cm	044 747 00	447 47 00	187 970	146 74 73
	5 Stück	14 x 14 cm	10 x 10 cm	044 747 17	447 47 17	187 971	146 74 96
	5 Stück	20 x 20 cm	15 x 15 cm	044 747 46	447 47 46	187 972	146 75 10
Tropfenform	5 Stück	15 x 18 cm	10 x 13 cm	044 747 23	447 47 23	187 973	146 75 04
Tropfenform	5 Stück	20 x 23 cm	15 x 18 cm	044 747 52	447 47 52	187 974	146 75 27